


Hi-Loo/Supporter

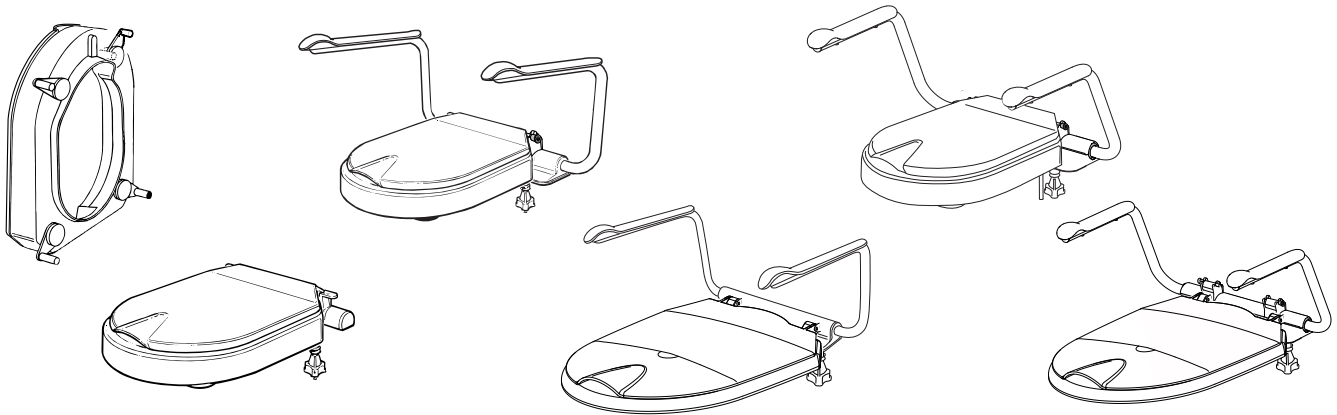

Reservdelar kan beställas enligt separat reservdelslista. Tänk på att produktens livslängd är begränsad (se manual). Detta är extra viktigt vid förskrivning till brukare som kan förväntas använda produkten under en längre tid. Tvätt- och rengöringsinstruktioner återfinns på produkten alternativt i manualen.

Produkterna skall rengöras med konventionella rengöringsmedel utan slipmedel. De skall rengöras regelbundet. Produkterna kan rengöras maskinellt i 85° i maximalt 3 minuter och även torkas maskinellt i 70° i 10 min. Vid rengöring i diskabinett skall produkten vara fixerad och placeras upprätt.

Vid rekonditionering bör följande kontrolleras:

- 1) Att snabbmutter och adapter (hylsa runt fästskruv) är i bra skick. Då dessa detaljer utsätts för stora påkänningar och sitter i en aggressiv miljö bör kontrollen vara noggrann. Detaljerna kan ses som säkerhetsdetaljer och av detta skäl skall detaljerna bytas ut vid tveksamheter.
- 2) Att skruvarna till gångjärnen på locket till supporter sitter fast. Om skruvarna sitter löst eller skall bytas p.g.a. slitage: Skruva ut skruven helt och rengör gängan med en trasa vid behov. Droppa låsvätska (motsvarande loctite 243 eller likvärdigt) enligt tillverkarens instruktioner på skruvgängan och skruva i skruven med en stor skruvmejsel och dra åt ordentligt (2,5 Nm).
- 3) Att armstödsbrickorna sitter fast. Kontrollera att skruvarna är åtdragna och att inte armstödsbrickan är trasig.
- 4) Att fastsättningsmekanismen är komplett och i bra skick. Kontrollera enligt monteringsanvisning att alla delar finns och är monterade på ett riktigt sätt.
- 5) Att kantstoppen på Hi-Loo är i funktionsdugligt skick. Kontrollera enligt monteringsanvisning att alla delar finns och att justering av kantstoppen fungerar.

D.v.s. att kantstoppen kan lossas och flyttas och därefter dra åt med säkerhet.

Då dessa detaljer kan ses som säkerhetsdetaljer bör kontrollen vara noggrann och vid tveksamheter skall detaljerna bytas ut.

- 6) Att tornen på Hi-Loo:s fästarrangemang sitter fast ordentligt, utan att ha skruvat upp sig. Om tornen sitter löst. Skruva ut skruven under locket helt och rengör gängan med en trasa vid behov. Droppa låsvätska (motsvarande loctite 243 eller likvärdigt) enligt tillverkarens instruktioner på skruvgängan och skruva i skruven med momentnyckel (7,5 Nm).
- 7) Att låsdelarna är funktionsdugliga (de plastdetaljer som snäpper fast sittstolen vid fästarrangemangen). Kontrollera så att inte fjäderlåsen sitter löst eller att fjäderingen upplevs vara dålig vid montering respektive demontering. Då dessa detaljer kan ses som säkerhetsdetaljer bör kontrollen vara noggrann och vid tveksamheter skall detaljerna utbytas.
- 8) Att produktens olika funktioner fungerar. T.ex. att justeringsfunktioner fungerar, att produkten går att fälla upp om det är syftet, att armstöd går att fälla upp och ned om det är syftet o.s.v.
- 9) Att löstagbara detaljer är i dugligt skick och är Etac:s originalprodukter. Detta för att kunna ta fullt ansvar för produkten efter rekonditionering.
- 10) Fyll i lackskador med Etacs bättringsfärg. RAL 9003 (glans 90)

78236G

20-06-04

Etac, Box 203, SE-334 24 Anderstorp

Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90

www.etac.com