



etac[®]

Produktguide

Mobila dusch- och toalettstolar

Att underlätta för användare och vårdare

Mobila dusch- och toalettstolar måste vara mångsidiga eftersom de används både för dusch, toalettbesök och transport. Eftersom de primärt är avsedda för personer som behöver assistans är ergonomisk funktionalitet för vårdaren särskilt viktig. Bra arbetsförhållanden för vårdaren samt komfort och säkerhet för användaren utgör grunden för värdig vård.

Förenklar vårduppgifter

En mobil dusch- och toalettstol förenklar hygienuppgifter avsevärt, eftersom användarna kan förbli på plats när de använder dusch, toalett eller handfat, samt när de ska till och från badrummet. Detta minskar behovet av ytterligare förflyttningar.

Detta ställer emellertid särskilt höga krav på ergonomisk och användarvänlig funktionalitet som underlättar dagliga besök i badrummet för både användare och vårdare.

Utvecklad utifrån insikt

Etac har utvecklat mobila dusch- och toalettstolar i över 30 år, och genom nära samarbete med professionella vårdgivare och användare har vi fått en gedigen förståelse för de utmaningar de står inför. Dessa insikter är hörnstenarna i vår designprocess, och vi ser till att hålla oss uppdaterade om morgondagens vårdbehov genom kontinuerlig forskning. Vi kallar det insiktsdriven utveckling.



Etac, en ansedd kvalitetsstämpel

Etacs badrumsprodukter har en lång historia av ansedd kvalitet och som uppfyllar de högsta standarderna. Våra produkter används över hela världen, och flera av dem har fått erkännande genom designpriser genom åren.

Men framför allt har de utvecklats med användare och vårdgivare i åtanke - och den fasta övertygelsen att hjälpmedel aldrig bör kompromissa med god design.

Läs om vår produktutveckling genom att följa länken i QR koden.



Assisterad personlig vård

Ergonomin i samband med assisterad personlig vård är komplex. Inte bara är personlig hygien en mycket privat angelägenhet för användaren, utan vårdgivarna måste också ha en funktionell arbetsmiljö. Vid valet av en mobil dusch- och toalettstol måste hänsyn tas till både användarens och vårdgivarens behov samt deras fysiska omgivningar, tre faktorer som ibland kan vara i konflikt.



Värdig vård för användarna

Värdighet, säkerhet och komfort för användarna är våra främsta prioriteringar. Vi måste erbjuda mjukhet och stöd på rätt ställen, samt möjlighet till individuella justeringar. Deras upplevelse påverkar inte bara dem själva, utan även vårdgivaren. De flesta vårdgivare hävdar att användarens komfort är avgörande för att möjliggöra arbete utan risk för skador. Användare bekräftar i sin tur att de tycker det är ovärdigt om vårdgivaren måste kämpa för att assistera dem. I grunden går värdig vård för användaren hand i hand med en hälsosam arbetsmiljö för vårdgivaren.

God arbetsmiljö för vårdare


Att hjälpa till med personlig vård kan vara utmanande, särskilt om användaren inte kan assistera. Processen inkluderar ofta tunga lyft och obekväma positioner som över tid kan leda till arbetsskador. Förutom att förenkla transport underlättar en mobil dusch- och toalettstol vårdarens arbete under hela hygienrutinen.

Enligt vår forskning vet vi att det primära behovet för vårdare är att ha god åtkomst runt sätet för att enkelt kunna nå och rengöra personen. Som ett resultat är våra stolar utformade med generösa öppningar för att förbättra tillgängligheten. De är också utvecklade med ergonomiska och intuitiva funktioner som våra främsta prioriteringar.



Badrummet som arbetsplats

Badrum är av definition svåra att arbeta i. Utrymmet är oftast knappt och framför allt är bostadsbadrum inte byggda för att rymma vårdpersonal. Ibland innebär detta tyvärr att valet av produkt bestäms av miljöfaktorer snarare än mänskliga faktorer. Även om detta inte är idealiskt visar det komplexiteten inom assisterad vård och att beslut ibland måste fattas genom kompromisser.

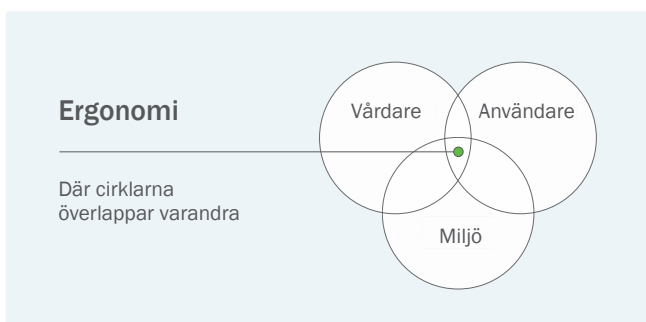

Kategorier av mobila dusch- och toalettstolar

Etacs mobila dusch- och toalettstolar är indelade i tre huvudkategorier, där de flesta är av typen som körs av vårdaren. Det finns många olika versioner med olika fördelar och lämplighet för olika användare och vårdmiljöer. Denna guide ger en översikt över sortimentet och erbjuder hjälp för att hitta den mest lämpliga modellen.



Självmanövrerade modeller

En modell för mer självständiga användare som vill maximera sin mobilitet och kan driva stolen själva. Stolarna är lätta att manövrera tack vare 24-tums hjul som är placerade för maximal kontroll och balans. Generöst utrymme runt sätet och fällbara/svängbara armstöd underlättar sidförflyttningar. Förutom det har de samma fördelar som standardmodellen.



Standardmodeller

En stol som drivs av vårdaren och underlättar toalettbesök, dusch och transport. Den utgör grundmodellen för alla andra kategorier. Lämplig för någon som har kontroll över sin kroppsposition, kan sitta upprätt under hygienerutiner och kanske kan hantera vissa vårduppgifter självständigt. Sitsen har en öppning för toalettbesök som också ger tillgång för personlig vård.



Modeller med tiltfunktion

En stol som ger extra stöd för personer som har svårt att sitta länge på grund av begränsad kroppspositions kontroll. Tiltfunktionen gör det lättare att positionera personen väl tillbaka i sätet. Etacs modeller kan tiltas från valfri sida samtidigt som ögonkontakt mellan användare och vårdare bibehålls, vilket gör processen smidigare, säkrare och tryggare för båda parter.



Förflyttningar till och från stolen

Användare av mobila dusch- och toalettstolar behöver oftast extra hjälpmedel, särskilt för förflyttningar. På samma sätt som personens rörlighet påverkar vilken stol man väljer, är det också kopplat till vilket hjälpmedel för förflyttningar som används. Ibland är det den befintliga lösningen för förflyttningar som avgör vilken stol man väljer, men det kan också vara tvärtom. På ett eller annat sätt går de hand i hand och bör väljas med hänsyn till den totala vårdssituationen.

Sittande förflyttningar

Personer med stabilitet i bålen och god styrka i armarna och överkroppen kan möjligen utföra en sittande förflyttning till duschstolen (självständigt eller med assistans). För att underlätta processen kan en glifbräda användas, utformad för att överbrygga kortare avstånd vid sittande förflyttningar. Denna persons nivå av rörlighet kan vara väl lämpad för en självmanövrerad stol.



Stående förflyttningar

Ett uppresningshjälpmedel är lämpliga för personer med god kroppspositionskontroll och förmågan att bära sin egen vikt, liknande någon som använder en vanlig mobil dusch- och toalettstol. Denna typ av förflyttning till och från stolen främjar aktivitet och stimulerar personens egen muskelstyrka.

Uppresningshjälpmedel tar upp lite utrymme, vilket kan vara praktiskt i badrum och toaletter.



Flyttningar med lyft

De som inte kan stå behöver lyftas in i stolen med hjälp av en lyft. Denna typ av förflyttning kan vara en utmärkt kombination med en stol med tiltfunktion, eftersom personen förblir stödd under hela processen och kan positioneras långt tillbaka i den lutade sitsen. Det finns både mobila och takmonterade lyftalternativ.



Val av produktlösningar

Ur vårdarens perspektiv är den bästa produkten oftast den som minskar arbetsbördan mest. Användare däremot gynnas av produkter som aktiverar dem och hjälper dem att behålla förmågor. Detta kan vara svårt att balansera eftersom dessa två behov ibland är i konflikt. Den bästa lösningen kräver en holistisk ansats och avvägning av olika faktorer mot varandra.

Etac erbjuder produkter för det dagliga behov och vårdmiljöer.

Följ länken i QR koden för mer information om våra förflyttningshjälpmedel.



Clean familjen



Utmärkt funktionalitet – utan komplexitet

Clean är en prisbelönt klassiker och en av Etacs absoluta bästsäljare. Introducerad för över 20 år sedan, satte den standarden för kommande duschstolar och behåller sin position än idag. Dess utmärkta hygieniska och användarvänliga funktioner gör den populär både inom vårdmiljöer och i hemmiljöer runt om i världen. En av Cleans mest betydande egenskaper är dess smala design, vilket gör den lätt att manövrera och passa in där utrymmet är begränsat.

Clean modeller



Standard



Öppen fram



Höjjusterbar



Självmanövrerad

Kort sammanfattning

- Litet fotavtryck, enkel att köra
- Flexibel funktionalitet utan komplexitet
- En perfekt passform över olika toaletter, inklusive väggmonterade modeller
- Ram som är lätt att hålla ren

Fast ryggstöd

Lätt att torka av. En mjuk rygg finns som en variant och tillbehör.

Upprätt körhandtag

Det uppräta handtaget möjliggör en nära passform över olika toalettmodeller. Vårdare kan greppa ovanifrån eller från sidorna.

Utsvängbara armstöd

Kan enkelt flyttas eller tas bort för att underlätta förflyttningar.

Alternativ för sitsöppning

Sits med antingen bakre eller främre öppning för enkel åtkomst.

Smal men rymlig

Enkel att manövrera genom trånga dörröppningar eller där utrymmet är begränsat.

Fotstöd

Ett unikt fotstöd som fälls in under stolen när det inte används. Rundad form på fotplattan för komfort och avslappning.



Clean, standard modell

Swift Mobil-2 familjen

En mycket anpassningsbar serie

Swift Mobil-2 utvecklades baserat på vår hittills mest omfattande undersökning bland användare och vårdare, och utformades med ergonomiska funktioner och många möjligheter till individuell anpassning. Familjen inkluderar många versioner, flera justeringar som standard och ett brett utbud av tillbehör. Modellen med tiltfunktion har en unik funktion där vårdaren kan luta med hög precision samtidigt som ögonkontakt med användaren bibehålls.

Kort sammanfattning

- Mycket anpassningsbar för olika användarbehov
- Justerbart nackstöd, armstöd, sitsens höjd och benstöd
- Erjuder XL-variant för större användare
- Ett brett utbud av tillbehör

Swift Mobil-2 modeller



Standard



Upprätt rygg



XL version



Tiltbar



Självmanövrerad

Etac "Easy Clean"-yta

En unik yta med en perfekt balans mellan friktion och renlighet. Halkfri och hygienisk.

Mjukt ryggstöd

Mjukt, justerbart och snabbtorkande. Stabil passform med dubbla fästen runt körhandtaget.

Sits med öppning bak

Rymlig öppning bak. Urtag fram och öppna sidor för enkel åtkomst.

Justerbara armstöd

Individuellt fällbara armstöd som kan justeras i höjd eller bredd.

Justerbara benstöd

Utsvängbara benstöd som kan justeras i höjd. Vålvda fotplattor ger naturligt stöd för foten, komfort och stabilitet.

Höjjusterbar

Enkel att justera till olika sitshöjder, utan behov av verktyg.



Swift Mobil -2, standard modell

Hur man väljer rätt mobil dusch- och toalettstol

1 Introduktion

Att välja rätt mobil dusch- och toalettstol kan vara lika enkelt som att bestämma vilka av de två familjernas allmänna egenskaper som passar bäst, följt av att matcha rätt kategori med den individuella användaren. Det kan dock också handla om mycket specifika krav som endast uppfylls av vissa modeller. Avsnitt A-B täcker detaljerade behov relaterade till användare, vårdare och vårdmiljöer som kan påverka vilken modell man ska välja. Om inget av dessa gäller kan de allmänna rekommendationerna för varje serie och kategori hjälpa till att begränsa beslutet.

2 Vilken familj ska man välja - allmänna egenskaper

Swift Mobil familjen

Kan vara särskilt lämplig för personer som behöver flera individuella anpassningar för att vara väl understödda och bekväma. Stolen kan modifieras över tid om användarens rörlighet förändras, och även anpassas för olika personer. Swift Mobil har många justeringar som standard och erbjuder det största utbudet av tillbehör.



Clean familjen

Praktiskt för användare som önskar de allmänna fördelarna med en mobil dusch- och toalettstol men inte kräver lika många individuella anpassningar. Clean erbjuder all nödvändig funktionalitet samt viss flexibilitet - men utan ytterligare komplexitet. Passar användare och vårdare som vill ha så enkla funktioner som möjligt.



3 Vilken kategori man ska välja för olika användare

Självmanövrerade modeller

Passar för personer som:

- Har god kontroll och stabilitet i övre kroppen
- Har tillräcklig armstyrka för att driva stolen
- Kan hantera förflyttningar och personlig hygien mer självständigt

Standard modeller

Passar för personer som:

- Har kontroll över sin hållning och kan sitta upprätt
- Kan justera och korrigera sin sittställning själva
- Kan hantera vissa uppgifter självständigt

Tilt modeller

Passar för personer som:

- Har måttlig eller låg kontroll över sin hållning
- Kan endast sitta upprätt om de stöds väl och behöver tiltas för att positioneras väl i stolen
- Behöver vanligtvis mer personlig assistans

A Användarspecifika behov

Större användare, XL modeller

För större användare är Swift Mobil-serien det bästa valet. Den erbjuder XL-modeller med bredare ryggramar och ökad benutrymme, samt en maximal användarvikt på 160 kg.

Öppen sits fram

Generellt sett har våra duschstolar sitsöppningen baktill. För personer som föredrar åtkomst från framsidan eftersom det passar deras personliga preferenser eller förmågor bättre, är en sitsöppning framtill det bättre valet.

Tips för användare med känsliga ryggar

Vår justerbara ryggstöd i mjukt nät är perfekt för personer med känsliga ryggar, eftersom det formar sig efter ryggraden. Det justerbara ryggstödet i mjukt nät kan vara ett bra alternativ för dem som tycker att det fasta ryggstödet är för hårt. Det mjuka ryggstödet har en större yta, vilket innebär att det omfördelar trycket bättre. Dessutom följer det ryggens kurvatur och främjar en skön och mjuk support för ryggen. Det mjuka ryggstödet är tillgängligt för alla våra duschstolar, som tillval eller inkluderat som standard.

Produktval

- Välj en Swift Mobil XL modell

- Välj Clean med öppen sits fram

B Specifika behov för vårdmiljön

Stolen behöver betjäna flera personer över tid

Om duschstolen används av flera användare över tid, till exempel på marknader där hjälpmedel föreskrivs och hanteras genom utrustningsleverantörer, är det bra med en stol som kan anpassas till olika individer.

Vårdpersonal utan formell utbildning

Om personal som socialarbetare eller familjemedlemmar utan formell utbildning kommer att hantera stolen kan det vara fördelaktigt med enklare funktionalitet istället för avancerade funktioner som kanske inte används.

Framförallt används över vägghängda toaletter

Vissa duschstolar kan vara svåra att positionera över vägghängda toaletter. De som använder stolen främst för toalettbesök och över en vägghängd toalett bör välja en modell som är specifikt utformad för det ändamålet.

Begränsat utrymme

Begränsat badrumsutrymme eller smala passager kan påverka vilken stol man väljer. Dörr(öppningar) och golvyta bör jämföras med bredden och fotavtrycket för duschstolen innan man bestämmer sig för en modell.

Institutioner med specifika rengörings-/tvättkrav

I miljöer med specifika krav på att kunna maskintvätta eller använda alkoholavtorkning för att rengöra stolen kanske inte en mjuk rygg räcker till. En modell med fast ryggstöd kan vara det bättre valet.

- Välj vilken Swift Mobil som helst

- Clean har enklare funktionalitet

- Välj Swift Mobil-2 med upprätt rygg eller en Clean modell.

- Clean har det minsta fotavtrycket

- Clean har en fast rygg

Produktvalsguide

Etac mobila dusch- och toalettstolar



Produkt	Clean	Clean höjdbar
Kategori	Standard	Höjdbar
Primära funktioner	Nätt i storlek, lätt att köra och använda Extra hygienisk design, lätt att rengöra Finns med sitsöppning fram och bak Färgalternativ i vitt och lagungrönt	Höjdbar sitshöjd Nätt i storlek, lätt att köra och använda Har fler alternativ för fotstöd än standardmodellen Clean.
Tillbehör Tillbehören är bara exempel från ett mycket större sortiment. Besök vår webbplats för det kompletta och kontinuerligt uppdaterade utbudet.	Mjuk ryggklädsel Mjuksitsar Sittdynor Höft/brösthälten Pottor Tvärså	Mjuk ryggklädsel Mjuksitsar Sittdynor Höft/brösthälten Pottor Valbara fotstöd Tvärså
Jämförelsematrix		
Sitsens höjd	44/49/55/60* cm varianter	Justerbar 47,5-60 cm
Max användarvikt	130 kg	130 kg
XL-variant för större användare	-	-
Total bredd (passage genom dörrar)	50 cm	54 cm
Fast ryggstöd	✓	✓
Mjukt ryggstöd	Valfri	Valfri
Sitsöppning	Öppen bak eller fram	Bak
Typ av armstöd	Sidosvängbara	Sidosvängbara
Justerbara armstöd	-	-
Typ av fotstöd (alla är höjdbar)	En enhet, utfällbart	En enhet, utfällbart
Huvudstöd och häremmar	-	-
Förbättrad passform över vägghängda toaletter	✓	✓
Avstånd över toaletten, maximal höjd	40/45/49/54 cm	56 cm
Frihöjd under sits. Mått inkl bäckengejder, bygger 15 mm.	38,5/43,5/49,5 cm	42-54,5 cm
Höjd över toaletten, maximal bredd	39 cm	39 cm

* 60 cm uppnår man bara med förhöjningsklossar

Produktsidor

Besök www.etac.se för mer information och artikelnummer.





Clean 24"	Swift Mobil-2	Swift Mobil Tilt-2	Swift Mobil 24"-2
Självmanövrerad	Standard	Tiltbar	Självmanövrerad
Lätt att manövrera, lättillgängliga bromshandtag	Justerbar sitshöjd, ryggstöd, fotstöd och armstöd	Unik tilt från sidan, möjliggör ögonkontakt mellan användare/vårdgivare	Bakhjulen positionerade för maximal kontroll
Generöst utrymme framför hjulen underlättar sidoförflyttningar	Finns i XL-variant för större användare	Justerbar sitshöjd, ryggstöd, fotstöd, armstöd och huvudstöd	Enkla sidoförflyttningar med generöst utrymme framför hjulen
Finns med sitsöppning fram och bak	Finns med varianter för optimal passform över vägghängda toaletter	Finns i XL-variant för större användare	Justerbar sitshöjd, ryggstöd, fotstöd, armstöd och huvudstöd
Färgalternativ i vitt och lagungrönt		Inkluderar huvudstöd och hälremmar	Finns i XL-variant för större användare
Mjuk ryggklädsel Mjuksitsar Seat covers Hip/chest belts Pans Tvärslå	Mjuk ryggklädsel Mjuksitsar Höft/brösthälten Pottor Valbara fotstöd Tvärslå XL-rygg	Mjuk ryggklädsel Mjuksitsar Höft/brösthälten Pottor Valbara fotstöd Tvärslå	Mjuk ryggklädsel Mjuksitsar Höft/brösthälten Pottor Valbara fotstöd Tvärslå XL-rygg
55 cm	Justerbar 45-60 cm	Justerbar 50-65 cm	Justerbar 45-60 cm
130 kg	160 kg	160 kg	160 kg
-	✓	✓	✓
67 cm	64 cm	64 cm	74 cm
✓	-	-	-
Valfri	✓	✓	✓
Öppen bak eller fram	Bak	Bak	Bak
Sidosvängbara	Inställningsbara	Inställningsbara	Inställningsbara
-	I höjd och/eller bredd	I höjd och/eller bredd	I höjd och/eller bredd
En enhet, utfällbart	Individuella, sidosvängbara	Individuella, sidosvängbara	Individuella, sidosvängbara
-	Valfri	✓	Valfri
✓	Ja, med modellen upprätt rygg	-	-
49,5 cm	55 cm	58 cm	57 cm
49,5	42,7-57,5 cm	42,7-57,5 cm	42,7-57,5 cm
39 cm	40 cm	40 cm	40 cm





Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities