

Rekonditionering – Rengöring

etac®

2019-03-01



Kontrollera regelbundet produkten, helst inför varje användningstillfälle.
Reparera aldrig själv en produkt. En defekt produkt får inte användas.



Rhombo-Fill

Små rombiska polyuretanstavar med mycket hög elasticitet.



Rhombo-Med

Elastiska bolsterpärlor samt små rombiska polyuretanstavar med mycket hög elasticitet.

Positioneringskuddar

Kontrollera att sömmar och tyg inte har skadats.
Tvätta i max 95°C Torktumla i max 70°C.
Använd inte sköljmedel och klorin.



Använd ej sköljmedel

Hygienöverdrag

Kontrollera att sömmar och tyg inte har skadats.
Tvätta i max 95°C Torktumla i max 70°C.
Använd inte sköljmedel och klorin.

Hygienöverdrag



Använd ej sköljmedel

Bomull/finjersey överdrag

Kontrollera att sömmar och tyg inte har skadats.
Tvätta i max 95°C Torktumla i max 70°C.
Använd inte sköljmedel och klorin.



Använd ej sköljmedel