

Bruksanvisning

Etac Socky Strumpådragare

Socky strumpådragare kort




Strumpådragare för att ta på korta och långa strumpor och sockor.

Socky strumpådragare lång




Strumpådragare för att ta på korta och långa strumpor och sockor.


Stödstrumpådragare Socky för stöd- och kompressionsstrumpor

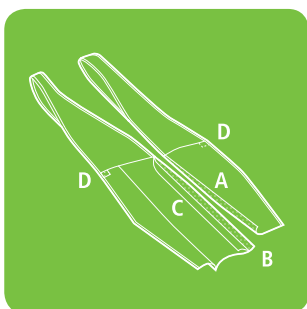

Fäst ihop kardborrebanden (A mot B) Vik över fliken (C).

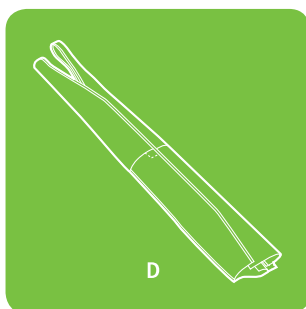

Vik ihop och fäst kardborrebanden (D).

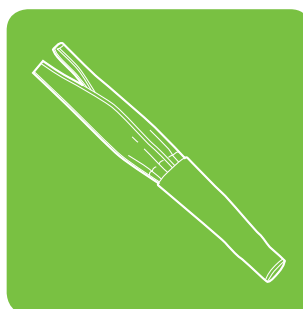

Dra på hela strumpans längd, med hälen nedåt.



Dra samtidigt i båda handtagen. Foten ska vara torr vid påtagning.

Beskrivning	Art. nr.	Vikt	Längd
Socky strumpådragare, kort	80601002-2	94 g	40 cm
Socky strumpådragare lång	80601001-2	146 g	60 cm
Strumpådragare för Socky stöd- och kompressionsstrumpor	80601003-2	90 g	100 cm

Mått

Passar alla skostorlekar. Normalt till stort vadmång.

Material

Tyg: Polyester, plastdelar: Polypropen

Design

HM Center

Rengöring

Produkten kan torkas av och tvättas för hand. Rengör med vanliga rengöringsmedel utan slipmedel med pH-värde 5-9. Desinficeras med 70% rengöringssprit.

