



R82<sup>®</sup>

# R82 Crocodile

Den smidiga och bakåtvända rollatorn för det aktiva barnet.

# R82 Crocodile

Crocodile är en bakåtvänd rollator för det aktiva barnet som både kan och vill göra lite mer. Rollatorn används bakom barnet vilket ger optimalt stöd och ett bra gångmönster.



Storlek 0, vit

## Stöd för rörelse

Crocodile har en öppen ramkonstruktion vilket ger barnet friheten att välja den optimala positionen för olika typer av aktiviteter. Genom att gå framåt i ramen kan barnet använda sin balans och koordinationsförmåga samt flexibiliteten att vända.

Crocodile i standardutförande passar de barn som behöver lite stöd. För barn som behöver ytterligare stabilitet kan rollatorn kompletteras med olika tillbehör.

Crocodile är enkel att fälla ihop och är därför lätt att ta med överallt. Den kommer i fyra storlekar och kan användas både inom- och utomhus.

### Crocodile

Stl	Art.nr
Stl 0: vit	3186800
Stl 1: gul	3186801
Stl 1: gul inkl. tippskydd	3186801-ATS
Stl 2: orange	3186802
Stl 2: orange inkl. tippskydd	3186802-ATS
Stl 2: svart pärlemor	3186852
Stl 2: svart pärlemor inkl tippskydd	3186852-ATS
Stl 3: grå metallic	3186803
Stl 3: grå metallic inkl tippskydd	3186803-ATS

### Chassi

Stl 0-2: lättviktsaluminium  
Stl 3: lättviktsaluminium och stål

### Hjul

Framhjul: Massiva 150 x 30 mm, svängbara med riktningsspärr  
Bakhjul: Massiva 200 x 30 mm

### Toppygel

Justerbar i höjdd, med polstring och skydd

### Bromsar

Släpbroms och backspärr på bakhjulen.

### Handtag

Justerbara i sidled och höjdd.

### Färg

Vit, gul, orange, svart pärlemor, grå metallic



Storlek 1

Gul



Storlek 2


Orange och svart pärlemor



Storlek 3

Grå metallic

## Detaljer

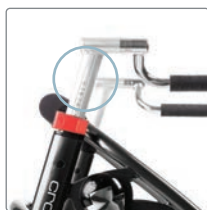

### Höjjusterbar

Lätt att justera höjden utan verktyg.




### Multijusterbara handtag

Tillåt barnet att växa i bredd och höjd. Placering av handtagen nära kroppen ger bättre stöd och bättre position.



### Backspärr

Är lätt att låsa och låsa upp och förhindrar rollatorn från att rulla bakåt. Backspärren används av barn och ungdomar som behöver lite extra balans och kontroll.

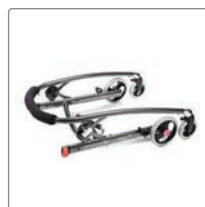

### Ihopfällbar ram

Det är enkelt att förvara och transportera Crocodile.

## Mina första steg

Crocodile ombyggnadskit – Mina första steg, gör det möjligt att anpassa Crocodile stl 1 till en mindre storlek. Det innebär att Crocodile bli användbar för ännu mindre barn som får möjligheten att utforska sin omgivning och ta nästa steg i sin utveckling.

Med ombyggnadskitet kan barn vid tidigare ålder börja använda rollator Crocodile från den tidpunkt de är cirka 70 cm långa, beroende på kroppsstorlek. Det innebär att användningstiden för Crocodile storlek 1 förlängs, då den blir användbar för barn från 70 cm till 115 cm.



## Mått och vikt

Beskrivning	Ombyggnadskit Mina första steg	Storlek 0	Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3
Total bredd	620 mm	680 mm	630 mm	690 mm	690 mm
Längd	660 mm	640 mm	720 mm	840 mm	870 mm
Bredd mellan handtag	90–250 m	100–250 mm	190–350 mm	320–600 mm	330–640 mm
Höjd, golv till handtag	380–540 mm	300–610 mm	420–715 mm	550–840 mm	750–1045 mm
Längd ihopfäld	720 mm	650 mm	720 mm	860 mm	1000 mm
Bredd ihopfäld	620 mm	580 mm	620 mm	690 mm	690 mm
Höjd ihopfäld	310 mm	300 mm	310 mm	270 mm	290 mm
Vikt	5.5 kg	6 kg	7 kg	7 kg	12 kg
Max. brukarvikt	30 kg	30 kg	30 kg	45 kg	80 kg
Max. brukarlängd	1150 mm	1050 mm	1150 mm	1500 mm	1800 mm
Svängradie	1000 mm	1440 mm	1600 mm	1900 mm	2000 mm

## Tillbehör



### Bålstöd

För extra stöd  
Stl 0

31868610



### Ledsagarhandtag

Justerbart i höjd och vinkel. Kan monteras på hö eller vä sida, fram eller bak.  
Stl 0-2

3186866-1



### Tvärstag

Stl 0  
Stl 1  
Stl 2

3186879-0  
3186879-1  
3186879-2



### Sits

Stl 0, vit  
Stl 1, gul  
Stl 2, orange  
Stl 2, svart  
Stl 3, grå metallic

3186820-01  
3186820  
3186821  
3186823  
3186863



### Underarmstöd inkl. handtag, par

Stl 1  
Stl 2  
Stl 3

3186858-1  
3186859-1  
3186860-1



### Tippskydd, svängbara

Kan även beställas i standardutförande.  
Stl 0-2  
Stl 3

3186815  
3186815-3S

För fler tillbehör – besök [etac.se](http://etac.se)



För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök [www.etac.se](http://www.etac.se)

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ [info@etac.se](mailto:info@etac.se)

🌐 [www.etac.se](http://www.etac.se)

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities