

Liljenberg 3-delad madrass



Mjukfibermadrass

Liljenberg 3-delad madrass

Madrassen består av tre mjukfiberdelar som ligger i ett madrassfodral med fickor. Detta gör att man kan flytta delarna i madrassen för en jämnare belastning samt att man kan rengöra varje del var för sig. Går även att använda i en vanlig hushållstvättmaskin.

Utsatta kroppsdelar avlastas och de glatta fibrerna motverkar skjuvning. Madrassen passar även för lite tyngre brukare och är även mycket uppskattad av brukare som har värk och smärttillstånd.

Fakta

Vikt: 4.3 kg

Färg: Benvit

Brand: SS 876 00 01

Garanti: 2 år

Tvättanvisning: Normalfall - tvätta i 60 °C. Vid infektionsrisk/hård nedsmutsning - tvätta i 70 °C, minst 10 min. Torktumlas i normal temperatur.



Hantering

Liljenberg 3-delad madrass läggs på en vanlig madrass och fästs på underliggande madrass med resårbanden i hörnen. Bädda med lakan, samt vid behov, inkontinensskydd eller hygienunderlägg. För att undvika ökad belastning mot huden, använd så få lager som möjligt mellan brukare och madrass.

Storlekar

80/90/105/120x200 cm.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB.

© Care of Sweden AB, 2014. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 14/06/16.



Madrassväljaren

- Guidelines vid val av produkt

Läs om hur du väljer rätt madrass på:

www.careofsweden.se/madrassvaljaren

 care of sweden
Supporting Life

Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo
0771-106 600 | info@careofsweden.se | www.careofsweden.se