

Bruksanvisning

2014-04-02

Curera® Positionering

Avser produkterna:
Curera® Positioneringskudde
Curera® Positioneringsrulle
Curera® Ryggkudde
Curera® Nackkudde
Curera® Multikudde
Curera® Stödkil

Artikelnummer bruksanvisning: 95-001005



7 3 3 1 3 4 5 0 1 1 9 1 2



Innehållsförteckning

Viktiga säkerhetsföreskrifter	2
Introduktion	3
Rengöring	4
Övrig information	5
Egna noteringar	7

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs alla instruktioner före användning

WARNING!

1. Produkten får endast användas till det den är avsedd för enligt beskrivningen i denna manual. Produkten får inte heller kombineras, monteras eller repareras med andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna manual eller annan dokumentation från Care of Sweden.
2. Får ej användas i närheten av eller i kontakt med brandkällor/varma ytor, såsom eld, brinnande cigaretter eller varma lampor. Produkten är brandtestad, men kan skadas vid kontakt med brandkällor.
3. Produkten skall placeras och användas så att den inte blir klämd eller skadad. Var särskilt uppmärksam där sänggrindar används. Undvik skador från vassa föremål som kan påverka hygienskyddets funktion.
4. Hygienskyddet är vätske- och lufttätt men är ångpermeabelt (ånga transporteras bort). Se till att brukaren positioneras så att andningsvägarna hålls fria.
5. Undvik att använda andra heltäckande plastade skydd i kombination med hygienöverdraget, ångpermeabiliteten kan påverkas.

1 Introduktion



Läs alltid bruksanvisningen före användning.

1.1 Allmän information

Denna produkt är en medicinteknisk produkt och CE-märkt enligt MDD 93/42 EEC. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter är tillverkaren skyldig att rapportera olyckor och tillbud. Vi är därför tacksamma om eventuella olyckor och tillbud som rör våra produkter rapporteras omgående till Care of Sweden. Den uppfyller tillämpliga delar i kraven för följande standarder: SS 876 00 01, SS 876 00 04, SS 876 00 02, SS-EN-ISO 14971, SS-EN ISO 10993-1, SS-EN ISO 12952-1, EN 14126.

1.2 Avsedd användning

Curera® Positionering är en serie kuddar och kilar som används för att avlasta och positionera brukare i alla typer av vårdmiljöer. Sortimentet är brett och täcker in de flesta behov av stöd och avlastning. Lägesändring behövs alltid, även när man använder sig av Curera® Positionering. Positionering handlar om att det ska vara bekvämt för brukaren, det är därför viktigt att alltid fråga vad brukaren tycker. För känslan och komfortens skull rekommenderar vi inte att hygienskyddet läggs direkt mot huden. Använd Curera® Positionering så att ingen översträckning sker eller att kontraktorer uppstår. Positionering kan ske utifrån diagnos och ska beaktas med hänsyn till eventuella kontraindikationer. De är enkla att använda och det finns flera olika användningsområden för kuddarna. Vi rekommenderar att lägesändringar sker regelbundet. Tidsintervallet måste bedömas av ansvarig personal utifrån diagnos, status och allmäntillstånd.

1.3 Produktbeskrivning

Curera® Positionering finns i flera olika storlekar och former.

- Positioneringsrullen finns i storlekarna 15x60, 20x125, 20x225 cm
- Positioneringskudden finns i storlekarna 25x80, 50x60, 50x85 cm
- Multikudden finns i storleken 60x70 cm
- Stödkilen finns i storleken 70x26x15/5 cm
- Nackkudden finns i storleken Ø50 cm
- Ryggkudden finns i storleken 50x85 cm

Fyllning - Positioneringsrulle, Multikudde, Ryggkudde, Positioneringskudde & Nackkudde:

50 % skum, 50 % polyesterfibrer

Fyllning - Stödkil: 100 % kallskum

Garanti: 1 år

1.4 Övrig information

Handlingsplan Trycksår

För bästa möjliga resultat vid användning av dessa produkter rekommenderar vi ett strukturerat och planerat arbetssätt. I vår guideline "Handlingsplan Trycksår" finns exempel som kan appliceras vid användning av våra produkter.

Madrassguiden

Denna guide ger dig som personal och ordinator en vägledning vid val av madrasser från Care of Sweden. Denna information kan hämtas på vår hemsida www.careofsweden.se eller beställas via kundtjänst, se kontaktuppgifter på sista sidan.

1.5 Uppackning

Kontrollera vid uppackning att inga delar är skadade. Om skador upptäcks, kontakta Care of Sweden innan produkten tas i bruk.

2 Rengöring

Det är viktigt att följa nedanstående anvisningar innan produkten används igen till en ny brukare. Konsultera hygienansvarig eller Care of Sweden för hjälp och instruktioner vid osäkerhet.

INNERKUDDE

Om hygienskydd används skyddar det innerkudden, så rengöring av denna sällan blir nödvändig. Om innerkudden trots allt blir smutsig så tvätta i maskin i max 95 °C. Kan torktumlas/torkskåp, undvik övertorkning. För snabbare torkning, kör centrifugering 3-4 gånger.

KOMFORTÖVERDRAG (tillbehör)



Överdraget kan maskintvättas i max 70 °C, torktumlas, alternativt droptorkas.

HYGIENSKYDD (tillbehör)



Överdraget kan torkas av med mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas.

Avförings- och blodfläckar avlägsnas snarast med kallt vatten. Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlens bruksanvisningar noggrant.



Överdraget kan maskintvättas i max 95 °C, torktumlas, alternativt droptorkas.



Rengöringsmedel innehållande klor och fenoler kan påverka PU-ytan negativt och bör undvikas. Om klor ändå används rekommenderar vi en blandning på max 1 %.

Viktigt!

Kontrollera hygienskyddet vid varje rengöring. Är skyddet skadat skall det lagas eller bytas ut.

3 Övrig information

3.1 Förvaring

Förvaring bör ske i torrt, rumstempererat utrymme. Förvara produkten så att den inte kan utsättas för stötar, slag eller liknande. Undvik att utsätta produkten för direkt solljus.

3.2 Märkning

Produkten är märkt med tillverkningsdatum, artikelnummer, storlek, skötsel- och tvättråd, EAN-nummer. Även ruta för egen märkning (till exempel avdelningsnummer och namn).

3.3 Garanti

Denna produkt omfattas av 1 års garanti. Garantin gäller ej normal förlitning eller försämring av produkten eller skador som uppstår på grund av ovarsam eller felaktig hantering/skötsel.

3.4 Service och underhåll

Produkten kräver ingen annan service eller underhåll än rengöring enligt denna bruksanvisning.

3.5 Livslängd

Beräknad livslängd för dessa produkter är 2 år.

3.6 Demontering och källsortering

Produkten är helt återvinningsbar och ska källsorteras som 'brännbart avfall'. Ingen demontering är nödvändig.

3.7 Retur och reklamationer

Reklamationer skall anmälas till Care of Sweden. Returnering av produkt skall ske enligt våra instruktioner och får göras först efter att reklamationen är anmäld till Care of Sweden.

Transportskada skall vara anmäld till transportbolaget.

3.8 Tillval och tillbehör

Beskrivning	Art. Nr.
Hygienöverdrag - Curera® Nackudde	14-001125
Hygienöverdrag - Curera® Positioneringsrulle 15x60 cm	14-001137
Hygienöverdrag - Curera® Positioneringsrulle 20x125 cm	14-001136
Hygienöverdrag - Curera® Positioneringsrulle 20x225 cm	14-001135
Hygienöverdrag - Curera® Multikudde 60x70 cm	14-001130
Hygienöverdrag - Curera® Positioneringskudde 25x80 cm	14-001110
Hygienöverdrag - Curera® Positioneringskudde 50x60 cm	14-001111
Hygienöverdrag - Curera® Positioneringskudde 50x85 cm	14-001112
Hygienöverdrag - Curera® Stödkiel	51-100002

Beskrivning

Komfortöverdrag, bomull - Curera® Nackkudde
Komfortöverdrag, bomull - Curera® Positioneringsrulle 15x60 cm
Komfortöverdrag, bomull - Curera® Positioneringsrulle 20x125 cm
Komfortöverdrag, bomull - Curera® Positioneringsrulle 20x225 cm
Komfortöverdrag, bomull - Curera® Multikudde
Komfortöverdrag, bomull - Curera® Stödkil

Art. Nr.

14-001125B
14-001137B
14-001136B
14-001135B
14-001130B
51-100002B

3.9 Symbolförklaring



Artikelnummer



Tillverkare

XXXX-XX-XX

År-Månad-Dag



Läs bruksanvisningen



CE-märkt enligt
MDD 93/42/EEC



Återvinning



Maskintvätt 70 °C



Maskintvätt 95 °C



<1%
Klor



Torktumling



Droptorkning



Strykning med mellan
temperatur (Max 150 °C)



Ej strykning



Ej kemtvätt



Avtorkning

4. Egna noteringar



Tillverkare/Manufactured by

care of sweden
Supporting Life

Kontakt:

Telefon: 0771-106 600

Fax: 0325-128 40

E-post: info@careofsweden.se

Internet: www.careofsweden.se

**Akuta ärenden, efter kontorstid
(vardagar 16.30-22.00 & helger 8.00-17.00):**

Telefon: 0325-101 11

Postadress:

Care of Sweden AB
Box 146
514 23 Tranemo

Besöksadress:

Fabriksgatan 5A
514 33 Tranemo

Godsadress:

Byns väg 4A
514 33 Tranemo