

**Protac Bolltäcke™** – ett rogivande och sinnesstimulerande hjälpmedel



## Bakgrund

Protac Bolltäcke™ stimulerar sinnen och hjälper till att öka kroppsmidvetenheten. Protac Bolltäcke™ har utvecklats med utgångspunkt från den amerikanska arbetsterapeuten och psykologen A. Jean Ayres teorier om sinnesstimulering (SI).

## Så fungerar Protac Bolltäcke™

Calm-seriens bolltäcken är sydda i kanaler där bollarna är placerade i långa rader. Användaren får således ett lungt och icke rörligt täcke som ger en tydlig sinnesstimulans genom bollarnas punktvisa tryck.

## Materialval

Protac Bolltäcke™ tillverkas i bomull eller trevira CS\* (flamskyddat).

## Varufakta art.nr 503974

### Protac Bolltäcke™ Calm L Bomull ca 7 kg

Täcket är delbart med hjälp av en dragkedja på mitten. Calm-modellen tar mindre plast än övriga modeller och är lätt att transportera i den medföljande transportväskan.

Innehåll: 38 mm EVA\*-bollar.

Storlek: 140x200 cm

Material: Bomull

Vikt: ca 7 kg

## Skötselanvisning SE KORTINFO SID 2

Täcket delas i två delar genom att blixtlåset öppnas. Var del tvättas separat i 60 grader i en tvättmaskin med kapacitet för minst 6 kg. Kan torkas i torktumlare i högst 30 grader. Får inte kemtvättas. Täcket ska alltid delas vid tvätt för att inte belasta dragkedjan. Vi rekommenderar att täcket tvättas med parfymfritt/doftfritt tvättmedel utan blekmedel.

### \*EVA

EVA är en eten-vinylacetat-sampolymer. Ingen av dessa monomerer, eten och vinylacetat är farliga. EVA är en genomskinlig, flexibel och böjlig (nästan gummi mjuk utan mjukgörande tillsatssämnen) plast även vid mycket låga temperaturer (ned till -70 °C) med god motståndskraft mot andra kemikalier och används b.l.a. till nappar, handtag, böjbara/mjuka slangar (t.ex. för bryggerier och i dammsugare), till skyddshandskar, samt i elektriska installationer. EVA-plast är en ofarlig plast, om inte farliga tillsatssämnen är tillsatta, så som t.ex. halogenerade flamskyddsmedel i elektroniska produkter.

### \*Trevira CS

Trevira CS är en speciell polyestertyp med en kemisk uppbyggnad som ger fibern en permanent flamsäkerhet. Flamsäkerheten försvinner inte efter upprepade tvätt, kemtvätt eller lång tidsanvändning. Med hänsyn till flamsäkerhet uppfyller Trevira CS alla gängse brandnormer som gäller inom Europa, både inom den privata och offentliga sektorn. Trevira CS-fibren har dessutom en hög ljuskthet, det vill säga en lägre grad av blekning.

## Användningsområden SE KORTINFO SID 2

Många använder Protac Bolltäcke™ både till att sova med på natten och/eller vila under dagen. En person med nedsatt kroppsuppfattning känner ofta en fysisk och/eller psykisk oro/rastlöshet.

Under Protac Bolltäcke™ finner man trygghet och ro bland annat genom att täcket hjälper till att öka personens kroppsuppfattning. Det hjälper många att förkorta sin insomningstid och få en tryggare och djupare sömn. Detta ger mer energi och möjlighet att klara sin vardag.

## Introduktion av Protac Bolltäcke™ SE KORTINFO SID 2

- Tänk på att introducera täcket när användaren har en "bra dag".
- Om användaren kan ta emot instruktioner, tala om hur länge han/hon ska ligga under täcket.
- Minst tio minuter behövs för att täckets effekt ska märkas. Det är bra att gradvis öka tiden med täcket.
- Vistas i en avskärmd miljö fritt från sinnesintryck.
- Bädda ner användaren med fasta lugna tryck från fötterna och upp.
- Om personen upplever ökad värme i samband med användande av bolltäcket, sänk temperaturen i sov miljön.

## Tillbehör:

Inkontinensskydd med nät - 503388

Inkontinensskydd - 500454

Vadderat överdrag bomull - 503644

Transportväska - 503764

## Använd påslakan – det skyddar täcket!

### SÄKERHET:

- ▲ Om Protac Bolltäcke™ används av en person som inte kan ta vara på sig själv ska personen hållas under uppsyn.
- ▲ Protac Bolltäcke™ ska inte användas av personer med svag lungkapacitet utan tillsyn.
- ▲ Var uppmärksam på överstimulering, vilket kan vara fallet om användaren antingen sover för mycket eller blir hyperaktiv.
- ▲ När Protac Bolltäcke™ används med ett inkontinensskydd är det viktigt att vara uppmärksam på de risker detta kan innebära. Samma riskföreskrifter gäller som vid användning av plastpåsar.
- ▲ Det är inte lämpligt att röka när man ligger under täcket. Tappad glöd eller cigaretter kan orsaka brännskador.
- ▲ Lämna inte en påslagen dator eller andra elektriska apparater i sängen där Protac Bolltäcke™ ligger då dessa avger värme och kan medföra att överdraget försvagas eller i värsta fall förorsaka antändning av den elektriska enheten då denna inte kan kylas.
- ▲ Bör inte användas nära öppen eld.
- ▲ Protac Bolltäcke™ med bollar av polystyren/polypropylen innehåller småpartiklar och bör inte användas till barn under tre år utan uppsikt.

Tillverkarens artikelkod: 100-321-V-7-85\_KK

## Exempel på användningsområden

Protac Bolltäcke™ används som ett vanligt täcke att sova med. Täcket ska ligga tätt mot kroppen så att bollarna känns tydligt.

Använd ett vanligt påslakan.




För att förstärka känslan av Protac Bolltäcke™ kan det vara skönt att bli omstoppad med långsamma djupa tryck.



Det går även bra att ligga ovanpå Protac Bolltäcke™, lägga det över benen eller svepa det om ryggen.



## Skötsel

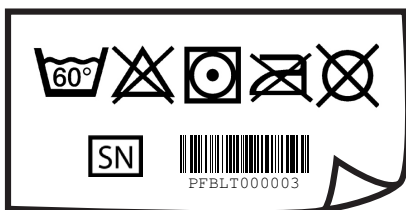

Vi rekommenderar att täcket tvättas med parfymfritt/doftfritt tvättmedel utan blekmedel. Torktumla vid max. 30°C eller lufttorka.

- 1 Dela täcket
- 2 Tvätta en del åt gången i tvättmaskinen
- 3 Sätt ihop delarna med dragkedjan efter tvätt.



## Packa täcket i väskan

- 1 Vik täcket i tre delar.
- 2 Rulla ihop täcket och lägg det i väskan.



I Protacs bruksanvisning som medföljer finns mer information om Protac Bolltäcke™.

## Symbolförklaring



Max tvätttemperatur



Får ej strykas



Användningsinformation



Tillverkare



Får ej blekas



Får ej kemtvättas



För inomhusbruk



Produktens serienummer



Torktumlare kan användas med låg temperatur (max 30°C)



Varning: se tillhörande dokument



CE-godkännande enligt direktiv om medicinsk utrustning 93/42/EEG