

ART.NR 503770
PROTAC BOLLTÄCKE™ FLEXIBLE
38 MM BOLLAR S BOMULL CA 3.5KG

Protac Bolltäckes™ – ett rogivande och sinnesstimulerande hjälpmedel



Bakgrund

Protac Bolltäckes™ stimulerar sinnen och hjälper till att öka kroppsmedvetenheten. Protac Bolltäckes™ har utvecklats med utgångspunkt från den amerikanska arbetsterapeuten och psykologen A. Jean Ayres teorier om sinnesstimulering (SI).

Så fungerar Protac Bolltäckes™

De löst liggande bollarnas vikt ger ett punktvis tryck på kroppen, och därmed stimuleras såväl beröringssinnet som muskler och leder. Stimulansen har en hämmande och organiserad inverkan på impulser till centrala nervsystemet. Detta ökar förnimmelsen av kroppen och dess gränser. Därför har Protac Bolltäckes™ en rogivande och trygghetsskapande effekt.

Materialval

Protac Bolltäckes™ tillverkas i bomull eller Trevira CS* (flamskyddat).

Protac Bolltäckes™ tillverkas med olika storlekar på bollar.

38 mm stora bollar i juniortäcke S (ett barn har ca 38 mm mellan sina sensoriska beröringspunkter).

Varufakta art.nr 503770

Protac Bolltäckes™ Flexible 38 mm bollar S Bomull ca 3.5 kg

Flexible serien är indelade i fickor med fyra eller fem bollpåsar som lätt kan tas ut och tvättas. Flexible modellerna gör det också möjligt att sätta ihop ett eget täcke utifrån användarens behov av sinnesstimulans.

Innehåll: Fem uttagbara kassetter fyllda med 38 mm EVA*-bollar.

Storlek: 100x140 cm

Material: Bomull

Vikt: ca 3.5 kg

Tillverkarens artikelkod: 100-201-J-85_KK

*EVA

EVA är en eten-vinylacetat-sampolymer. Ingen av dessa monomerer, eten och vinylacetat är farliga. EVA är en genomskinlig, flexibel och böjlig (nästan gumminjuk utan mjukgörande tillsatssämnen) plast även vid mycket låga temperaturer (ned till -70 °C) med god motståndskraft mot andra kemikalier och används bl.a. till nappar, handtag, böjbara/mjuka slangar (t.ex. för bryggerier och i dammsugare), till skyddshandskar, samt i elektriska installationer. EVA-plast är en ofarlig plast, om inte farliga tillsatssämnen är tillsatta, så som t.ex. halogenerade flamskyddsmedel i elektroniska produkter.

*Trevira CS

Trevira CS är en speciell polyestertyp med en kemisk uppbyggnad som ger fibern en permanent flamsäkerhet. Flamsäkerheten försvinner inte efter upprepad tvätt, kemtvätt eller lång tidsanvändning. Med hänsyn till flamsäkerhet uppfyller Trevira CS alla gängse brandnormer som gäller inom Europa, både inom den privata och offentliga sektorn. Trevira CS-fibern har dessutom en hög ljusåthet, det vill säga en lägre grad av blekning.

Skötselanvisning SE KORTINFO SID 2

Ta ut påsarna ur överdraget. Överdrag och påsar tvättas separat i 60 grader i en tvättmaskin med kapacitet för minst 6 kg. Kan torkas i torktumlare i högst 30 grader. Får inte kemtvättas. Vi rekommenderar att täcket tvättas med parfymfritt/doftfritt tvättmedel utan blekmedel.

Användningsområden SE KORTINFO SID 2

Många använder Protac Bolltäckes™ både till att sova med på natten och/eller vila under dagen. En person med nedsatt kroppsutfattning känner ofta en fysisk och/eller psykisk oro/rastlöshet.

Under Protac Bolltäckes™ finner man trygghet och ro bland annat genom att täcket hjälper till att öka personens kroppsutfattning. Det hjälper många att förkorta sin insomningstid och få en tryggare och djupare sömn. Detta ger mer energi och möjlighet att klara sin vardag.

Introduktion av Protac Bolltäckes™ SE KORTINFO SID 2

- Tänk på att introducera täcket när användaren har en "bra dag".
- Om användaren kan ta emot instruktioner, tala om hur länge han/hon ska ligga under täcket.
- Minst 10 minuter behövs för att täckets effekt ska märkas. Det är bra att gradvis öka tiden med täcket.
- Vistas i en avskärmd miljö fritt från sinnesintryck.
- Bädda ner användaren från fötterna och upp.
- Packa in personen med fasta lugna tryck från fötterna och upp.
- Om personen upplever ökad värme i samband med användande av bolltäckets, sänk temperaturen i sov miljön.

Tillbehör:

Inkontinensskydd med nät - 503387

Inkontinensskydd - 500461

Vadderat överdrag bomull - 503642

Transportväska - 503764

Reservdelar:

Överdrag med sektioner till Protac Bolltäckes™ Flexible S Bomull - 503940

Kassett med 38 mm bollar till Flexible S Bomull - 503943

Använd påslakan – det skyddar täcket!

SÄKERHET:

- ⚠ Om Protac Bolltäckes™ används av en person som inte kan ta vara på sig själv ska personen hållas under uppsyn.
- ⚠ Protac Bolltäckes™ ska inte användas av personer med svag lungkapacitet utan tillsyn.
- ⚠ Var uppmärksam på överstimulering, vilket kan vara fallet om användaren antingen sover för mycket eller blir hyperaktiv.
- ⚠ När Protac Bolltäckes™ används med ett inkontinensskydd är det viktigt att vara uppmärksam på de risker detta kan innebära. Samma riskföreskrifter gäller som vid användning av plastpåsar.
- ⚠ Det är inte lämpligt att röka när man ligger under täcket. Tappad glöd eller cigaretter kan orsaka brännskador.
- ⚠ Lämna inte en påslagen dator eller andra elektriska apparater i sängen där Protac Bolltäckes™ ligger då dessa avger värme och kan medföra att överdraget försvagas eller i värsta fall förorsaka antändning av den elektriska enheten då denna inte kan kylas.
- ⚠ Bör inte användas nära öppen eld.
- ⚠ Protac Bolltäckes™ med bollar av polystyren/polypropylen innehåller småpartiklar och bör inte användas till barn under tre år utan uppsikt.

Exempel på användningsområden

Protac Bolltäcke™ används som ett vanligt täcke att sova med. Täcket ska ligga tätt mot kroppen så att bollarna känns tydligt.
Använd ett vanligt påslakan.




För att förstärka känslan av Protac Bolltäcke™ kan det vara skönt att bli omstoppad med långsamma djupa tryck.




Det går även bra att ligga ovanpå Protac Bolltäcke™. Då ger bollarna sinnesstimulering på ryggen.



Skötsel

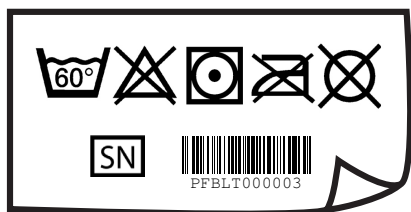


- 1 Öppna täckets dragkedja.
- 2 Tag ut kassetterna ur täcket genom att lossa kardborrefästena.
- 3 Tvätta en kassett åt gången.
- 4 Sätt fast kassetterna i kardborrefästena efter tvätt.

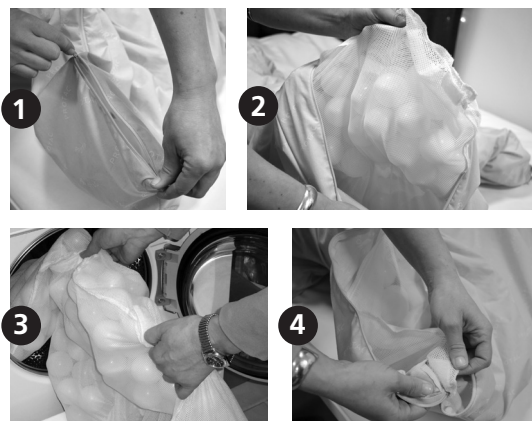

Packa täcket i väskan

- 1 Rulla ihop täcket från ena sidan.
- 2 Platta till täcket och lägg det i väskan.

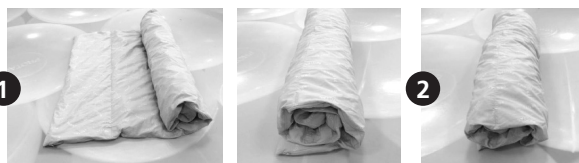

I Protacs bruksanvisning som medföljer finns mer information om Protac Bolltäcke™.

Symbolförklaring



Max tvätttemperatur



Får ej strykas



Användningsinformation



Tillverkare



Får ej blekas



Får ej kemtvättas



För inomhusbruk



Produktens serienummer



Torktumlare kan användas med låg temperatur (max 30°C)



Varning: se tillhörande dokument



CE-godkännande enligt direktiv om medicinsk utrustning 93/42/EEG