

ART.NR 503983
PROTAC BOLLTÄCKE FLEXIBLE
50 MM BOLLAR/POLYSTYREN L BOMULL
CA 6 KG

Protac Bolltäcke – ett rogivande och sinnesstimulerande hjälpmedel



Bakgrund

Bolltäckets stimulerar sinnen och hjälper till att öka kroppsmedvetenheten. Bolltäckets har utvecklats med utgångspunkt från den amerikanska arbetsterapeuten och psykologen A. Jean Ayres teorier om sinnesstimulering (SI).

Så fungerar bolltäckets

De löst liggande bollarnas vikt ger ett punktvis tryck på kroppen, och därmed stimuleras såväl beröringssinnet som muskler och leder. Stimulansen har en hämmande och organiserad inverkan på impulser till centrala nervsystemet. Detta ökar förmågan att hantera kroppen och dess gränser. Därför har bolltäckets en rogivande och trygghetsskapande effekt.

Materialval

Bolltäckets tillverkas i Bomull eller Trevira CS* (flamskyddat). Bolltäckets tillverkas med olika storlekar på bollar.
50 mm stora bollar i vuxentäcke "L" (en vuxen person har ca 50 mm mellan sina sensoriska beröringspunkter).
38 mm stora bollar i juniortäcke "S" (ett barn har ca 38 mm mellan sina sensoriska beröringspunkter).

Varufakta Art.nr 503983

Protac Bolltäcke Flexible 50 mm bollar/polystyren L Bomull ca 6 kg

Flexible serien är indelade i fickor med två eller fyra bollpåsar som lätt kan tas ut och tvättas i en tvättmaskin med maxkapacitet på 6 kg. Flexible modellerna gör det också möjligt att sätta ihop ett eget täcke utifrån användarens behov av sinnesstimulans.

Innehåll: Fyra st. uttagbara kassetter fyllda med 50 mm plastbollar/polystyren

Storlek: 140x200 cm

Material: Bomull

Vikt: ca 6 kg

Tillverkarens artikelkod: 100-207-V-85-KK

*Trevira CS

Trevira CS är en speciell polyestertyp med en kemisk uppbyggnad som ger fibern en permanent flamsäkerhet. Flamsäkerheten försvinner inte efter upprepad tvätt, kemtvätt eller lång tidsanvändning. Med hänsyn till flamsäkerhet uppfyller Trevira CS alla gängse brandnormer som gäller inom Europa, både inom den privata och offentliga sektorn. Trevira CS-fibren har dessutom en hög ljusåktighet, det vill säga en lägre grad av blekning.

Skötselanvisning SE KORTINFO SID 2

Ta ut påsarna ur överdragets. Överdrag och påsar tvättas separat i 60 grader i en tvättmaskin med kapacitet för minst 6 kg. Kan torkas i torktumlare i högst 30 grader. Får inte kemtvättas. Vi rekommenderar att täcket tvättas med parfymfritt/doftfritt tvättmedel utan blekmedel.

Användningsområden SE KORTINFO SID 2

Många använder bolltäckets både till att sova med på natten och/eller vila under dagen. En person med nedsatt kroppsuppfattning känner ofta en fysisk och/eller psykisk oro/rastlöshet.

Under bolltäckets finner man trygghet och ro bland annat genom att täcket hjälper till att öka personens kroppsuppfattning. Det hjälper många att förkorta sin insomningstid och få en tryggare och djupare sömn. Detta ger mer energi och möjlighet att klara sin vardag.

Introduktion SE KORTINFO SID 2

- Tänk på att introducera täcket när användaren har en "bra dag".
- Om användaren kan ta emot instruktioner, tala om hur länge han/hon skall ligga under täcket.
- Minst 10 minuter behövs för att täckets effekt skall märkas. Det är bra att gradvis öka tiden med täcket.
- Vistas i en avskärmd miljö fritt från sinnesintryck.
- Bädda ner användaren från fötterna och upp.
- Packa in personen med fasta lugna tryck från fötterna och upp.
- Om personen upplever att täcket är varmt, sänk temperaturen i sov miljön.

Tillbehör:

Inkontinensskydd med nät - 503388
Inkontinensskydd - 500454
Vadderat överdrag bomull - 503644
Transportväska - 503765

Reservdelar:

Överdrag med sektioner till Protac Bolltäcke Flexible L Bomull - 503932
Kassett med 50 mm bollar/polystyren till Flexible L Bomull - 503935

Använd påslakan – det skyddar täcket!

SÄKERHET:

- ⚠ Om bolltäckets används av en person som inte kan ta vara på sig själva ska personen hållas under uppsyn.
- ⚠ Bolltäckets ska inte användas av personer med svag lungkapacitet utan tillsyn.
- ⚠ Var uppmärksam på överstimulering, vilket kan vara fallet om användaren antingen sover för mycket eller blir hyperaktiv.
- ⚠ När bolltäckets används med ett inkontinensskydd är det viktigt att vara uppmärksam på de risker detta kan innebära. Samma riskföreskrifter gäller som vid användning av plastpåsar.
- ⚠ Det är inte lämpligt att röka när man ligger under täcket. Tappad glöd eller cigaretter kan orsaka brännskador.
- ⚠ Lämna inte en påslagen dator eller andra elektriska apparater i sängen där bolltäckets ligger då dessa avger värme och kan medföra att överdragets försvagas eller i värsta fall förorsaka antändning av den elektriska enheten då denna inte kan kylas.
- ⚠ Bör inte användas nära öppen eld.

Exempel på användningsområden

Protac bolltäcke används som ett vanligt täcke att sova med. Täcket ska ligga tätt mot kroppen så att bollarna känns tydligt.

Använd ett vanligt påslakan.




För att förstärka känslan av bolltäckets kan det vara skönt att bli omstoppad med långsamma djupa tryck.



Det går även bra att ligga ovanpå Protac bolltäcke. Då ger bollarna sinnesstimulering på ryggen.




Skötsel

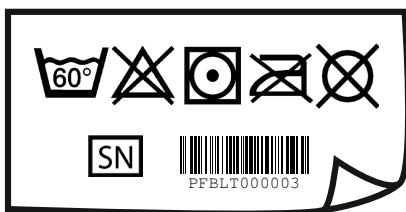

Vi rekommenderar att täcket tvättas med parfymfritt/doftfritt tvättmedel utan blekmedel. Torktumla vid max. 30°C eller lufttorka.

- 1 Öppna täcket
- 2 Tag ut kassetten ur täcket
- 3 Tvätta 1 kassetten åt gången i tvättmaskinen
- 4 Sätt fast kassetten efter tvätt.

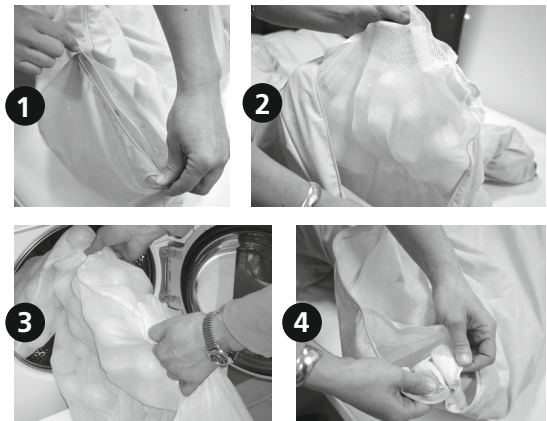












Packa täcket i väskan

- 1 Vik täcket i 4 lager.
- 2 Rulla ihop täcket och lägg det i väskan.



Symbolförklaring

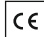 Max tvätttemperatur	 Får ej strykas	 Användningsinformation	 Tillverkare
 Får ej blekas	 Får ej kemtvättas	 För inomhusbruk	 Produktens serienummer
 Torktumlare kan användas med låg temperatur (max 30°C)	 Varning: se tillhörande dokument	 CE-godkännande enligt direktiv om medicinsk utrustning 93/42/EEG	