

2015-09-28



Detalj	Kontroll / Åtgärd
Rörliga delar	Vårdaren ska vid behov kontrollera och olja in de svängbara delarna – använd en smörjande olja tex VEIDEC Dry Lube.
Hjul	Vid behov ska du med en torr trasa torka bort smuts från hjulen. Använd inga rengöringsmedel som innehåller klorin. Vårdaren ska kontrollera och fylla däcken med luft minst en gång i månaden. Lufttryck max: Framdäck: 35 PSI/250 kPa, Bakdäck: 40 PSI/2,5 bar
Chassi	Stingray bör ses över regelbundet och kontrolleras så att inte sprickor uppstått eller att skruvförband gått upp. Färgkod: -01
Klädsel	Stingrays sittdyna är avtagbar och kan tvättas i max 40 °C. Avsätt lite tid för sittdynan att torka, då den ska dropptorka. Vi rekommenderar att du rengör sittdynan regelbundet med en fuktig trasa. Det är viktigt för vagnens hållbarhet att hålla chassit rent.
Lås	Kontrollera regelbundet att låsen klickar på plats och att hålen inte fylls med olja eller smuts.
Tillbehör	Alla ändringar eller monteringar av tillbehör som inte finns beskrivna i denna bruksanvisning måste utföras av en behörig reparatör. Västar och bälten måste monteras enligt de anvisningar som tillhör produkterna.

Detta är en allmän beskrivning av de punkter som bör gås igenom när ett hjälpmedel rekonditioneras. Därutöver förväntar sig R82 att den personal som arbetar med rekonditionering självständigt bedömer varje objekts tillstånd, så att eventuella skador eller funktionsstörningar som inte upptas i schemat åtgärdas innan objektet lämnas ut till ny användning. För mer utförlig information om underhåll och rekonditionering se manualen.

Etac rekommenderar att endast originaldelar från R82 används.