

# Rekonditionering – Rengöring

2017-03-20

Kontrollera regelbundet produkten, helst inför varje användningstillfälle.  
Reparera aldrig själv en produkt. En defekt produkt får inte användas.

## Glidbräda

Torkas av med tvålatten eller desinfektionsmedel



## Glidmatta och Glidmadrass

Kontrollera att sömmar och tyg inte har skadats.

Torkas av med sprit eller tvättas i max. 80°C.

Använd inte sköljmedel och klorin – det förstör glidförmågan.



## Förflyttningsbår

Kontrollera att sömmar och tyg inte har skadats.

Torkas av med sprit eller tvättas i max. 80°C.

Ta bort plattan innan rengöring.

Använd inte sköljmedel och klorin – det förstör glidförmågan.




## Vårdbälte och repstege

Kontrollera att sömmar och tyg inte har skadats.

Tvätta i max 80°C eller autoklaveras vid 80°C.

Kan också desinficeras med LT-CIN (Isopropylalkohol 72%).

Använd inte sköljmedel och klorin.

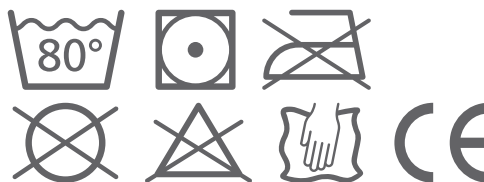


## Glidlakan och Vändlakan

Kontrollera att sömmar och tyg inte har skadats.

Tvätta i max 80°C Torktumla i max 70°C.

Strykning förbättrar glidförmågan. Använd inte sköljmedel och klorin.

Undvik torktumling för optimal livslängd av lakanets material.

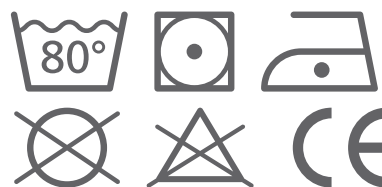

## Vridplatta sits

Kontrollera att sömmar och tyg inte har skadats.

Kan torkas av med tvålatten eller desinfektionsmedel.

Använd inte sköljmedel.



## Vridplatta golv

Torkas av med tvålatten eller desinfektionsmedel.

