

R82 Manatee



Rekonditioneringsanvisning

2017-11-28



Detalj	Kontroll	Åtgärd
Dynor	Att dynor inte har skador och är i dugligt skick.	Byt vid behov ut dynor.
Rörliga delar	Kontrollera att rörliga och låsfunktioner fungerar enligt bruksanvisning.	Rengör rörliga delar.
Rengöring		Rengör produkten med vanligt förekommande rengöringsmedel utan slipmedel. Klädseln är avtagbar och kan tvättas i 60 gr (R82 rekommenderar att klädseln tvättas i 40 gr). Produkten kan desinficeras med en 70 % isopropanollösning. Vi rekommenderar att man använder en trasa som doppats i varmt vatten med mildt rengöringsmedel/tvål utan blekmedel för att torka bort skräp och smuts. Låt torka före desinficering.
Plastdetaljer	Kontrollera att plastdetaljer inte har sprickor.	Byt vid behov ut defekta delar.
Vid tvätt och tork i diskabinett		Denna produkt kan tvättas i 15-20 minuter vid 60 ° i tvättmaskin som är avsedda för att tvätta medicintekniska produkter, med ett mildt rengöringsmedel eller desinfektionsmedel utan klor. Det är viktigt att låta din utrustning torka ordentligt innan du använder. Ta bort följande delar före tvätt och rengör dem separat: Överdrag, Stoppning & Tillbehör

Detta är en allmän beskrivning av de punkter som bör gås igenom när ett hjälpmedel rekonditioneras. Därutöver förväntar sig R82 att den personal som arbetar med rekonditionering självständigt bedömer varje objekts tillstånd, så att eventuella skador eller funktionsstörningar som inte upptas i schemat åtgärdas innan objektet lämnas ut till ny användning.

R82 kan inte ställas till ansvar för felaktiga underhålls- eller reparationsåtgärder från rekonditioneringspersonalens sida.

Etac rekommenderar att endast originalreservdelar från R82 används.