



StarLock

Högpresterande och
positionerande luftcellsdyna

StarLock

StarLock sittdyna kombinerar utmärkt tryckfördelning med näst intill obegränsade positioneringsmöjligheter och mycket hög stabilitet.

Cellåsteknik

Kombinationen av tryckfördelning, positionering och stabilitet har alltid inneburit en svår kompromiss vid tillverkningen av sittdynor med luftceller. Starlock löser samtliga behov på elegant sätt.

Den patenterade cellåstekniken gör att luftflödet mellan luftcellerna kan låsas. På så vis skräddarsys luftcellerna för att passa brukarens behov av positionering och stabilitet samtidigt som de tryckfördelande egenskaperna bibehålls. StarLock erbjuder bästa terapeutiska prevention och behandling av trycksår i alla kategorier, samt unika positioneringsegenskaper och bästa stabilitet.

StarLock finns i olika cellhöjder: 5 - 7.5 - 10 - 13 cm . För brukare med uttalad atrofi i den gluteala regionen rekommenderar vi en cellhöjd på 13 cm. StarLock sittdyna kan även enkelt användas som enkammardyna.



StarLock sittdynor levereras kompletta med ett mjukt och töjbart överdrag, handpump, manual och reparationsatts.

Brukarvikt

Ingen maxvikt men dynans storlek måste anpassas till brukarens storlek.

Dynmaterial

Latexfri guldfärgad neopren av hög kvalitet. Följsam och brandsäker.

Överdrag

Ovandel och sidor: 83 % ripstop-nylon (icke-absorberande material som underlättar avdunstning) 17 % lycra.
Bottendel: vävt polyestertyg klätt med polyvinyl (antimikrobiell behandling som hämmar lukt som orsakas av bakterier och mögel). Brandsäker.

Hygienöverdrag

Ovandel och sidor: 78 % nylon 22 % spandex klätt med en polyuretanfilm.
Bottendel: Vävt polyestertyg klätt med polyvinyl (se standard-överdrag).

Rengöring


Dyna och överdrag: Handtvätt alternativt maskin max. 60°C.
För mer information, se rekond.information.



StarLock	5 cm	7.5 cm	10 cm
26 x 26 cm	ESSL20909-1	ESSL30909-1	ESSL40909-1
26 x 30 cm	ESSL20911-1	ESSL30911-1	ESSL40911-1
26 x 34 cm	ESSL20913-1	ESSL30913-1	ESSL40913-1
30 x 26 cm	ESSL21109-1	ESSL31109-1	ESSL41109-1
30 x 30 cm	ESSL21111-1	ESSL31111-1	ESSL41111-1
30 x 34 cm	ESSL21113-1	ESSL31113-1	ESSL41113-1
30 x 39 cm	ESSL21115-1	ESSL31115-1	ESSL41115-1
34 x 26 cm	ESSL21309-1	ESSL31309-1	ESSL41309-1
34 x 30 cm	ESSL21311-1	ESSL31311-1	ESSL41311-1
34 x 34 cm	ESSL21313-1	ESSL31313-1	ESSL41313-1
34 x 39 cm	ESSL21315-1	ESSL31315-1	ESSL41315-1
34 x 44 cm	ESSL21317-1	ESSL31317-1	ESSL41317-1
39 x 30 cm	ESSL21511-1	ESSL31511-1	ESSL41511-1
39 x 34 cm	ESSL21513-1	ESSL31513-1	ESSL41513-1
39 x 39 cm	ESSL21515-1	ESSL31515-1	ESSL41515-1
39 x 44 cm	ESSL21517-1	ESSL31517-1	ESSL41517-1
39 x 49 cm	ESSL21519-1	ESSL31519-1	ESSL41519-1
39 x 53 cm	ESSL21521-1	ESSL31521-1	ESSL41521-1
44 x 34 cm	ESSL21713-1	ESSL31713-1	ESSL41713-1
44 x 39 cm	ESSL21715-1	ESSL31715-1	ESSL41715-1
44 x 44 cm	ESSL21717-1	ESSL31717-1	ESSL41717-1
44 x 49 cm	ESSL21719-1	ESSL31719-1	ESSL41719-1
44 x 53 cm	ESSL21721-1	ESSL31721-1	ESSL41721-1
49 x 39 cm	ESSL21915-1	ESSL31915-1	ESSL41915-1
49 x 44 cm	ESSL21917-1	ESSL31917-1	ESSL41917-1
49 x 49 cm	ESSL21919-1	ESSL31919-1	ESSL41919-1
49 x 53 cm	ESSL21921-1	ESSL31921-1	ESSL41921-1
53 x 39 cm	ESSL22115-1	ESSL32115-1	ESSL42115-1
53 x 44 cm	ESSL22117-1	ESSL32117-1	ESSL42117-1
53 x 49 cm	ESSL22119-1	ESSL32119-1	ESSL42119-1
53 x 53 cm	ESSL22121-1	ESSL32121-1	ESSL42121-1


StarLock	13 cm
26 x 26 cm	ESSL51010-1
26 x 30 cm	ESSL51012-1
26 x 36 cm	ESSL51014-1
30 x 26 cm	ESSL51210-1
30 x 30 cm	ESSL51212-1
30 x 36 cm	ESSL51214-1
30 x 41 cm	ESSL51216-1
36 x 26 cm	ESSL51410-1
36 x 30 cm	ESSL51412-1
36 x 36 cm	ESSL51414-1
36 x 41 cm	ESSL51416-1
36 x 46 cm	ESSL51418-1
41 x 30 cm	ESSL51612-1
41 x 36 cm	ESSL51614-1
41 x 41 cm	ESSL51616-1
41 x 46 cm	ESSL51618-1
41 x 51 cm	ESSL51620-1
41 x 56 cm	ESSL51622-1
46 x 36 cm	ESSL51814-1
46 x 41 cm	ESSL51816-1
46 x 46 cm	ESSL51818-1
46 x 51 cm	ESSL51820-1
46 x 56 cm	ESSL51822-1
51 x 41 cm	ESSL52016-1
51 x 46 cm	ESSL52018-1
51 x 51 cm	ESSL52020-1
51 x 56 cm	ESSL52022-1
56 x 41 cm	ESSL52216-1
56 x 46 cm	ESSL52218-1
56 x 51 cm	ESSL52220-1
56 x 56 cm	ESSL52222-1

Egenskaper

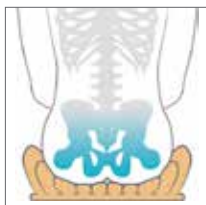


Perfekt omslutning

Låt brukaren sjunka ner i sittdynan. StarLock med höga celler ger optimal omslutning av sätet.

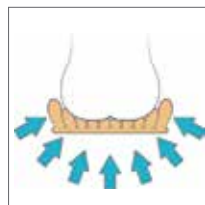

Omfördelning av trycket

Utmärkta tryckfördelande egenskaper, upp till och med sårkategori 4. För brukare med uttalad atrofi i den gluteala regionen rekommenderar vi StarLock med 13 cm cellhöjd.

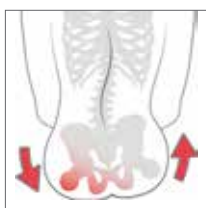

Inställning för asymmetri

StarLocks cellteknik skapar de bästa förutsättningarna för att korrigera och stabilisera bäckenet.

Tillbehör




Hygienöverdrag

Smidigt och elastiskt i fyra riktningar. Luftgenomsläppligt.

Så här justeras lufttrycket




- Pumpa upp sittdynan.
- Placera brukaren på sittdynan.
- Släpp ut luft.

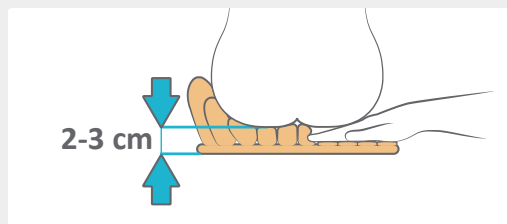

- Kontrollera med handen att det finns ett avstånd på 2–3 cm mellan dynans botten och brukarens säte.
- Vid skevt bäcken, kontrollera den lägsta sidan först.
- Vid behov kan dynan enkelt fyllas med mer luft medan brukaren sitter på dynan.
- Högre luftceller ger djupare nedsjunkning och omlutning av sätet vilket ger än bättre tryckfördelande egenskaper.

Så här justerar du StarLock cellås

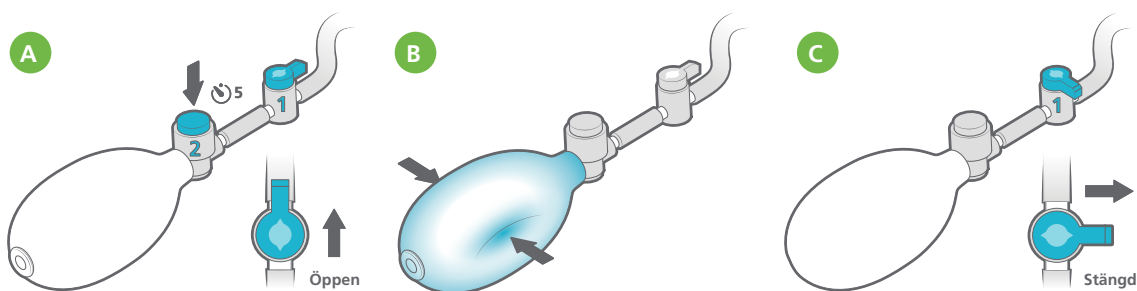

- A.** Kontrollera att vredet (1) är parallellt med slangen (öppen).
- A.** Tryck på knappen (2) i 2–5 sekunder.
- Placera brukaren i önskat läge och håll positionen i ca 10 sekunder.
- B.** Pumpa bollpumpen ca 20 gånger (tills det tar emot att pumpa ytterligare).
- C.** Vrid vredet (1) för att låsa inställningen.

“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se