

Rutiner för leveranskontroll och inspektion

Etac Manuella förflyttningshjälpmedel

Första inspektion

- Är förpackningen oskadad?
- Läs etiketten på förpackningen och kontrollera artikelnummer och produktbenämning.
- Kontrollera att kortinformation finns med – en aktuell användarmanual kan hämtas från www.etac.se eller erhållas via den lokala återförsäljaren.
- Kontrollera etiketten på produkten – finns artikelnummer, produktbenämning, lot-/batchnummer, rengöringsinstruktioner och uppgift om leverantör med?

Återkommande inspektion

- Se till att de manuella förflyttningsprodukterna alltid är av god kvalitet.
- Efter tvättning – kontrollera alltid material, sömmar, handtag och spännen, se instruktion nedan.
- Om produkten visar tecken på slitage får den inte längre användas.

Förklaring på Lotnr/Batchnr

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Produktions år		Löppnummer								



Visuell inspektion/kontroll av produkten

Kontrollera att material, sömmar, handtag och spännen är hela och felfria.



Mekanisk belastning och test av handtag

Dra hårt i handtagen åt varsitt håll och kontrollera material och sömmar.
Testa spännen: Lås spännet och dra åt varsitt håll, kontrollera material och sömmar.



Stabilitetstest

Försök att böja produkten för att kontrollera att den känns fast, stabil och robust.




Testa låg/hög friktion

Placera produkten på ett fast underlag eller en säng, sätt händerna mot materialet och testa friktionen genom att trycka händerna ned mot produkten.
Låg friktion – glider lätt
Hög friktion – glider/rör sig inte

Kontrollera alltid

Manuella förflyttningshjälpmedel med handtag, remmar och spännen:

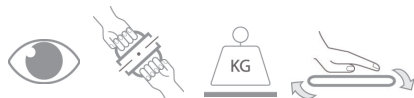

Manuella förflyttningshjälpmedel för sittande och liggande förflyttning:



Manuella förflyttningshjälpmedel med hög eller låg friktion:



Produkten sorteras enligt nationella regler och föreskrifter



Läs Manualen.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Etacs kundtjänst eller din lokala återförsäljare för att få mer information och hjälp. Om du vill ha mer information om utbildning och användning av produkterna, kontakta förflyttningsexperterna på Etac – www.etac.se.



Klass 1 – EU-direktiv
MDD 93/42/EEC för
medicintekniska produkter