

# Panda Futura & x:panda

## Rekonditioneringsanvisning



2015-04-28



Detalj	Kontroll	Åtgärd
Rörliga delar	Kontrollera att rörliga delar kan dras åt och är åtdragna ordentligt enligt anvisning.	Rengör rörliga delar, byt ev. ut defekta skruvar eller andra defekta delar.
Överdrag till dynor	Inspektion av tyg och kontroll av sömmar.	Tvätta överdrag i 40° maskintvätt, Byt vid behov överdrag.
Rengöring		Rengör produkten med vanligt förekommande rengöringsmedel utan slipmedel. Produkten klarar att spritavtorkas att rengöras i 60° vatten. Använd ej klorrengöringsmedel eller andra aggressiva rengöringsmedel!
Plastdetaljer	Kontrollera att plastdetaljer inte har sprickor.	Byt vid behov ut defekta delar.

Detta är en allmän beskrivning av de punkter som bör gås igenom när ett hjälpmedel rekonditioneras. Därutöver förväntar sig R82 att den personal som arbetar med rekonditionering självständigt bedömer varje objekts tillstånd, så att eventuella skador eller funktionsstörningar som inte upptas i schemat åtgärdas innan objektet lämnas ut till ny användning.

Produkten bör kontrolleras regelbundet. Vi rekommenderar ett intervall på var 6:e månad.

Etac rekommenderar att endast originalreservdelar från R82 används.