


# Easy / Smart / Edge / Swift / Swift kommod

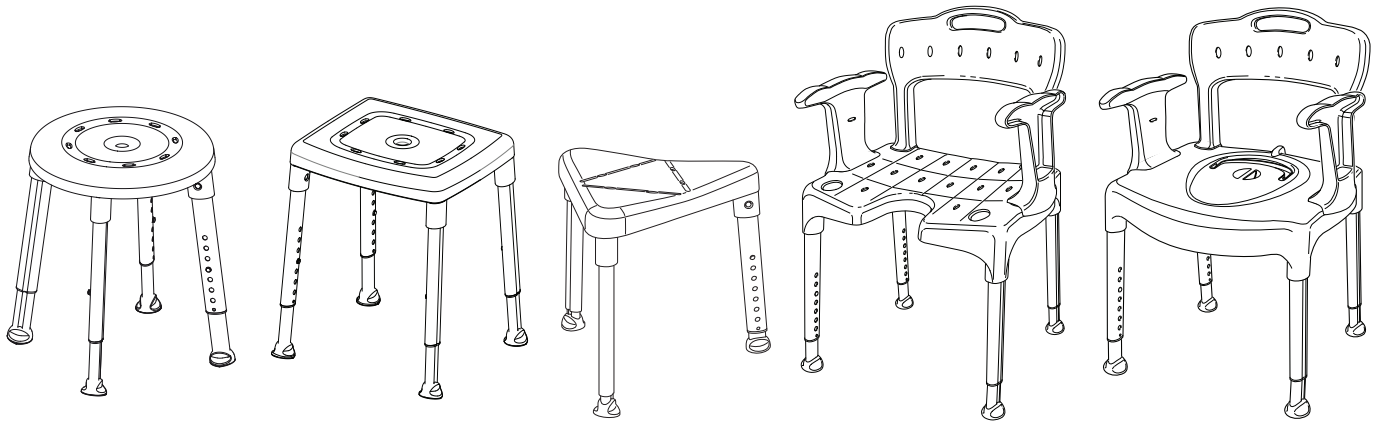

Reservdelar kan beställas enligt separat reservdelslista. Tänk på att produktens livslängd är begränsad (se manual). Detta är extra viktigt vid förskrivning till brukare som kan förväntas använda produkten under en längre tid.

Tvätt och rengöringsinstruktioner återfinns på produkten alternativt i manualen.

## Rengöringsinstruktioner:

Produkterna skall rengöras med konventionella rengöringsmedel utan slipmedel. De skall rengöras regelbundet. Produkterna kan rengöras maskinellt i 85° i maximalt 3 minuter.

## Underhåll/kontroll:

Produkterna bör ses över regelbundet, minst 1 gång per år. Man bör kontrollera att alla delar finns på plats och är intakta.

Vid rekonditionering bör följande kontrolleras:

### 1. Att doppskor är i dugligt skick.

Doppskorna skall vara mjuka, hela och funktionsdugliga för att produkten ska stå stadigt och säkert mot underlaget. Dessa detaljer är säkerhetsdetaljer så kontrollen bör vara noggrann och vid tveksamheter skall detaljer bytas.

### 2. Att sitsens infästningar för benen inte blivit skeva eller utsatts för åverkan.

Kontrollera att benen står symmetriskt mot golvet och inte blivit skeva.

### 3. Att förhöjningsknoppar på benen finns på plats och fungerar tillfredsställande.

Gör funktionstest på höjdställningen för benen.

### 4. Att plastdetaljer inte har sprickbildningar.

Kontrollera att alla plastdetaljer är intakta.