



# Etac Cloo

Stabil och modern toalettsitsförhöjare som enkelt kan regleras i höjd och vinkel.

 **etac**<sup>®</sup>

# Etac Cloo – funktion och flexibilitet i en produkt

När vi utvecklade Cloo, ville vi skapa en höjdregerbar toaletsitsförhöjare som är lika enkel för den som installerar liksom för den som ska använda den dagligen. Därför gjorde vi Cloo slät och ren med enkla förhöjningsklossar för de olika höjderna. Sitsen tas lätt bort för till exempelvis rengöring och armstöden är både uppfällbara och avtagbara. Cloo har många genomtänkta funktioner och några av dem kan du läsa mer om på nästa sida.

*Cloo finns tillgänglig med eller utan armstöd.*



## Namn

Cloo  
Cloo med armstöd

## Art. nr

80301204  
80301214

## Vikt

Utan armstöd: 3.3 kg  
Med armstöd: 4.8 kg

## Mått

Sitsbredd: 40 cm  
Armstödens höjd över sitsen: 21 cm  
Total bredd: 60 cm  
Bredd mellan armstöd: 49 cm

## Material

Polypropylen  
Fäste: Aluminium  
Förhöjningsklossar: Polyamid

## Färg

Vit  
Armstöd: Grå



Lösningsmedelsfritt rengöringsmedel med ett pH på 6–9 eller med 70% tvättsprit. Dekontamination vid högst 85°C.

## Detaljer



**Enkel att montera**  
Cloo består av fäste, sits och armstöd, enkla att montera med snabbkopplingar och allt görs utan verktyg.



**Enkel att reglera i sitshöjd och vinkel**  
Cloo kan monteras i sitshöjd 6, 10 eller 14 cm. För att uppnå högsta läge behövs extra förhöjningsklossar vilka finns som tillbehör. Sitsen kan också vinklas framåt, vilket exempelvis underlättar för användare med höftproblem.



**Enkel att rengöra**  
De släta ytorna och möjligheten att fälla upp sitsen gör Cloo hygienisk och enkel att rengöra.



**Stabila armstöd**  
Armstöden kan fällas upp oberoende av varandra eller låsas vid sitsen. Det går också bra att montera endast ett armstöd.

## Tillbehör Cloo



**Armstöd, par**  
Material: Polypropylen  
Art. nr 80301222



**Extra förhöjningsklossar**  
Extra förhöjningsklossar till 14 cm höjd.  
Material: Polyamid  
Art. nr 80301221





Etac Sverige AB  
Kista Science Tower  
SE-164 51 Kista, Sweden  
Tel +46 371 – 58 73 00  
Fax +46 371 – 58 73 90  
info@etac.se www.etac.se

**etac**<sup>®</sup>

Skapar möjligheter