



BRUKSANVISNING TIMSTOCK 119621-00



”För Sverige uppfyller vi våra plikter enligt den nya lagen om producentansvar för el-avfall genom att vara ansluten till *elretur*”

Allmänt

Batteridrivet tidhjälpmedel för användning inomhus i torra utrymmen. I leveransen ingår klisterlappar i färger motsvarande startknapparna. Klisterlapparna kan användas för att färgmarkera aktivitetsbilder eller scheman. Exempelvis om en aktivitet ska pågå en halvtimme, markeras den med grön klisterlapp.

Funktion

Nedräkning av tid från 60, 45, 30 eller 15 minuter. Nedräkningen visas med lysdiodpelaren.

Vid start tänds
12 lysdioder för 60 minuter
9 lysdioder för 45 minuter
6 lysdioder för 30 minuter
3 lysdioder för 15 minuter

Därefter slocknar en diod var femte minut tills alla har slocknat. Vid räkneperiodens slut blinkar samtliga lysdioder och en kort ljudsignal hörs fem gånger. Pågående signalering kan avbrytas genom att trycka på någon av knapparna.

Så här gör man

Tryck på den knapp som motsvarar den önskade tiden. Lysdioderna tänds upp motsvarande den tid som startknappen representerar och nedräkningen startar. Den startade tiden kan raderas genom att röd och blå startknapp trycks in och hålls intryckta samtidigt under 2 sekunder. Därefter kan ny tid startas.

På timstockens kortsida finns ett reglage för att ändra ljudsignalen. Då reglaget är i min-läge är ljudet helt avstängt och signalering sker endast genom blink med lysdioderna.

Batteri


I leveransen ingår två stycken 1,5V batterier typ R6. Dessa räcker för ca 60 timmars användning. När lysdiodernas ljusstyrka börjar avta ska båda batterierna bytas. Batteriluckan är låst med en skruv (krysspår). Om så önskas kan laddningsbara batterier av typ NiMH storlek R6 användas. Dessa laddas med en särskild laddare. (Denna typ av batterier och laddare levereras ej av Westerstrand)

Rengöring/Rekonditionering/Testing av signalvolym

Torka av timstocken med lätt fuktigt luddfri trasa med vanligt rengöringsmedel eller rengöringsduk avsedd för elektronik. Byt batterier vid behov. Vid behov kan en ny frontdekal klistras på timstocken. För att testa ljudsignalens volymnivå, tryck på två mittenknappar samtidigt. Testfunktionen stängs av med en knapptryckning.

Option:

119607-00 Nyckelband
119608-00 Skyddsväska

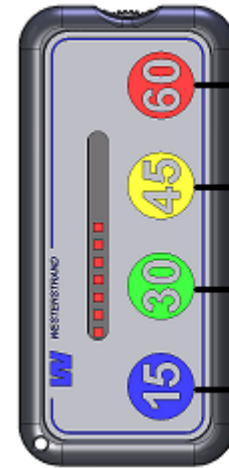

Start av 60 minuter



Start av 45 minuter

Start av 30 minuter

Start av 15 minuter



Ändring av ljudsignal

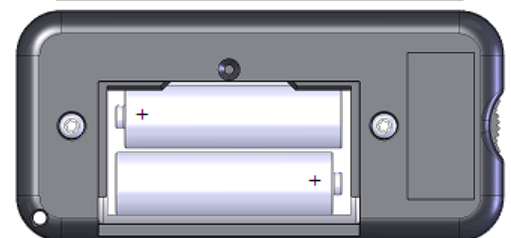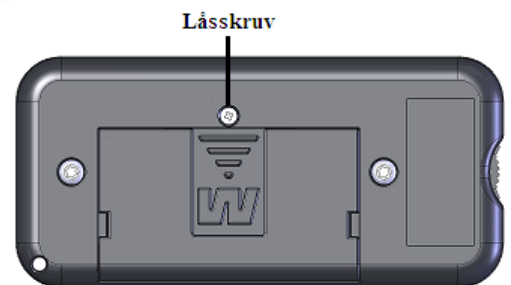

Yttermått: 111x52x27 mm. Vikt 115 g.