

## Rekonditioneringsschema för Euroflex arbetsstolar

Stolstyp.....Serie nr.....

Brukare.....

För att erhålla full funktion och säkerhet bör produkten kontrolleras 1 gång per år, enligt rekonditioneringsschemat för Euroflex arbetsstolar. Följ anvisningarna på sidorna 2-3 och kontrollera följande punkter på stolen.

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| Elektrisk ställdon / Gaskolv (funktion, smörjning)           | <input type="checkbox"/> |
| Chassi (kontrollera infästning, rengöring)                   | <input type="checkbox"/> |
| Hjul / Broms (rullmotstånd, rengöring)                       | <input type="checkbox"/> |
| Batteri / Kablage (kontrollera skick och kontakter)          | <input type="checkbox"/> |
| Laddare (kontrollera funktion)                               | <input type="checkbox"/> |
| Klädsel (rengöring tvätt 60°)                                | <input type="checkbox"/> |
| Armstöd (funktion, rengöring)                                | <input type="checkbox"/> |
| Rattar & vred (låsning, smörjning)                           | <input type="checkbox"/> |
| Sittkryss (undersök avseende brott, infästning, funktion)    | <input type="checkbox"/> |
| Tilt (funktion, infästning, smörjning)                       | <input type="checkbox"/> |
| Rygg- / Nackstöd (funktion, rengöring)                       | <input type="checkbox"/> |
| Benstöd / Coxit (funktion, rengöring, smörjning)             | <input type="checkbox"/> |
| Kontroll av eventuell extra utrustning (funktion, rengöring) | <input type="checkbox"/> |

*OBS! Vid byte av delar ska även tillhörande skruvförband bytas och dras till angivet moment. Se sida 3 för åtdragningsmoment.*

Kontrollerad den ...../...../.....

Kontrollerad av.....

Underskrift.....

# Rekonditioneringsanvisningar för arbetsstolar

Desinficering: Använd endast desinfektionsmedel godkända av Läkemedelsverket

## Elektrisk lyftställdon och gaskolv

*Elställdon:* Lyssna efter missljud. Höj upp sitsen till dess högsta läge, torka rent lyftpelaren med trasa och smörj därefter in lyftkolvens glidytor med silikonspray eller tunnflytande olja.

Kontrollera att skruvarna (M8 x 4 st) som sitter längst upp och håller fast ställdonet är åtdragna 24 Nm. Vid byte av ställdon, använd nya skruvar. *Gaskolv:* Kontrollera att gaskolven sitter fast uppe i sittkrysset (M8 x 2st bultar med nylon lock) och nere i chassit (3st skruvar, se nedan). Smörj glidyterna med silikon eller tunn olja.

## Chassi

Kontrollera att M10 bultar som håller fast chassi halvorna är åtdragna med 47 Nm. Vid byte av bult använd permanent gänglåsning Loctite 2700 och låsbricka. Kontrollera även att lyftställdonet är åtdragen vid infästningarna till chassit med 1st (M8) och 2 st (M6). Kontrollera att bromsspaken, fotpedalen och fotringen är åtdragen. Testa att bromsarna låser ordentligt. Torka av metallytorna.

## Hjul och broms

Kontrollera rullmotståndet och att hjulen inte är defekta. Avlägsna eventuella hårrester och annat som fastnat i hjulaxeln. Vid behov byt ut defekta hjul och dra åt skruven (4st x M6), använd Loctite 290 gänglåsning. Hjulen kan torkas av en fuktig trasa, doppad i mild tvättmedel. Vid byte av hjul, använd nya skruvar och testa bromsarna efteråt.

## Batteri, kontrollbox och laddare

Kontrollera att batteriet sitter fast och inte är skadat. Kontrollera att alla kontakter och kablagen är oskadda. Testa funktionen för handkontrollen, vippbrytaren eller joysticken. Laddaren ska lysa med rött sken när laddingen påbörjas och övergå sedan till grönt när batteriet är fulladdat.

## Rengöring av sits, ryggstöd och nackstöd

En avtagbar original klädsel i tyg, samt bälte och sele kan maskin tvättas i 60°C. Vid användning av vanligt förekommande möbeltvätt eller skum, är proceduren följande:

1. Avlägsna lösa smuts och dammsug sedan dynorna noggrant.
2. Lägg på ett tunt lager med möbelskum på smutsiga ytor och fläckar. Gnugga lätt med en mjuk borste eller gnid med fuktig trasa över hela ytan. Upprepa proceduren tills fläcken är borta.
3. Eftertorka med en ren, urvriden trasa doppad i ljummet vatten och dammsug när allt har torkat.

## Överdragsklädsel och armstöd i läderimitation

Konstläder ska rengöras med mild tvållösning och ljummet vatten. Starkare rengöringsmedel ska så långt som möjligt undvikas. Desinficering: Använd desinficeringsmedel avsedd för konstläder. Torka av ytan omedelbart efter med en ren fuktig trasa.

## Armstöd i PUR

Rengör produkten med mild tvållösning. Använd inte rengöringsmedel som innehåller klor eller slipoch etsmedel, eftersom detta kan skada ytan. Använd desinficeringsmedel avsedd för plast. Torka av ytan omedelbart efter med en ren fuktig trasa.

## Tilt med vajer eller vev

Tilt med vajer: Testa funktionen och justera vid behov. Vid byte av vajer, byt vajernippeln. Smörj vajern vid ingången till alla vajerhöljen. Kontrollera infästningen för kolvstånghuvudet och gastiltkolven. Byt ut skruvförbandet vid behov. Använd alltid Loctite 290 låsning av skruvförbandet och kolvstånghuvudet. Åtdragningsmoment 5,7 Nm M5. Tilt med vev: Kontrollera infästningar och smörj axeln för vev.

**Kontroll av sittkryset**

Kontrollera infästningar och att det finns ingen glapp i rörliga delar, sprickor i svets sömmar samt att låsmuttern i tilltaxeln är åtdragen. Smörj rörliga delar.

**Rygg-, nack- och armstöd**

Kontrollera alla funktioner, dra åt skruvar och smörj alla rörliga delar inklusive gängor för rattar och vred. Kontrollera yta och klädsel.

**Tillbehör**

Testa funktionen, dra åt skruvar och smörj alla rörliga delar inklusive gängor för rattar och vred. Kontrollera yta och klädsel.

**Metallytor**

Torka av metallytor med fuktig trasa. Använd endast desinfektionsmedel godkända av läkemedelsverket och enligt landspecifika bestämmelser.

**Åtragningsmoment för obehandlade anoljade stålskruvförband**

M4 = 2,9 Nm

M5 = 5,7 Nm

M6 = 9,8 Nm

M8 = 24 Nm

M10 = 47 Nm