

# Bima XXL

---

## Målgrupp

Stabil och tryckavlastande rullstolsdyna, anpassad för stora och tunga personer som är beroende av rullstol för sina förflyttningar och har svårt att variera sittandet. Bima XXL är förebyggande mot sår. Den används även när det finns risk för trycksår.

## Kombinationer

Sittdynan är avsedd för användning i, på marknaden vanligen förekommande rullstolar.

## Handhavande

Avlägsna plastpåsen och iaktta hur dynan ska placeras. Den svarta etiketten med gul text (BAK) visar vad som är bak på dynan. Den vita etiketten med placerings pilar visar hur dynan ska vändas.

Handtaget ska vara framåt. Den räfflade antiglidytan ska vara vänd neråt.

Dynan behöver inte ställas in eller behöver något annat underhåll mer än rengöring.

Kupad botten används i rullstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta. Plan botten används när rullstolen har en fastare och stadigare sits som inte behöver kompenseras med utjämning.

Även om dynan är förebyggande är det viktigt att brukaren regelbundet får hjälp att bli förflyttad. Detta motverkar trycksår och risk för trycksår då vävnaderna annars trycks ihop.

## Art.nr, mått, brukarvikt och ISO-kod

Artikelnummer, mått och brukarvikter finns på baksidan.

Vikt: Bima XXL 50x45x10cm kupad 1,9 kg.

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

ISO-kod: 043303 Tryckavlastande sittdyna

## Rengöring och skötsel

Velouröverdraget tvättas i 60°C med avigsidan utåt och med stängt blixtlås.

Centrifugeras och torktumlas alternativt dropptorkas i torkskåp. Efter tvätt är det mycket viktigt att montera överdraget rätt. Kontrollera att märkningen på dynbasen stämmer med märkningen på överdraget. Se till att ”peta ut” alla hörn och att överdraget passar bra på dynbasen.

Dynbasen sprayas med desinfektion t.ex. DAX ytdesinfektion plus. Vanlig förekommande ytdesinfektion som innehåller isopropyl alkohol kan med fördel också användas. Ytorna torkas med fuktad torkduk och får sedan lufttorka. Upprepa proceduren ett par gånger. Var noga med att dynan är helt torr innan den används.

Vid inkontinens ska skyddshättan som medföljer användas. Vid inkontinens är det viktigt att dynan skyddas och att överdraget tvättas ofta. Används skyddshättan är det enkelt och smidigt vid tvätt samt att urindoft inte ”sätter sig” i dynan.

## Kvalitet, miljö och brandsäkerhet

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Dynan uppfyller ISO7176-16 enligt brandtest utförd av Swerea IVF i Mölndal.

Tillverkning sker i Sverige av BIMA Plastteknik AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: [info@bimaplastteknik.se](mailto:info@bimaplastteknik.se).

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad enligt ISO9001 samt miljöcertifierad enligt ISO14001.

Företaget är anslutet till näringslivets system för återvinning av förpackningar, FTI.

Dynbas och överdrag sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.

CE-märkt enligt Läkemedelsverkets gällande föreskrifter (LVFS) Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

## Art.nr, mått och brukarvikt Obs! Höjden mätt mitt bak, på dynans tjockaste ställe

Bima XXL med <b>kupad</b> botten. Artikelnummer, mått och max brukarvikt										
(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd <sup>tot</sup> där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd <sup>tot</sup> = Sitsdjup på mitten							Dynans höjd (cm)	Max vikt (kg)
Bredd	43/46	45/48	47/50	50/53	55/58	60/63	65/68	Conforfoam		
47,5	90-4743-K	90-4745-K	90-4747-K	90-4750-K	90-4755-K			42 rosa	10	150
50	90-5043-K	90-5045-K	90-5047-K	90-5050-K	90-5055-K			42 rosa	10	150
52,5	90-5243-K	90-5245-K	90-5247-K	90-5250-K	90-5255-K	90-5260-K		42 rosa	10	180
55	90-5543-K	90-5545-K	90-5547-K	90-5550-K	90-5555-K	90-5560-K		45 blå	10	200
57,5	90-5743-K	90-5745-K	90-5747-K	90-5750-K	90-5755-K	90-5760-K		45 blå	10	250
60		90-6045-K	90-6047-K	90-6050-K	90-6055-K	90-6060-K		45 blå	10	250
62,5			90-6247-K	90-6250-K	90-6255-K	90-6260-K		45 blå	10	250
65				90-6550-K	90-6555-K	90-6560-K	90-6565-K	45 blå	10	250
67,5				90-6750-K	90-6755-K	90-6760-K	90-6765-K	45 blå	10	250
70				90-7050-K	90-7055-K	90-7060-K	90-7065-K	45 blå	10	250
75				90-7550-K	90-7555-K	90-7560-K	90-7565-K	45 blå	10	250
80				90-8050-K	90-8055-K	90-8060-K	90-8065-K	45 blå	10	250

Bima XXL med <b>plan</b> botten. Artikelnummer, mått och max brukarvikt										
(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd <sup>tot</sup> där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd <sup>tot</sup> = Sitsdjup på mitten							Dynans höjd (cm)	Max vikt (kg)
Bredd	43/46	45/48	47/50	50/53	55/58	60/63	65/68	Conforfoam		
47,5	90-4743-P	90-4745-P	90-4747-P	90-4750-P	90-4755-P			42 rosa	9	150
50	90-5043-P	90-5045-P	90-5047-P	90-5050-P	90-5055-P			42 rosa	9	150
52,5	90-5243-P	90-5245-P	90-5247-P	90-5250-P	90-5255-P	90-5260-P		42 rosa	9	180
55	90-5543-P	90-5545-P	90-5547-P	90-5550-P	90-5555-P	90-5560-P		45 blå	9	200
57,5	90-5743-P	90-5745-P	90-5747-P	90-5750-P	90-5755-P	90-5760-P		45 blå	9	250
60		90-6045-P	90-6047-P	90-6050-P	90-6055-P	90-6060-P		45 blå	9	250
62,5			90-6247-P	90-6250-P	90-6255-P	90-6260-P		45 blå	9	250
65				90-6550-P	90-6555-P	90-6560-P	90-6565-P	45 blå	9	250
67,5				90-6750-P	90-6755-P	90-6760-P	90-6765-P	45 blå	9	250
70				90-7050-P	90-7055-P	90-7060-P	90-7065-P	45 blå	9	250
75				90-7550-P	90-7555-P	90-7560-P	90-7565-P	45 blå	9	250
80				90-8050-P	90-8055-P	90-8060-P	90-8065-P	45 blå	9	250

För att beställa extra överdrag ange **Ö+** artikelnummer t.ex. **Ö90-5045-K**

För att beställa en inkontinenshätta ange **INKO+** artikelnummer t.ex. **INKO90-5043-K**