

Utjämningskiva

Kombinationer

Utjämningskivan är avsedd för användning i, på marknaden vanligen förekommande rullstolar. För att få en jämn sittyta i rullstolar med hängmattesits.

Skivan användas i överdraget under sittdynan på marknaden vanligen förekommande plana sittdynor.

Handhavande

Avlägsna plastpåsen och iaktta hur skivan ska placeras. Den kupade sidan ska vara ner.

Etiketten med placeringspilarna visar hur skivan ska vändas.

Om utrymme finns i dynans överdrag, placeras utjämningskivan med fördel där.

Detta för att förhindra att dynan glider mot utjämningskivan.

Art.nr, mått, brukarvikt och ISO-kod

Art.nr och mått finns på baksidan.

ISO-kod: 181006.

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

Rengöring och skötsel

Skivan rengörs/ rekonditioneras genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning i 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Sköljs sedan av med ljummet vatten och lufttorkas.

Målgrupp

Utjämningskivan används i rullstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta.

Den används tillsammans med dyna med plan botten utan kompensering för hängmatteeffekt.

Skivan är tillverkad i ett fast formstabilt material som går att rengöra med tvättsprit.

Kvalitet, miljö och brandsäkerhet

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Skivan uppfyller ISO7176-16 enligt brandtest utförd av Swerea IVF i Mölndal.

Tillverkning sker i Sverige av BIMA Plastteknik AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se.

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad enligt ISO9001 samt miljöcertifierad enligt ISO14001.

Företaget är anslutet till näringslivets system för återvinning av förpackningar, FTI.

Dynbas och överdrag sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.

CE-märkt enligt Läkemedelsverkets gällande föreskrifter (LVFS) Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

Art.nr och mått

Artikelnummer Utjämningskiva höjd 2,4cm								
(cm)	Sitsdjup							
Bredd	35	38	40	43	45	47	50	55
35	01-3535	01-3538	01-3540	01-3543				
37,5	01-3735	01-3738	01-3740	01-3743	01-3745	01-3747	01-3750	
40	01-4035	01-4038	01-4040	01-4043	01-4045	01-4047	01-4050	
42,5		01-4238	01-4240	01-4243	01-4245	01-4247	01-4250	
45		01-4538	01-4540	01-4543	01-4545	01-4547	01-4550	
47,5		01-4738	01-4740	01-4743	01-4745	01-4747	01-4750	
50		01-5038	01-5040	01-5043	01-5045	01-5047	01-5050	
52,5			01-5240	01-5243	01-5345	01-5247	01-5250	
55			01-5540	01-5543	01-5545	01-5547	01-5550	01-5555
57,5			01-5740	01-5743	01-5745	01-5747	01-5750	01-5755
60					01-6045	01-6047	01-6050	01-6055

Artikelnummer Utjämningskiva höjd 1,5cm								
(cm)	Sitsdjup							
Bredd	35	38	40	43	45	47	50	55
35	01-3535-2	01-3538-2	01-3540-2	01-3543-2				
37,5	01-3735-2	01-3738-2	01-3740-2	01-3743-2	01-3745-2	01-3747-2	01-3750-2	
40	01-4035-2	01-4038-2	01-4040-2	01-4043-2	01-4045-2	01-4047-2	01-4050-2	
42,5		01-4238-2	01-4240-2	01-4243-2	01-4245-2	01-4247-2	01-4250-2	
45		01-4538-2	01-4540-2	01-4543-2	01-4545-2	01-4547-2	01-4550-2	
47,5		01-4738-2	01-4740-2	01-4743-2	01-4745-2	01-4747-2	01-4750-2	
50		01-5038-2	01-5040-2	01-5043-2	01-5045-2	01-5047-2	01-5050-2	
52,5			01-5240-2	01-5243-2	01-5345-2	01-5247-2	01-5250-2	
55			01-5540-2	01-5543-2	01-5545-2	01-5547-2	01-5550-2	01-5555-2
57,5			01-5740-2	01-5743-2	01-5745-2	01-5747-2	01-5750-2	01-5755-2
60					01-6045-2	01-6047-2	01-6050-2	01-6055-2