

# Sitt-, köks-/coxitdyna lätt & standard

---

Avlägsna plastpåsen och iaktta hur dynan ska placeras. Den svarta etiketten med gul text (BAK) visar vad som är bak på dynan. Notera den vita etiketten och placeringspilarna, de visar hur dynan ska vändas. Flytta inte dynan med hjälp av dess handtag när brukaren sitter på den. Köksdynan har inget bärhandtag.

Coxit modell med ½ eller ¼ urtag, är dynor med mjukare del i dynan som positionerar ena eller båda låren lutande framåt. Används efter en höftledsoperation, för att öppna upp höftledsvinkeln. *Det är mycket viktigt att det mjuka urtaget placeras framåt.* Notera speciellt placeringen av dynan om det har ett ¼ urtag. Mjuka delen ska vara framåt och på samma sida som den opererade höftleden.

För att minska risk för glidning framåt är överdraget monterat med tvärgående ribbning. Efter tvätt är det mycket viktigt att montera överdraget rätt. Kontrollera att märkningen på dynbasen överensstämmer med märkningen på överdraget. Se till att ”peta ut” alla hörn och att överdraget passar bra på dynbasen. Som tillbehör finns en skyddshätta som med fördel används vid inkontinens.

Ställs högre krav på återkommande desinfektering finns rekonditionerbara förhöjningsdynor i sortimentet. Dessa dynor kan på ett enkelt sätt desinfekteras med alkoholbaserade rengöringsmedel.

## Art.nr, storlek, brukarvikt och ISO-kod

Artikelnummer, storlek och brukarvikter finns på baksidan.

Dynans vikt:   Sittdyna lätt hel 40x40x7,5cm 0,70kg  
                  Sittdyna standard hel 40x40x7,5cm 1,10kg

ISO-kod: 181006 Förhöjande sittdyna

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

## Rengöring och skötsel

Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning i 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Dynbasen torkas i ett varmt väl ventilerat utrymme (torkskåp). Överdraget tvättas i maskin 60°C, med avigsidan utåt och stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling.

## Målgrupp

Förhöjningsdynor tillverkas i olika höjder och är avsedda för att lättare kunna resa sig efter sittande. Coxit, är dynor med mjukare del i dynan som positionerar ena eller båda låren lutande framåt.

Används efter en höftledsoperation, för att öppna upp höftledsvinkeln.

Dynornas stomme tillverkas i två olika utföranden:

Lätt – som lämpar sig bl.a. för reumatiker, då den väger lite och är lätt att bära med sig.

Standard – som är fastare och stadigare men också lite tyngre, klarar högre brukarvikt.

## Kvalitet, miljö och brandsäkerhet

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Dynan uppfyller ISO7176-16 enligt brandtest utförd av Swerea IVF i Mölndal.

Tillverkning sker i Sverige av BIMA Plastteknik AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: [info@bimaplastteknik.se](mailto:info@bimaplastteknik.se).

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad enligt ISO9001 samt miljöcertifierad enligt ISO14001.

Företaget är anslutet till näringslivets system för återvinning av förpackningar, FTI.

Dynbas och överdrag sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.

CE-märkt enligt Läkemiddelsverkets gällande föreskrifter (LVFS) Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

## Art.nr, mått och brukarvikt

Sittdyna lätt hel			Sittdyna lätt 1/2 urtag			Sittdyna lätt1/4 urtag		
Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)	Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)	Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)
B130	40x40x5	125	B1352	40x40x5	125	B1354	40x40x5	125
B131	40x40x7,5	125	B1362	40x40x7,5	125	B1364	40x40x7,5	125
B132	40x40x10	125	B1372	40x40x10	125	B1374	40x40x10	125
B133	40x40x12,5	125	B1382	40x40x12,5	125	B1384	40x40x12,5	125
B134	40x40x15	125	B1392	40x40x15	125	B1394	40x40x15	125
B13045	45x45x5	125	B136245	45x45x7,5	140			
B13145	45x45x7,5	140	B137245	45x45x10	140			
B13245	45x45x10	140	B136250	50x50x7,5	150			
B13150	50x50x7,5	150	B137250	50x50x10	150			
B13250	50x50x10	150						
Sittdyna standard hel			Sittdyna standard 1/2 urtag			Sittdyna standard 1/4 urtag		
Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)	Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)	Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)
B100	40x40x5	150	B1152	40x40x5	150	B1184	40x40x7,5	150
B103	40x40x7,5	150	B1182	40x40x7,5	150	B1214	40x40x10	150
B106	40x40x10	150	B1212	40x40x10	150			
B109	40x40x12,5	150	B1242	40x40x12,5	150			
B112	40x40x15	150	B118245	45x45x7,5	170			
B10345	45x45x7,5	170	B121245	45x45x10	170			
B10645	45x45x10	170	B118250	50x50x7,5	180			
B10350	50x50x7,5	180	B121250	50x50x10	180			
B10650	50x50x10	180						
Köksdyna lätt hel			Köksdyna lätt 1/2 urtag			Köksdyna lätt1/4 urtag		
Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)	Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)	Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)
B230	39x36x5	125	B2352	39x36x5	125	B2354	39x36x5	125
B231	39x36x7,5	125	B2362	39x36x7,5	125	B2364	39x36x7,5	125
B232	39x36x10	125	B2372	39x36x10	125	B2374	39x36x10	125
B233	39x36x12,5	125	B2382	39x36x12,5	125	B2384	39x36x12,5	125
B234	39x36x15	125	B2392	39x36x15	125	B2394	39x36x15	125
Köksdyna standard hel			Köksdyna standard 1/2 urtag			Köksdyna standard 1/4 urtag		
Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)	Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)	Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)
B200	39x36x5	135	B2152	39x36x5	135	B2184	39x36x7,5	135
B203	39x36x7,5	135	B2182	39x36x7,5	135	B2214	39x36x10	135
B206	39x36x10	135	B2212	39x36x10	135			
B209	39x36x12,5	135	B2242	39x36x12,5	135			