

Kildyna mjuk & kildyna Radner

Målgrupp

Används för att positionera bäckenet bakåt eller framåt.

Kan även användas efter en höftledsoperation, för att öppna höftledsvinkeln.

Viktigt! Den höga sidan ska vara bakåt. Dynan positionerar då båda låren framåt.

Handhavande

Avlägsna plastpåsen och iaktta hur dynan ska placeras.

Kildynan kan vändas med den högre eller den lägre sidan framåt.

OBS! Används dynan efter en höftledsoperation är det mycket viktigt att den högre sidan är bakåt och den lägre sidan framåt.

OBS! Ska inte användas i bilsäte eftersom det finns risk för underglidning vid frontalkollision.

Kildynan är försedd med ett handtag för att kunna bära med sig. Kildyna med köksform och Radner har inte bärhandtag. Köksform används på köksstol och är försedd med knytband.

Radner är avsedd för arbets-/ kontorsstol för ökad rörlighet med benen.

Efter tvätt är det mycket viktigt att montera överdraget rätt. Kontrollera att märkningen på dynbasen stämmer med märkningen på överdraget. Se till att ”peta ut” alla hörn och att överdraget passar bra på dynbasen.

Art.nr, mått, brukarvikt och ISO-kod

Art.nr, mått och brukarvikt se baksidan.

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

ISO-kod: 181006 Kildyna

Rengöring och skötsel

Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning i 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel.

Dynbasen torkas i ett varmt väl ventilerat utrymme (torkskåp).

Överdraget tvättas i maskin 60°C, med avigsidan utåt och stängd dragkedja.

Därefter centrifugering och torktumling alternativt dropptorkas i torkskåp.

Kvalitet, miljö och brandsäkerhet

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Dynan uppfyller ISO7176-16 enligt brandtest utförd av Swerea IVF i Mölndal.

Tillverkning sker i Sverige av BIMA Plastteknik AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se.

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad enligt ISO9001 samt miljöcertifierad enligt ISO14001.

Företaget är anslutet till näringslivets system för återvinning av förpackningar, FTI.

Dynbas och överdrag sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.

CE-märkt enligt Läkemedelsverkets gällande föreskrifter (LVFS) Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

Artikelnummer, modell/ mått och max brukarvikt

| Art.nr | Modell/ mått | Max brukarvikt |
|--------|----------------------------------|----------------|
| B30030 | Kildyna 30x30x3/1cm | 90kg |
| B30035 | Kildyna 35x30x5/1cm | 90kg |
| B300 | Kildyna 38x38x6/1cm | 125kg |
| B300-2 | Kildyna 38x38x6/2cm | 125kg |
| B301 | Kildyna 38x38x8/1cm | 125kg |
| B302 | Kildyna 38x38x10/1cm | 125kg |
| B306 | Kildyna 40x40x3/1cm | 125kg |
| B303 | Kildyna 40x40x6/2cm | 125kg |
| B304 | Kildyna 40x40x8/2cm | 125kg |
| B305 | Kildyna 40x40x10/2cm | 125kg |
| B7016 | Kildyna 40x43x6/2cm | 125kg |
| B7018 | Kildyna 40x43x10/2cm | 125kg |
| B7026 | Kildyna 45x43x6/2cm | 140kg |
| B7028 | Kildyna 45x43x10/2cm | 140kg |
| B30345 | Kildyna 45x45x6/2cm | 140kg |
| B30445 | Kildyna 45x45x8/2cm | 140kg |
| B30350 | Kildyna 50x50x6/2cm | 150kg |
| B30450 | Kildyna 50x50x8/2cm | 150kg |
| B308 | Kildyna för köksstol 39x36x5/2cm | 125kg |
| B3087 | Kildyna för köksstol 39x36x7/2cm | 125kg |
| B3089 | Kildyna för köksstol 39x36x9/2cm | 125kg |
| B3050 | Kildyna Radner 42x33x5/2cm | 125kg |
| B3070 | Kildyna Radner 42x33x7/2cm | 125kg |
| B3090 | Kildyna Radner 42x33x9/2cm | 125kg |