

Bima fjäder

Målgrupp

Underlättar för brukare med värme och smärt problematik. Fjäderuppsättningen i sittgropen fördelar trycket under sittbensknölar och svanskota. Något fastare skum under låren ger bra avlastning. Används i första hand när det finns risk för trycksår. Har genom åren gett goda resultat mot smärta och rodnad.

Kombinationer

Sittdynan är avsedd för användning i, på marknaden vanligen förekommande rullstolar. Kan även användas i andra sittmöbler. Bima duo visco plan kan användas med, på marknaden vanligen förekommande utjämningskivor för att få en jämn sittyta i rullstolar med hängmattesits. Sittdynan finns med plan eller kupad botten. Kupad bottenform används i rullstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta. Plan bottenform används när rullstolen har en fastare och stadigare sits som inte behöver kompenseras med utjämnning.

Handhavande

Avlägsna plastpåsen och iaktta hur dynan ska placeras. Den svarta etiketten med gul text (BAK) visar vad som är bak på dynan. Den vita etiketten med placeringspilarna (UPP) visar hur dynan ska vändas. Handtaget ska vara framåt. Den räfflade antiglidytan ska vara vänd neråt.

Dynan behöver inte ställas in eller behöver något annat underhåll mer än rengöring.

Sittytan är monterad med motsatt luggriktning. Det förhindrar brukaren att glida framåt och samtidigt underlättar det sidoförflyttningar och förflyttning bakåt.

Efter tvätt är det mycket viktigt att montera överdraget rätt. Kontrollera att märkningen på dynbasen stämmer med märkningen på överdraget. Se till att ”peta ut” alla hörn och att överdraget passar bra på dynbasen.

Art.nr, mått, brukarvikt och ISO-kod

Artikelnummer, mått och brukarvikter finns på baksidan.

Vikt: Bima fjäder 45x43x10cm kupad 1,0 kg.

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

ISO-kod: 043303 Tryckavlastande sittdyna

Rengöring och skötsel

Dynbasen sprayas med desinfektion t.ex. DAX ytdesinfektion plus. Vanlig förekommande ytdesinfektion som innehåller isopropyl alkohol kan med fördel också användas. Ytorna torkas med fuktad torkduk och får sedan lufttorka. Upprepa proceduren ett par gånger. Var noga med att dynan är helt torr innan den används.

Velouröverdraget tvättas i 60°C med avigsidan utåt och med stängt blixtlås.

Centrifugeras och torktumlas alternativt droptorkas i torkskåp.

Vid inkontinens ska skyddshättan som medföljer användas. Vid inkontinens är det viktigt att dynan skyddas och att överdraget tvättas ofta. Används skyddshättan är det enkelt och smidigt vid tvätt samt att urindoft inte ”sätter sig” i dynan.

Kvalitet, miljö och brandsäkerhet

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Dynan uppfyller ISO7176-16 enligt brandtest utförd av Swerea IVF i Mölndal.

Tillverkning sker i Sverige av BIMA Plastteknik AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se.

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad enligt ISO9001 samt miljöcertifierad enligt ISO14001.

Företaget är anslutet till näringslivets system för återvinning av förpackningar, FTI.

Dynbas och överdrag sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.

CE-märkt enligt Läkemedelsverkets gällande föreskrifter (LVFS) Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

Art.nr, mått och brukarvikt Obs! Höjden mäts mitt bak, på dynans tjockaste ställe

Bima fjäder med kupad botten. Artikelnummer, mått och max brukarvikt										
(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd ^{tot} där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd ^{tot} = Sitsdjup på mitten							Dynans höjd (cm)	Max vikt (kg)
Bredd	35/38	38/41	40/43	43/46	45/48	47/50	50/53	55/58		
35	60-3535-K	60-3538-K	60-3540-K	60-3543-K					10	125
37,5	60-3735-K	60-3738-K	60-3740-K	60-3743-K	60-3745-K	60-3747-K	60-3750-K		10	125
40	60-4035-K	60-4038-K	60-4040-K	60-4043-K	60-4045-K	60-4047-K	60-4050-K		10	125
42,5		60-4238-K	60-4240-K	60-4243-K	60-4245-K	60-4247-K	60-4250-K		10	125
45		60-4538-K	60-4540-K	60-4543-K	60-4545-K	60-4547-K	60-4550-K		10	125
47,5		60-4738-K	60-4740-K	60-4743-K	60-4745-K	60-4747-K	60-4750-K		10	135
50		60-5038-K	60-5050-K	60-5043-K	60-5045-K	60-5047-K	60-5050-K		10	140
52,5			60-5240-K	60-5243-K	60-5345-K	60-5247-K	60-5250-K		10	150
55			60-5540-K	60-5543-K	60-5545-K	60-5547-K	60-5550-K	60-5555-K	10	150
57,5			60-5740-K	60-5743-K	60-5745-K	60-5747-K	60-5750-K	60-5755-K	10	150
60					60-6045-K	60-6047-K	60-6050-K	60-6055-K	10	150

Bima fjäder med plan botten. Artikelnummer, mått och max brukarvikt										
(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd ^{tot} där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd ^{tot} = Sitsdjup på mitten							Dynans höjd (cm)	Max vikt (kg)
Bredd	35/38	38/41	40/43	43/46	45/48	47/50	50/53	55/58		
35	60-3535-P	60-3538-P	60-3540-P	60-3543-P					10	125
37,5	60-3735-P	60-3738-P	60-3740-P	60-3743-P	60-3745-P	60-3747-P	60-3750-P		10	125
40	60-4035-P	60-4038-P	60-4040-P	60-4043-P	60-4045-P	60-4047-P	60-4050-P		10	125
42,5		60-4238-P	60-4240-P	60-4243-P	60-4245-P	60-4247-P	60-4250-P		10	125
45		60-4538-P	60-4540-P	60-4543-P	60-4545-P	60-4547-P	60-4550-P		10	125
47,5		60-4738-P	60-4740-P	60-4743-P	60-4745-P	60-4747-P	60-4750-P		10	135
50		60-5038-P	60-5050-P	60-5043-P	60-5045-P	60-5047-P	60-5050-P		10	140
52,5			60-5240-P	60-5243-P	60-5345-P	60-5247-P	60-5250-P		10	150
55			60-5540-P	60-5543-P	60-5545-P	60-5547-P	60-5550-P	60-5555-P	10	150
57,5			60-5740-P	60-5743-P	60-5745-P	60-5747-P	60-5750-P	60-5755-P	10	150
60					60-6045-P	60-6047-P	60-6050-P	60-6055-P	10	150

För att beställa extra överdrag ange **Ö+** artikelnummer t.ex. **Ö60-4543-K**

För att beställa en inkontinenshätta ange **INKO+** artikelnummer t.ex. **INKO60-4543-K**