



Merryrise fristående lyftbåge

MerryRise används då man behöver lyfta sig från madrass eller om man hasat ner i sängen och vill lyfta sig uppåt mot huvudändan igen.

MerryRise kan demonteras i 8 delar. Lyftbågen monteras utan verktyg.

MerryRise är tillverkad av epoxilackerade stålrör. Den höjdställbara trapetsen är spärrad för att förhindra att den glider ur. Lyftbågen har två ben som kan ställas in på bredden och längden.


Lyftbågens mast är svängbar ca 30 grader åt vardera hållet.

Lyftbågen rengörs lämpligast med de på marknaden vanligen förekommande rengöringsmedlen. Vid vattentvätt, se till att lyftbågen torkar ordentligt, utvändigt såväl som invändigt!



Bruksanvisning: Placera lyftbågen bakom sängens huvudgavel på ett jämnt underlag. Montera benen i önskad längd så att lyftbågen står stadigt och dra därefter åt stoppskruvarna för att fixera benen. Trä i förlängningsröret i foten och därefter placera hävert/lyftbågen i röret. Kontrollera att lyftbågen står stadigt och att alla skruvar är åtdragna.

Sanicare art nr	145510
Antal produkter/förp, st	1
Vikt per produkt, kg	14
Höjd, cm	200
Ställbara ben i bredd, cm	100-114
Ställbara ben i längd, cm	90-97
Material	Epoxilackerade stålrör
Max brukarvikt kg	120
Tvättråd	Vatten och vanliga rengöringsmedel. Se till att lyftbågen torkar ordentligt efter tvätt.

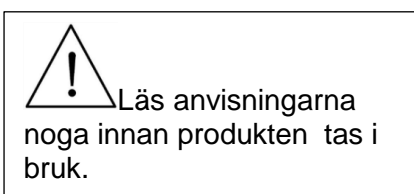

CE Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

sanicare