




Bruksanvisning




MerryRise fristående lyftbåge art.nr: 145510

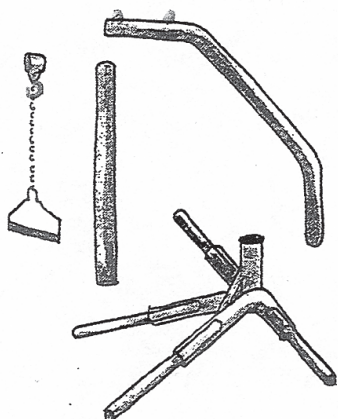

MerryRise är demonterbar i 8 delar.
Lyftbågen monteras utan verktyg.
MerryRise är 200 cm hög och väger
totalt 13 kg

MerryRise är tillverkad av epoxilackerade stålrör. Den höjdställbara trapetsen är spärrad för att förhindra att den glider ur. Lyftbågen har två ben som är bredställbara (100-114 cm) och två som är längdställbara (90-97 cm). Lyftbågens mast är svängbar ca 30 grader åt vardera hållet.

Lyftbågen rengöres lämpligast med de på marknaden vanligt förekommande rengöringsmedlen. Vid vattentvätt, tillse att lyftbågen torkar ordentligt, utvändigt såväl som invändigt!

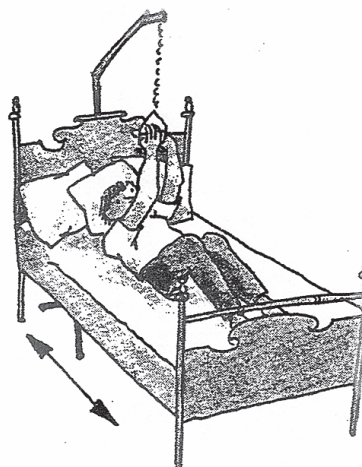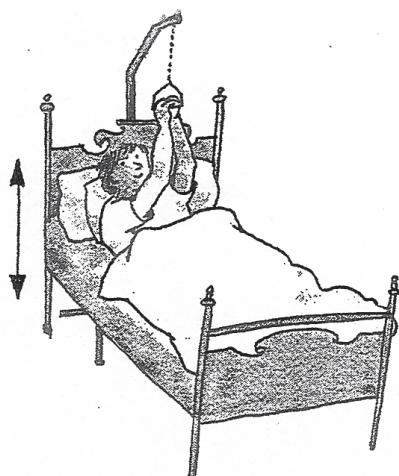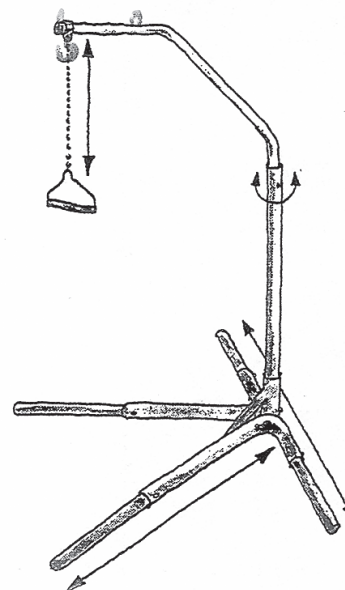

MerryRise används då man behöver lyfta sig från madrass eller om man hasat ner i sängen och vill lyfta sig uppåt mot huvudändan igen.

CE