



Bruksanvisning

Stödkäpp av trä 90 cm lång art.nr: 145437 | 98 cm lång art.nr: 141119



Stödkäppen av brunbetsad och lackerad bok har ett svarvat handtag, vars infästning har förstärkts med ett aluminiumstift.

Så här gör Du för att få lämplig höjd på käppen

1. Ta på Dig de skor Du använder mest.
2. Vänd käppen upp och ner.
3. Stå avslappnad med hängande armar.
4. Märk ut handledsknölen på käppen.
5. Såga av käppen.
6. Tänk på att doppskon adderar ca 1-2 cm längd till käppen!

Glöm inte att montera en doppsko!

Käppen är nu klar att använda för promenad i en skön avslappnad ställning med armen svagt böjd.

