
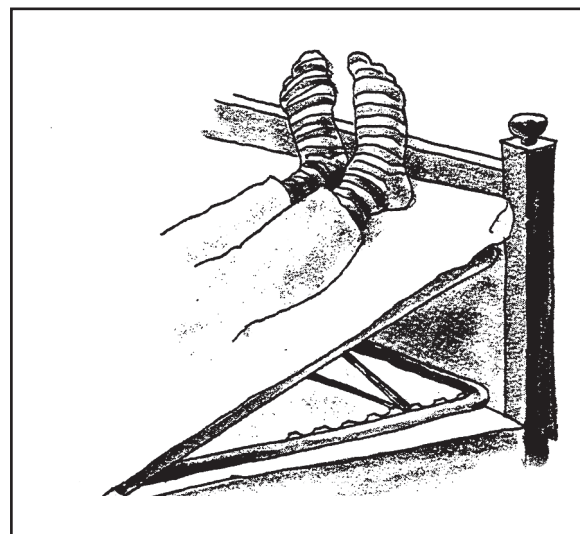


MerryBack är tillverkat i epoxylackerad metall. Det är manuellt inställbart mellan 0-70°, i nio fasta lägen. Den låga höjden gör att inget obehagligt mellanrum bildas mellan ryggstöd och sängbotten.

Mått: bredd 780 mm, längd 700 mm

Så här använder man ryggstödet

CE

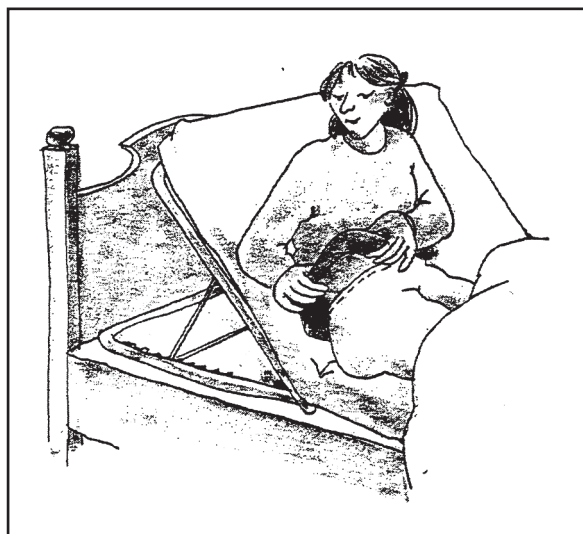

Fäll upp madrassen. Placera ryggstödet i sängen och välj önskat läge.
Lägg tillbaka madrassen

MerryBack kan även användas för att avlasta benen i sängen.