

COMPAT ELLA® UNIVERSAL SET, COMPAT ELLA® SPIKE SET, COMPAT ELLA® DUAL SPIKE SET

Compat Ella®-aggregaten är avsedda för administrering av enteral näringslösning, vätska eller läkemedel och passar för användning med Compat Ella® sondmatningspump. Aggregaten har en pumpkassett med integrerad, patenterad, säkerhetsfunktion (Auto-Anti-Free-Flow, AAFF) för att garantera patientsäkerheten.

FUNKTIONER I KORTHET

Alla Compat Ella®-aggregat är försedda med EN-Plus-koppling till nutritionsbehållare, ENFit® 3-vägs läkemedelsport samt ENFit® distal ände (för anslutning på patientsidan).

INBYGGD SÄKERHET

Alla Compat Ella®-aggregat är försedda med den patenterade säkerhetsfunktionen Auto-Anti-Free-Flow (AAFF). AAFF finns inbyggt i kassetten och aktiveras alltid automatiskt för att garantera patientsäkerheten.

SÄKRARE ANSLUTNINGAR

Alla Compat Ella®-aggregat är försedda med ENFit®-kopplingar enligt ISO 80369-3. Kopplingarna är utformade för att vara inkompatibla med IV-system för att främja patientsäkerheten.

LIVSMEDELSGODKÄNDA MATERIAL


Alla Compat Ella®-aggregat är DEHP-, BPA- och latexfria*.

Compat Ella Universal Set

Försedd med skruvlock av universaltyp med luftfilter.

KOMPATIBILITET

- Näringsbehållare: ENPlus, vidhalsade glas- och plastbehållare, glasflaskor med kronkork/kapsyl
- Matningsslangar: ENFit®
- För läkemedelstillförsel: ENFit®

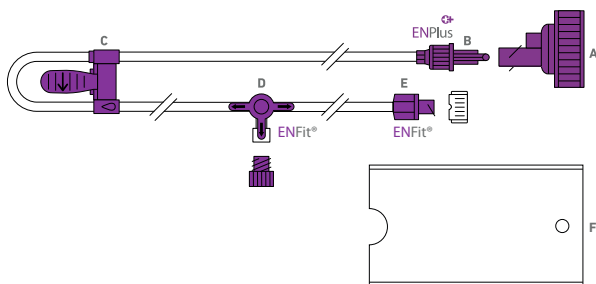


KOMPONENTER

- A** Skruvlock av universaltyp med luftfilter och ENPlus-port för användning med vidhalsade glas- och plastbehållare (DIN 168-1) eller glasflaskor med kronkork/kapsyl (EN 14634 och EN 14635)
- B** Proximal ände (för anslutning till näringsbehållare) av typen ENPlus ("endast enteral") med vridbart lås
- C** Compat Ella® pumpkassett med den inbyggda patenterade säkerhetsfunktionen Auto-Anti-Free-Flow (AAFF)
- D** 3-vägs läkemedelsport med ENFit®-koppling och hatt
- E** Distal ände (slanganslutning på patientsidan) av typen ENFit®
- F** Hållare för 500 ml-flaska, LDPE (Low Density Polyeten)

Compat Ella Spike Set

KOMPATIBILITET

- Näringsbehållare: ENPlus
- Matningsslangar: ENFit®
- För läkemedelstillförsel: ENFit®

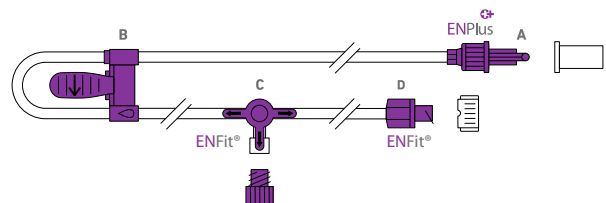

KOMPONENTER


- A** Proximal ände (för anslutning till näringsbehållare) av typen ENPlus ("endast enteral") med vridbart lås och hatt
- B** Compat Ella® pumpkassett med den inbyggda patenterade säkerhetsfunktionen Auto-Anti-Free-Flow (AAFF)
- C** 3-vägs läkemedelsport med ENFit®-koppling och hatt
- D** Distal ände (slanganslutning på patientsidan) av typen ENFit®

Compat Ella Dual Spike Set

Avsett för samtidig administrering av enteral nutrition och/eller hydrering via två separata behållare.

KOMPATIBILITET

- Näringsbehållare: ENPlus
- Matningsslangar: ENFit®
- För läkemedelstillförsel: ENFit®

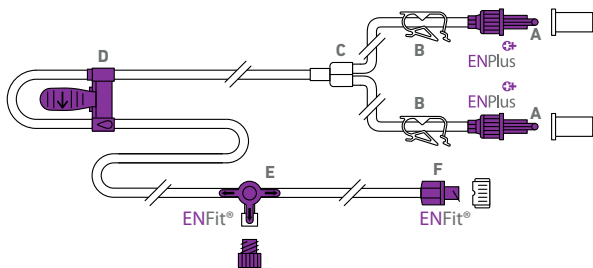

KOMPONENTER

- A** Proximal ände (för koppling till näringsbehållare) av typen ENPlus ("endast enteral") med skruvkork och hatt
- B** Slangklämma för att manuellt stänga av vätskeflödet
- C** Y-valv
- D** Compat Ella® pumpkassett med den inbyggda, patenterade säkerhetsfunktionen AAFF (Auto-Anti-Free-Flow)
- E** 3-vägs läkemedelsport med ENFit®-koppling och hatt
- F** Distal ände (slanganslutning på patientsidan) av typen ENFit®

SPECIFIKATIONER

Sterila: Steriliserade med etylenoxid.

Förpackning: Individuellt förpackade i askar med 30 enheter.

Compat Ella Universal Set (39,5 x 29,5 x 14 cm)

Compat Ella Spike Set (29,5 x 26 x 19 cm)

Compat Ella Dual Spike Set (29,5 x 26 x 19 cm)

Förvaring: Förvaras i rumstemperatur.

Skyddas från direkt solljus och fukt.

Hållbarhet: 3 år från tillverkningsdatum.

Utgångsdatum finns på förpackningen.

Användningstid: 24 timmar. För engångsbruk.

Slangens längd: Avståndet från nutritionskopplingen till sondkopplingen på patientsidan: 230 cm

Avstånd från nutritionskopplingen till pumpen, alla aggregat: 50 cm

Avstånd från nutritionskopplingen till Y-ventilen Compat Ella Dual Spike Set: 30 cm

Slangdiameter: Nominell innerdiameter: 3,0 mm
Nominell ytterdiameter: 4,15 mm

CE-märkning: Följer EU-direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG. En CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD (CE0123).

Miljöavtryck: "Grüne Punkt"-symbolen visar att Nestlé Health Science tar sitt tillverkaransvar och bidrar till finansieringen av återvinningen.

Material: Slang: PVC och silikon. Alla material är DEHP-, BPA- och latexfria.* Närmare information på begäran.

BESTÄLLNINGAR

Produkterna kan beställas direkt från Nestlé Sverige AB.

E-post: order@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00

Webbshop:

www.nestlehealthscience.se/webbshop

PRODUKTNAMN	BEST.NR.	ANTAL/ KARTONG
Compat Ella® Universal Set	90 04 49	30
Compat Ella® Spike Set	90 04 50	30
Compat Ella® Dual Spike Set	90 06 03	30

För närmare information, kontakta din representant för Nestlé Health Science eller gå till www.compatella.com

* Delarna innehåller högst 0,1 % totalt DEHP (Di (2-etylhexyl)ftalat). Ingen latex har tillsatts avsiktligt under tillverkningsprocessen.

® Registrerat varumärke som tillhör Société des Produits Nestlé S.A.

För mer information om ENFit® besök www.stayconnected.org