

SNABBGUIDE

SO[♥]CONNECT+ infusionspump

Snabbguiden ersätter inte den information och utbildning du får av sjukvården



1 TVÄTTA HÄNDERNA

och hitta en ren yta.



2 TA FRAM PUMP OCH TILLBEHÖR

Öppna förpackningarna på läkemedel, spruta, infusionsset och tillbehör.



3 TORKA AV GUMMIMEMBRANET

på läkemedelsampullen¹.



4 STICK NER MINI-SPIKE

i gummimembranet.



5 FÖRBERED² SO♥FILL-SPRUTAN

och skruva fast den på Mini-Spike.


Dra långsamt upp läkemedel i SO♥FILL sprutan.

Följ alltid din läkares ordination.




6 SKRUVA FAST INFUSIONSSETET PÅ SPRUTAN

Förfyll infusionssetet enligt sjukvårdens instruktion.

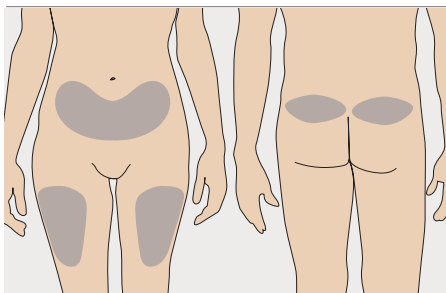

7 VÄLJ RÄTT INFUSIONSSTÄLLE

Se markeringar på bilden.³

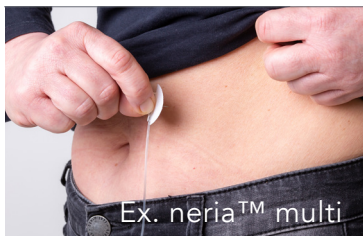


Ex. neria™ multi



Ex. neria™ guard

8 GREPPA TAG OM INFUSIONSSETET


Ta ett lätt nyp i underhuds fett och stick 90° rakt in.^{3,4}

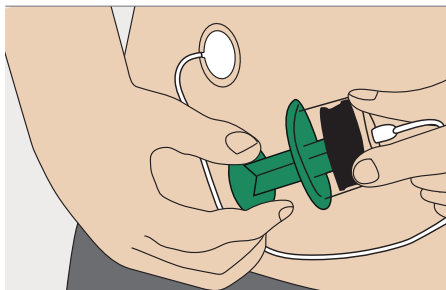


9 SÄKERHETSKONTROLL

När du fäst infusionssetet behöver du kontrollera att du inte stuckit i ett blodkärl.

- a)** Aspirera, dra sprutkolven bakåt. Se om det kommer blod i slangen närmast nålen.
- b)** Lossa därefter sprutan från infusionssetet i 10–15 sekunder. Kontrollera även nu om det kommer blod i slangen närmast nålen.
- c)** När säkerhetskontrollen är genomförd, skruva tillbaka infusionssetet på sprutan.

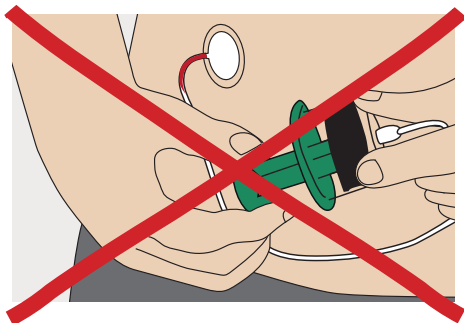

Om det kommer blod har du av misstag stuckit i ett blodkärl. Dra ut nålen, kassera den och upprepa proceduren enligt punkt 6-8 med ett nytt infusionsset och nytt stickställe samt gör säkerhetskontroll⁴ enligt punkt 9.

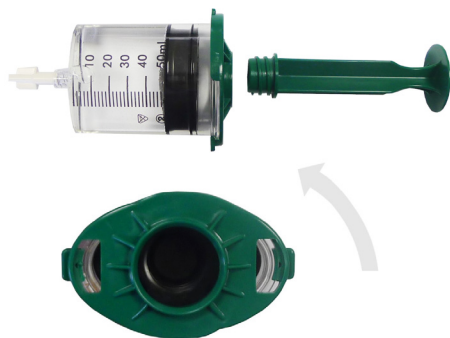

10 SKRUVA AV KOLVSTÅNGEN

från sprutan moturs, låt alltid det gröna kolvstoppet sitta kvar på sprutan tills kolvstången lossnar. Ta sedan bort kolvstoppet från sprutan genom att vrida den moturs.²


Avvakta med att koppla sprutan på pumpen. Det sker först i steg **12 E**.



11 STARTA PUMPEN PÅ ON/OFF KNAPPEN PÅ UNDERSIDAN


Pumpen gör ett självtest och för kolvstången till rätt läge.

12 STARTA INFUSIONEN

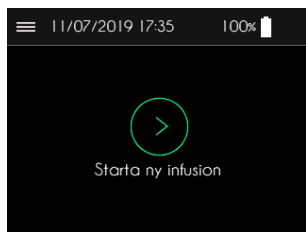

A: TRYCK PÅ "STARTA NY INFUSION"


Kontrollera infusionens inställningar.

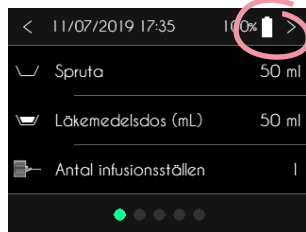


B: SPRUTSTORLEK, LÄKEMEDELSVOLYM
och antal insticksställen visas. Bekräfta med vit framåt-pil.




**C: INFUSIONS-
HASTIGHET OCH
INFUSIONSTID VISAS**
Bekräfta med vit framåt-pil.

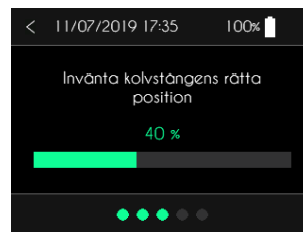

**D: KOLVSTÅNGEN
GÅR UPP I RÄTT
POSITION**

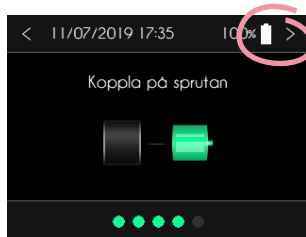

**E: KOPPLA PÅ
SO♥FILL-SPRUTAN²**
diagonalt på pumpen.
Vrid sprutan medurs tills
den snäpper fast.
Bekräfta med vit
framåt-pil.

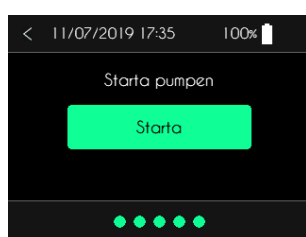


**F: STARTA
INFUSIONEN
GENOM ATT TRYCKA
"STARTA"**



**Nu är infusionen
igång. Om du
behöver teknisk
support, kontakta
Nordic Infucare
08 - 601 24 40**

13 AVSLUTA INFUSIONEN

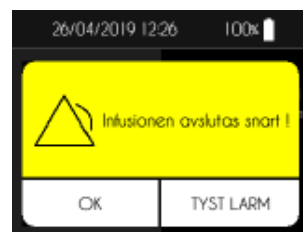

A: INFUSIONEN AVSLUTAS SNART

En ljudsignal uppstår.
Bekräfta med OK
i 2 sek.



**B: INFUSIONEN
AVSLUTAD**
En ljudsignal uppstår.
Bekräfta med OK i 2 sek.
Låt sprutan sitta kvar
tills kolvstången dragits
tillbaka helt.

C: TA BORT SPRUTAN FRÅN PUMPEN

Vrid sprutan moturs och
dra rakt upp. Släng plast
och stickande material
enligt sjukvårdens
instruktion.

*Läs alltid pumpens
bruksanvisning
för fullständig
information*

DANMARK: Vandtårnsvej 62A, 1 sal E • 2860 SØBORG • +45 70 28 10 24 • info@infucare.dk
FINLAND: Tekniikantie 14 • 02150 ESPOO • +358 207 348 760 • info@infucare.fi
NORGE: Gaustadalléen 21 • 0349 OSLO • +47 22 20 6000 • info@infucare.no
SVERIGE: Gustavslundsvägen 12, 3 tr, 167 14 BROMMA • +46 (0)8 601 2440 • info@infucare.se

**nordic
INFUCARE**