




BureTM

Gåbord



Bure Standard MANUELL 56-310
Bure Standard GAS 56-311
Bure Standard EL 56-312
Bure S 56-300, 56-301, 56-302

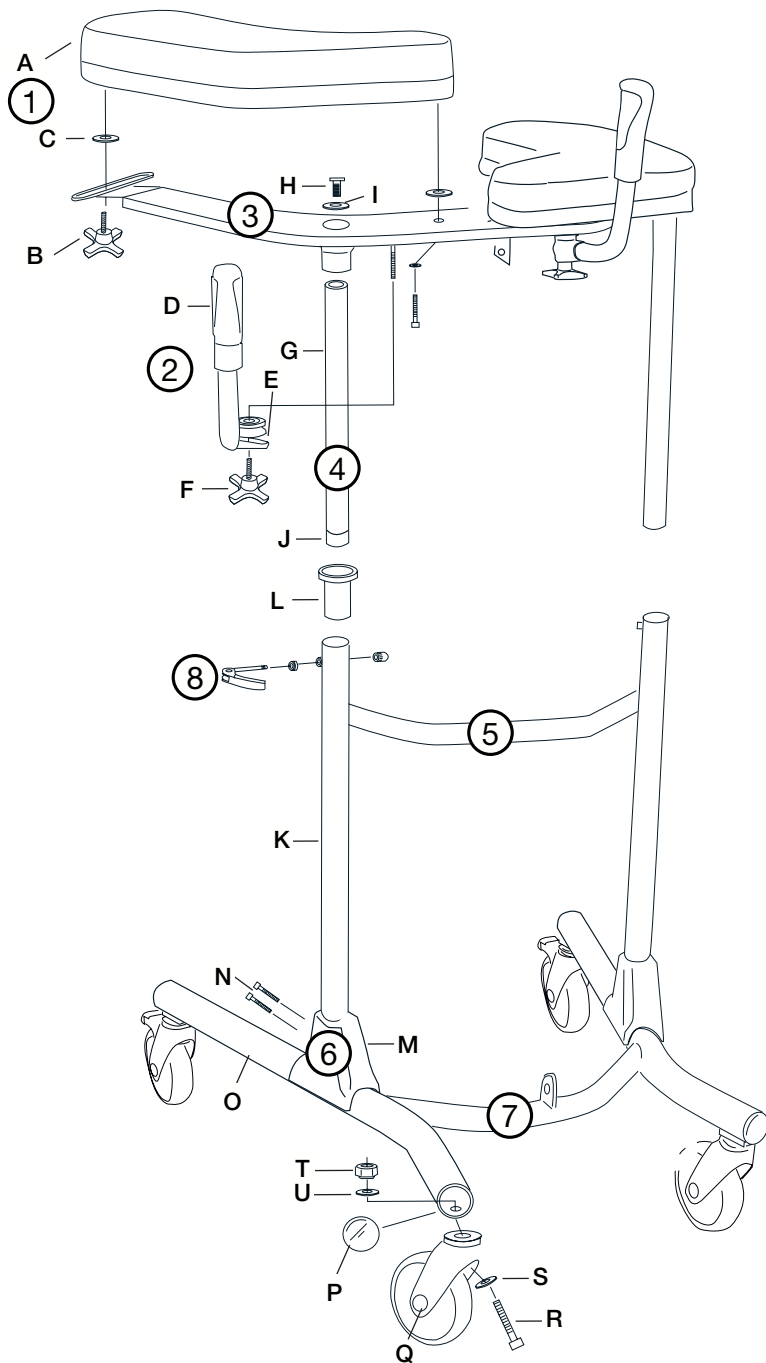

- 1 **A** Armstödsplatta
B Ratt
C Plastbricka
- 2 **D** Handtag+grepp
E Klämma
F Ratt
- 3 Överstativ
- 4 **G** Kromat rör
H Infästningsbult (2 st)
I Taggbricka
J Ändbussning
- 5 **K** Stativ
L Styrhylsa

- 6 **M** Skyddskåpa
N Skruvar
- 7 **O** Hjulstativ
P Ändbussning
Q Hjul
R Bult
S Bricka
T Mutter
U Taggbricka
- 8 Låsvred för
höjdjustering

- 9 **A** Gaskolv
B Handtag
C Arm/hus
D Skruv+bricka (2 st)
+mutter (infästning
nedtill, upptill)
- 10 **A** Batterihylla
+fästskruvar
B Batteri
+skruv/mutter
(för fastsättning på
batterihyllan)
C Ställdon
+Styrbox
D Fjärrkontroll
E Skruv+bricka (2 st)
+mutter

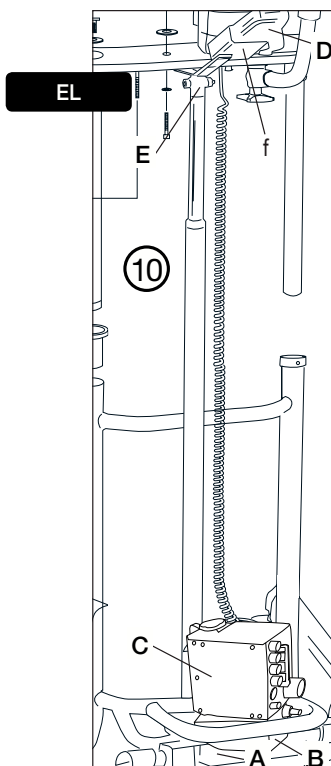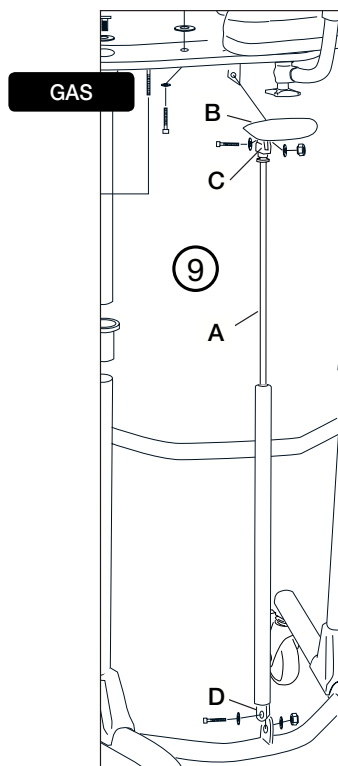

Reservdelar


Nr	Art. Nr	Beskrivning
-	56-305	Bättringsfärg Bure Silver 8
10F	56-328	Hållare för handkontroll (endast EL)
L	56-340	Styrhylsa
G	56-341	Standard Styrrör/kromat
9B /C	56-369	Plasthandtag Bure GAS (endast GAS)
J	56-343	Ändavslutning styrrör
P	56-344	Ändavslutning bottenstativ, Svart/D45
10B	56-346	Batteri inkl. kretskort (endast EL, LA28)
10B	56-346-1	Batteri (endast EL, LA31)
10C	56-349	Ställdon (Höj/Sänk) (endast EL, LA28)
10C	56-349-1	Ställdon (Höj/Sänk) (endast EL, LA31)
10C	56-345-1	Styrbox 220 V (endast EL, LA31)
10A	56-351	Batterihylla Std (endast EL)
O	56-352	Bottenstativ Bure Std
O	56-300-2	Bottenstativ Bure S
2	56-353	Handtagssats Bure Std (2 par inkl. fästratt/klämmor)
-	56-357	Länkhjul u broms 100mm
-	56-358	Länkhjul m broms 100mm
-	56-360	Länkhjul u broms 125mm
-	56-387	Länkhjul med broms 75mm
Q	56-361	Länkhjul m broms 125mm
8	56-362	Låsspak, manuell höjdjustering
8	56-362-1	Låsspak, klämma, bult för manuell höjdjustering
2F	56-363	Ratt för handtagsinställning
1B	56-364	Ratt för inst. breddning av armstödsplattor
1A	56-366	Armstödsplatta höger Bure Standard/S
1A	56-367	Armstödsplatta vänster Bure Standard/S
10D	56-370	Handkontroll 2kanal (Höj/Sänk) (endast EL, LA28)
10D	56-370-1	Handkontroll (Höj/Sänk) (endast EL, LA31)
-	56-374	Laddare till batteri (endast EL, LA28)
M	56-375	Skyddskåpa plast Bure Standard
-	56-374-1	Strömkabel (endast EL, LA31)

Tillbehör

Art. Nr	Beskrivning
56-326-0	Handbromstillsats/två handtag
56-326-1	Handbromstillsats/enhandsbroms
56-327	Förhöjningssats 70mm
56-330	Gaskolvssats 150N inkl. fäste/spak
56-368	Gaskolv 150N (enbart gaskolv)
56-381	Gaskolvssats 200N inkl. fäste/spak
56-331	Tramprör
56-332	Elmotorsats inkl. fjärrkontroll/batterihylla (endast MANUELL, GAS)
56-333	Ståplatta Bure Standard (plåt)
56-333-1	Ståplatta (Alu), Bure S
56-383	Ståplatta (Alu) Bure Standard
56-334	Dropphållare
56-335	Fäste för dropphållare

56-336	Hållare för syrgastub
56-337	Sidostöd, ställbart
56-338	Sats droppställning komplett
56-389	Mjukkgorg med fäste Bure Standard/S


Övriga instruktioner – Bure Standard EL

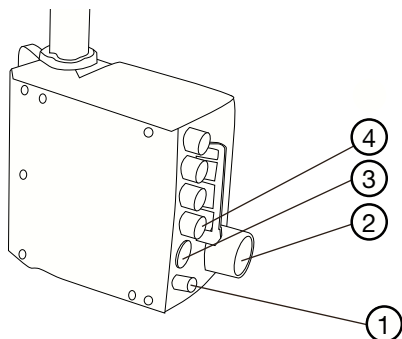

Kopplingsschema Styrbox

1. Uttag för batterikontakt
2. Uttag för stickpropp
(OBS! För att IP-klassning ska gälla så ska stickpropp ALLTID vara ansluten till styrbox)
3. Uttag för fjärrkontroll
4. Uttag för ställdon - höj/sänk

OBS! Var noga med att kontakter ansluts till rätt uttag eftersom detta annars kan skada ställdon.

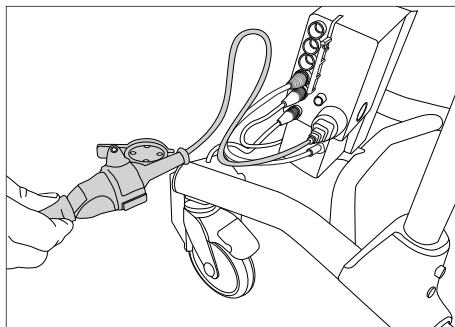

Laddning av batteri

Laddning av batteri ska ske då gåbordet inte används. (Batteriet kan aldrig överladdas.) Laddning görs genom att stickpropp ansluts till eluttag.



Innan första användningen så ska batteriet laddas 24 timmar.

Generella skötselråd

- Torka av gåbord och armstödsplattor vid behov – använd tvållösning



- Produkten ska ALLTID kännas stabil. Om gåbordet lutar eller har missljud – tillkalla servicepersonal.
- Byt ut trasiga delar omedelbart – skall göras av kunnig personal
- För gåbord med elställdon – använd ALDRIG gåbordet under laddning.
- Kontrollera att styrrör (4G) är åtdragna i överstativ (3).

Säkerhetsanvisningar




Bure Gåbord skall enbart användas:

- som ett GÅNGHJÄLPMEDEL inomhus
- på PLANA och HÅRDA underlag

Vid byte av hjul måste ändbussning (P) tas bort. Detta för att nytt hjul/hjulbult ska kunna säkras med mutter (T), taggbricka (U). Ingen kemisk låsning behövs då låsmutter används.

MAX BRUKARVIKT: 150 KG

ID-märkning

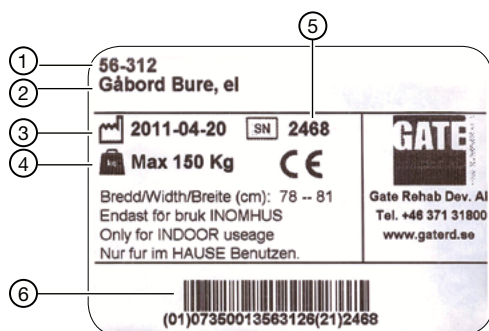

1. Artikelnummer
2. Produktnamn
3. Tillverkningsdatum
4. Max brukarvikt
5. Serienummer
6. EAN kod


Garanti

Vi lämnar två års garanti på ev. fabrikationsfel (Gäller ej förslitningsdetaljer).
För mer information eller frågor vänligen kontakta:



Gate Rehab Development AB
Isberga Säteri, 333 91 Smålandsstenar
tel 0371-318 00
info@gaterd.se

Tekniska specifikationer

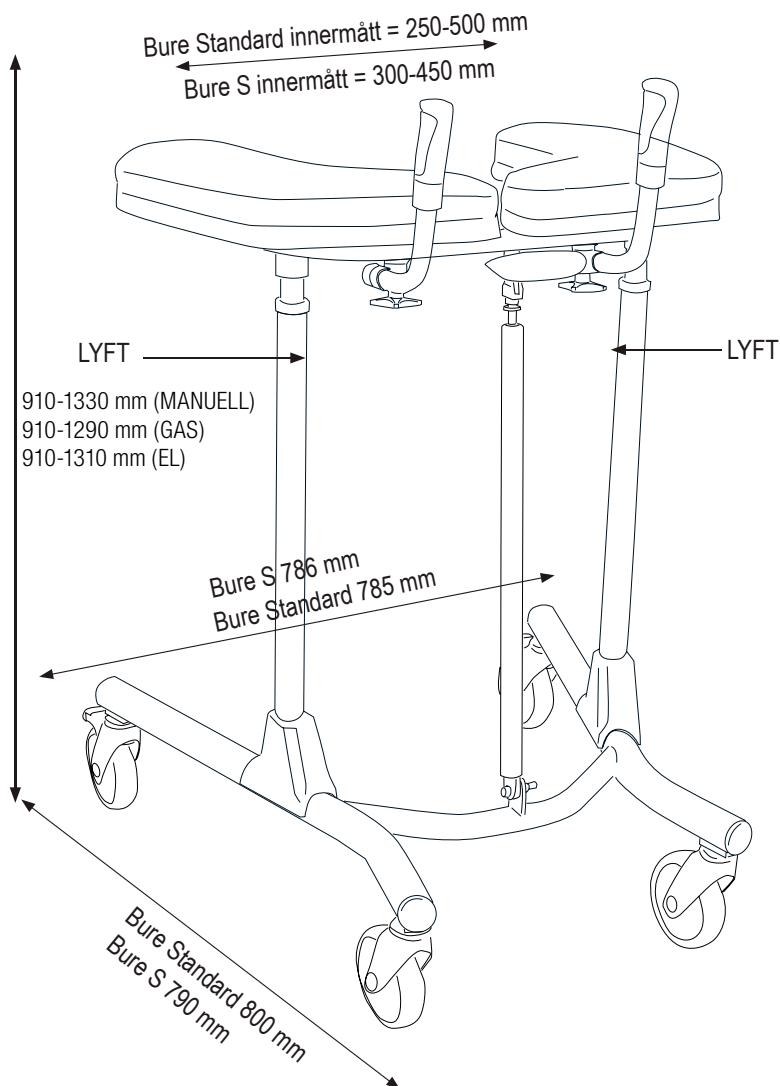

	MANUELL	GAS	EL
Produktens vikt	13 kg	15 kg	21 kg
Produktens höjd	910–1330 mm	910–1290 mm	910–1310 mm

"LYFT" anger lämpligt grepp vid lyft av gåbordet vid transport.
OBS! Var minst två personer vid lyft.

CE CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.



REHAB DEVELOPMENT AB Vill du veta mer?

Kontakta oss på:
tel 0371-318 00
Gate Rehab Development AB
Isberga Säteri,
333 91 Smålandsstenar
info@gaterd.se
www.gaterd.se



GATE COLLECTION