



# Bure<sup>TM</sup>

## Gåbord

Bure Standard GAS 56-311  
Bure S GAS 56-301

**GATE**

REHAB DEVELOPMENT AB

## Kära Användare

Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du använder Bure Gåbord samt hur det underhålls.

Vi på GATE Rehab Development önskar dig lycka till med din produkt. Hör gärna av dig till oss om du har några kommentarer, frågor eller synpunkter.  
Ring 0371 – 318 00.



### Höjning och sänkning av stativ

Frikoppla gasfjädern genom att föra handtaget uppåt (Gaskolven höjer bordet). Släpp handtaget vid önskad höjd (Gaskolv blockeras).

### Sänkning av stativ

Frikoppla gasfjädern genom att föra handtaget uppåt. Använd din kroppstyngd för att pressa ned stativet. Släpp handtaget vid önskad höjd (Gaskolv blockeras).



**OBS:** Handtaget får ej föras nedåt!  
Risk för att handtaget går sönder




## Justering av handtag

Handtagen justeras till önskad position genom att:  
Ratt lossas, handtagen justeras, ratt låses.



## Höger- och vänsterjustering av armstödsplattor

För optimalt stöd kan armstödsplattorna justeras i sidled: Ratt lossas, armstödsplattans läge justeras, ratt låses.

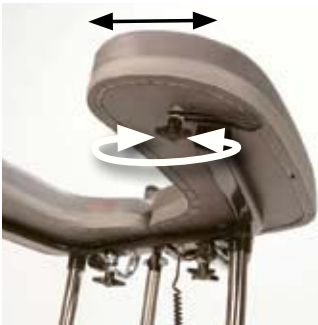

## Låsning av hjul

Hjulen låses genom att fotbromsen trycks nedåt och aktiveras.



## Upplåsning av hjul

Pressa ned den uppstickande delen av bromsen för att lossa bromsen.



# Underhåll

Rekommenderas minst 1 gång/år.

Kontrollera att/om	Åtgärd
<b>Allmänt</b> Bordet känns stumt/glappfritt.  Bordet inte skramlar vid manövrering.  Bordet är plant och alla hjul är i kontakt med underlaget.  Bordet ej är smutsigt.	Rengör med ljum såpalösning/ alkolbaserat rengörningsmedel (ej petroleumprodukter)
<b>Armstödsplattor</b> Armstödsplattor är hela och rena.  Breddning armstödsplattor fungerar.	Rengör och byt om skador finns.  Komplettera ev. låsrattar/brickor.
<b>Handtag</b> Grepp ej är skadade/smutsiga.  Handtagsinställning fungerar.	Rengör med ljum såpalösning (ej petroleumprodukter). Byt handtagsgrepp.  Komplettera ev. låsrattar/brickor.
<b>Höjdjustering</b> Höjning och sänkning fungerar.  Bordet känns stabilt vid maxinställning.  Inget glapp finns mellan vertikalt stativ och bottenstativ.  Klämmor för höjdjustering låser.  Infästning av gaskolv ska vara glappfri.  Reglering av höjdjustering med handtag fungerar. Gaskolven ska löpa mjukt utan vassa ljud.	Byt ev. styrhylsa (i stativ) alt. ändpropp (i kromat rör).  Skruva åt låsskruvar.  Byt klämmor.  Skruva åt resp. infästningsförband, komplettera med skruv/låsmutter.  Byt gaskolv, handtag.
<b>Stativdelar</b> Inga mekaniska skador finns.  Inga skrapmärken finns.  Ändskydd/bottenstaiv sitter på.	Om skador finns - konsultera GATES kundtjänst.  Komplettera med bättringsfärg.  Komplettera med nya ändskydd.
<b>Hjul/broms</b> Hjul rullar lätt /slibanan ej är skadad.  Hjulen är hårt åtdragna i bottenstativ.  Blockeringsbroms fungerar på alla hjul.  Handbroms fungerar.	Rengör alt. byt hjul (OBS! hjulen läses alltid i bottenstativ med kemisk låsning alt låsmutter. Hjulen är kapslade och vi rekommenderar inte att de demonteras. Byt istället ut hela hjulpaketet.  Skruva åt hjulbult - komplettera med låsmutter alt. Kemisk låsning (modellberoende)  Byt hjulpaket.  Justera broms alt komplettera med nya hjul.

## Generella skötselråd

- Torka av gåbord och armstödsplattor vid behov - använd tvållösning/alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.
- Produkten kan rengöras i tvättunnel eller motsvarande. Dock, produkten är ej rostfri vilket gör att rengöring i maskin kan förkorta produktens livslängd.
- Byt ut trasiga delar omedelbart – skall göras av kunnig personal.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

## Tekniska specifikationer

Mått anges för bord med 125 mm hjul.

Standard GAS	S GAS
<b>Art. Nr.</b> 56-311	<b>Art. Nr.</b> 56-301
<b>Bredd</b> 78 cm	<b>Bredd</b> 66 cm
<b>Max brukarvikt</b> 150 kg	<b>Max brukarvikt</b> 150 kg
<b>Längd</b> 80 cm	<b>Längd</b> 79 cm
<b>Höjd</b> 91-129 cm	<b>Höjd</b> 91-129 cm
<b>Armstöd/Innermått</b> 25-50 cm	<b>Armstöd/Innermått</b> 30-45 cm



CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.

Testad och godkänd enligt EN-11199-3/2005



Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 0371-318 00  
Gate Rehab Development AB  
Industrigatan 2 | S-330 21 Reftetele  
info@gaterd.se | www.gaterd.se



DIN PARTNER I VÅRDEN

GATE COLLECTION