



Bima utjämningskiva



Målgrupp, kombinationer och prestanda

Utjämningskivan används i rullstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta. Den används tillsammans med dyna med plan botten utan kompenserung för hängmatteeffekt.

Skivan är tillverkad i ett formstabil material som går att rengöra med tvätt sprit.



Sittdynan är en medicinteknisk produkt. CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.
Eudamed-registreringsnummer / SRN: SE-MF-000001678

ISO-kod: 181006

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel. Dynan uppfyller brandnorm ISO 7176–16.

Utvecklad och tillverkad i Sverige av BIMA PLASTTEKNIK AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se.



Hantering

Avlägsna plastpåsen och iaktta hur skivan ska placeras.

Den kupade sidan ska vara ner. Etiketten med placeringspilarna visar hur skivan ska vändas.

Om utrymme finns i dynans överdrag, placeras utjämningskivan med fördel där.

Detta för att förhindra att dynan glider mot utjämningskivan.



Rengöring och skötsel

Skivan rengörs/ rekonditioneras genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning. Sköljs sedan av med ljummet vatten och lufttorkas. Kläm eller vik inte skivan.



Kvalitetssäkring

För att säkerställa att produkten fungerar på ett korrekt och säkert sätt under sin avsedda livslängd (10år). Livslängden kan variera beroende av användning och skötsel. Dynan anses som förbrukad och ska bytas ut om den är har skador som påverkar funktionen.



Källsortering

Dynbas och överdrag sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.



Försiktighetsåtgärder

1. Utjämningskivan är avsedd för användning i, på marknaden vanligen förekommande rullstolar. För att få en jämn sittyta i rullstolar med hängmattesits.
2. Skivans storlek ska passa underlaget. För liten skiva innebär risk för instabilitet och funktion.
3. Undvik att klämma eller böja skivan vid förvaring.
4. Skivan uppfyller de brandkrav som ställs men kan skadas av eld, cigaretterglöd eller andra brandkällor.
5. Vassa föremål och starka kemikalier kan skada skivan.
6. Mindre förändringar som att runda av kanter, justera skivan för benlängdsskillnad kan normalt göras utan att detta påverkar egenskaperna negativt. Dokumentation ska dock alltid göras.
7. Via vår avvikelserapport i vårt ledningssystem upptäcks brister så att lämpliga åtgärder kan vidtas. Rapportera eventuella olyckor och tillbud som sker i samband med användandet av produkterna till Bima Plastteknik AB. Allvarliga olyckor och tillbud skall även rapporteras till berörd myndighet via ett MIR – formulär www.lakemedelsverket.se



Artikelnummer, mått och max brukarvikt

Utjämningskiva höjd 2,4cm - Max brukarvikt: 150kg								
(cm)	Sitsdjup							
Bredd	35	38	40	43	45	47	50	55
35	01-3535	01-3538	01-3540	01-3543				
37,5	01-3735	01-3738	01-3740	01-3743	01-3745	01-3747	01-3750	
40	01-4035	01-4038	01-4040	01-4043	01-4045	01-4047	01-4050	
42,5		01-4238	01-4240	01-4243	01-4245	01-4247	01-4250	
45		01-4538	01-4540	01-4543	01-4545	01-4547	01-4550	
47,5		01-4738	01-4740	01-4743	01-4745	01-4747	01-4750	
50		01-5038	01-5040	01-5043	01-5045	01-5047	01-5050	
52,5			01-5240	01-5243	01-5345	01-5247	01-5250	
55			01-5540	01-5543	01-5545	01-5547	01-5550	01-5555
57,5			01-5740	01-5743	01-5745	01-5747	01-5750	01-5755
60					01-6045	01-6047	01-6050	01-6055

Utjämningskiva höjd 1,5cm - Max brukarvikt: 150kg								
(cm)	Sitsdjup							
Bredd	35	38	40	43	45	47	50	55
35	01-3535-2	01-3538-2	01-3540-2	01-3543-2				
37,5	01-3735-2	01-3738-2	01-3740-2	01-3743-2	01-3745-2	01-3747-2	01-3750-2	
40	01-4035-2	01-4038-2	01-4040-2	01-4043-2	01-4045-2	01-4047-2	01-4050-2	
42,5		01-4238-2	01-4240-2	01-4243-2	01-4245-2	01-4247-2	01-4250-2	
45		01-4538-2	01-4540-2	01-4543-2	01-4545-2	01-4547-2	01-4550-2	
47,5		01-4738-2	01-4740-2	01-4743-2	01-4745-2	01-4747-2	01-4750-2	
50		01-5038-2	01-5040-2	01-5043-2	01-5045-2	01-5047-2	01-5050-2	
52,5			01-5240-2	01-5243-2	01-5345-2	01-5247-2	01-5250-2	
55			01-5540-2	01-5543-2	01-5545-2	01-5547-2	01-5550-2	01-5555-2
57,5			01-5740-2	01-5743-2	01-5745-2	01-5747-2	01-5750-2	01-5755-2
60					01-6045-2	01-6047-2	01-6050-2	01-6055-2