



Bima conform



Målgrupp, kombinationer och prestanda

För brukare som sitter större delen av dagen, kan inte aktivt ändra läge/position i sittandet och har medelhög risk för trycksår. Brukaren behöver stabilitet för att behålla ett funktionellt sittande.

Dynan är avsedd för användning i, på marknaden vanligen förekommande rullstolar med plan- och hängmattesits.

Tryckavlastande sittdyna med viskoelastiskt Confor®Foam som formar sig efter brukaren och skapar en sittgrop. Materialet i sittgropen fördelar trycket så att sittbensknölar och svanskota avlastas. Dynan har ett fastare material i främre delen av dynan för att fördela mer tryck mot lårbenen och avlasta trycket i sittgropen.



Sittdynan är en medicinteknisk produkt. CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.

Eudamed-registreringsnummer / SRN: SE-MF-000001678.

ISO-kod: 043303 Sittdynor och underlägg för trycksårsprevention.

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel. Dynan uppfyller brandnorm ISO 7176-16.

Utvecklad och tillverkad i Sverige av BIMA PLASTTEKNIK AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se.



Hantering



Kontrollera att förpackningen är hel och fri från skador.

- Avlägsna plastpåsen och notera den vita etiketten på dynans undersida. Denna sida ska vara ner och pilen visar vad som är bak.
- Den svarta etiketten med gul text "BAK" visar vad som är bak på dynan.

Handtaget ska vara framåt. Den räfflade antiglidytan ska vara neråt.



Flytta inte dynan med hjälp av dess handtag när brukaren sitter på den.



Rengöring och skötsel

Bima conform kräver ingen inställning eller service. Rengöring för en god hygien är det enda som behövs. Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning.

Den kan också rengöras med ånga. Dynbasen torkas i ett varmt väl ventilerat utrymme (torkskåp).

Överdraget tvättas i maskin 60°C med stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling alternativt dropptorkas i torkskåp. Var noga med att överdraget monteras enligt märkningarna.

Se till att "peta ut" alla hörn och att överdraget passar bra på dynbasen.

Dynan förvaras i torrt, gärna i rums tempererat utrymme. Kläm eller vik inte dynan.



Kvalitetssäkring

För att säkerställa att dynan fungerar på ett korrekt och säkert sätt under sin avsedda livslängd (5år).

Kontrollera dynbasens yta som ska vara utan sprickor och sättningar. Överdraget ska vara intakt.

Gropar/ sättningar under sittbenen tyder på att dynan är förbrukad och ska bytas ut. Livslängden kan variera beroende av användning och skötsel.



Extra/ alternativa överdrag

För att beställa extra överdrag ange Ö+ artikelnummer till exempel Ö54-4043-K. Och för att beställa en Inkontinenshätta ange INKO+ artikelnummer till exempel INKO54-4043-K. För att beställa Bima conform med ett heltäckande inkontinensöverdrag med en hygiendragkedja ange art.nr-5 t.ex. 54-4043-K-5.



Källsortering

Dynbas och överdrag sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.



Försiktighetsåtgärder

1. Dynan är avsedd till att användas i rullstolar.
2. Dynans storlek ska passa rullstolens sits.
3. När dynan inte används ska den förvaras i ett torrt utrymme, gärna i rumstemperatur.
4. Undvik att klämma eller böja dynan vid förvaring.
5. Använd inte dynan i bilsäte då risk för underglidning finns vid hastig inbromsning.
6. Dynan uppfyller de brandkrav som ställs men kan skadas av eld, cigaretglöd eller andra brandkällor.
7. Undvik att utsätta dynan för regn och dagg. Vassa föremål och starka kemikalier kan också skada dynan.
8. Mindre förändringar som att runda av kanter, justera dynan för benlängdsskillnad kan normalt göras utan att det påverkar egenskaperna negativt. Dokumentation ska dock alltid göras.
9. Via vår avvikelserapport i vårt ledningssystem upptäcks brister så att lämpliga åtgärder kan vidtas. Rapportera eventuella olyckor och tillbud som sker i samband med användandet av produkterna till Bima Plastteknik AB. Allvarliga olyckor och tillbud skall även rapporteras till berörd myndighet via ett MIR – formulär www.lakemedelsverket.se



Artikelnummer, mått och max brukarvikt

Bima conform		Kupad undersida -K				Plan undersida -P			C – Storlek för barn		
(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd ^{tot} där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd ^{tot} = Sitsdjup på mitten							Dynans höjd (cm)	Max vikt (kg)	
Bredd	35/38	38/41	40/43	43/46	45/48	47/50	50/53	55/58			
36	54-3635-K	54-3638-K	54-3640-K	54-3643-K						9	130
38	54-3835-K	54-3838-K	54-3840-K	54-3843-K	54-3845-K	54-3847-K	54-3850-K			9	130
40	54-4035-K	54-4038-K	54-4040-K	54-4043-K	54-4045-K	54-4047-K	54-4050-K			9	130
42		54-4238-K	54-4240-K	54-4243-K	54-4245-K	54-4247-K	54-4250-K	54-4255-K		9	130
44		54-4438-K	54-4440-K	54-4443-K	54-4445-K	54-4447-K	54-4450-K	54-4455-K		9	130
46		54-4638-K	54-4640-K	54-4643-K	54-4645-K	54-4647-K	54-4650-K	54-4655-K		9	130
48		54-4838-K	54-4840-K	54-4843-K	54-4845-K	54-4847-K	54-4850-K	54-4855-K		9	130
50		54-5038-K	54-5040-K	54-5043-K	54-5045-K	54-5047-K	54-5050-K	54-5055-K		9	150
52			54-5240-K	54-5243-K	54-5245-K	54-5247-K	54-5250-K	54-5255-K		9	150
54			54-5440-K	54-5443-K	54-5445-K	54-5447-K	54-5450-K	54-5455-K		9	150
56			54-5640-K	54-5643-K	54-5645-K	54-5647-K	54-5650-K	54-5655-K		9	150
58				54-5843-K	54-5845-K	54-5847-K	54-5850-K	54-5855-K		9	150
60					54-6045-K	54-6047-K	54-6050-K	54-6055-K		9	150
36	54-3635-P	54-3638-P	54-3640-P	54-3643-P						8	130
38	54-3835-P	54-3838-P	54-3840-P	54-3843-P	54-3845-P	54-3847-P	54-3850-P			8	130
40	54-4035-P	54-4038-P	54-4040-P	54-4043-P	54-4045-P	54-4047-P	54-4050-P			8	130
42		54-4238-P	54-4240-P	54-4243-P	54-4245-P	54-4247-P	54-4250-P	54-4255-P		8	130
44		54-4438-P	54-4440-P	54-4443-P	54-4445-P	54-4447-P	54-4450-P	54-4455-P		8	130
46		54-4638-P	54-4640-P	54-4643-P	54-4645-P	54-4647-P	54-4650-P	54-4655-K		8	130
48		54-4838-P	54-4840-P	54-4843-P	54-4845-P	54-4847-P	54-4850-P	54-4855-P		8	130
50		54-5038-P	54-5040-P	54-5043-P	54-5045-P	54-5047-P	54-5050-P	54-5055-P		8	150
52			54-5240-P	54-5243-P	54-5245-P	54-5247-P	54-5250-P	54-5255-P		8	150
54			54-5440-P	54-5443-P	54-5445-P	54-5447-P	54-5450-P	54-5455-P		8	150
56			54-5640-P	54-5643-P	54-5645-P	54-5647-P	54-5650-P	54-5655-P		8	150
58				54-5843-P	54-5845-P	54-5847-P	54-5850-P	54-5855-P		8	150
60					54-6045-P	54-6047-P	54-6050-P	54-6055-P		8	150
Bredd	20/23	25/28	27/30	30/33	33/36	35/38	40/43	43/46			
20	C54-2022-K	C54-2025-K	C54-2027-K							7	40
22	C54-2222-K	C54-2225-K	C54-2227-K							7	45
24		C54-2425-K	C54-2427-K	C54-2430-K						7	50
26		C54-2625-K	C54-2627-K	C54-2630-K	C54-2632-K					7	55
28		C54-2825-K	C54-2827-K	C54-2830-K	C54-2832-K	C54-2835-K				7	60
30			C54-3027-K	C54-3030-K	C54-3032-K	C54-3035-K	C54-3038-K			7	65
32				C54-3230-K	C54-3232-K	C54-3235-K	C54-3238-K	C54-3240-K		7	70
35					C54-3532-K	C54-3535-K	C54-3538-K	C54-3540-K		7	70
20	C54-2022-P	C54-2025-P	C54-2027-P							6	40
22	C54-2222-P	C54-2225-P	C54-2227-P							6	45
24		C54-2425-P	C54-2427-P	C54-2430-P						6	50
26		C54-2625-P	C54-2627-P	C54-2630-P	C54-2632-P					6	55
28		C54-2825-P	C54-2827-P	C54-2830-P	C54-2832-P	C54-2835-P				6	60
30			C54-3027-P	C54-3030-P	C54-3032-P	C54-3035-P	C54-3038-P			6	65
32				C54-3230-P	C54-3232-P	C54-3235-P	C54-3238-P	C54-3240-P		6	70
35					C54-3532-P	C54-3535-P	C54-3538-P	C54-3540-P		6	70