



Bima XXL



Målgrupp, kombinationer och prestanda

Stabil och tryckavlastande rullstolsdyna, anpassad för stora och tunga personer som är beroende av rullstol för sina förflyttningar och har svårt att variera sittandet. Bima XXL är förebyggande mot sår. Den används även när det finns risk för trycksår.

Avsedd för användning i, på marknaden vanligen förekommande rullstolar med plan- och hängmattesits. Kupad bottenform används i rullstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta. Plan bottenform används när rullstolen har en fastare och stadigare sits som inte behöver kompenseras med utjämning.



Sittdynan är en medicinteknisk produkt. CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.

Eudamed-registreringsnummer / SRN: SE-MF-000001678.

ISO-kod: 043303 Tryckavlastande sittdyna. Dynans vikt: 1,9kg - 50x45/48x10cm.

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Utvecklad och tillverkad i Sverige av BIMA PLASTTEKNIK AB.

Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon: +46 340-419 50 eller via e-post: info@bimasweden.se.



Hantering



Förpackningen innehåller en färdigklädd dyna samt en extra inkontinenshätta.

Kontrollera att förpackningen är hel och fri från skador
Avlägsna plastpåsen och notera den vita etiketten på dynans undersida. Denna sida ska vara ner och pilen visar vad som är bak.

Den svarta etiketten med gul text "BAK" visar vad som är bak på dynan. Handtaget ska vara framåt och den räfflade antiglidytan ska vara neråt.



Flytta inte dynan med hjälp av dess handtag när brukaren sitter på den.



Rengöring och skötsel

Bima XXL kräver ingen inställning eller service. Rengöring för en god hygien är det enda som behövs. Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning. Den kan också rengöras med ånga. Dynbasen torkas i ett varmt väl ventilerat utrymme (torkskåp).

Överdraget tvättas i maskin 60°C med stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling alternativt droptorkas i torkskåp. Var noga med att överdraget monteras enligt märkningarna. Se till att "peta ut" alla hörn och att överdraget passar bra på dynbasen.

Dynan förvaras i torrt, gärna i rums tempererat utrymme. Kläm eller vik inte dynan.



Kvalitetssäkring

För att säkerställa att dynan fungerar på ett korrekt och säkert sätt under sin avsedda livslängd (5år). Livslängden kan variera beroende av användning och skötsel. Överdraget ska vara intakt. Kontrollera dynbasens yta som ska vara utan sprickor, skador och sättningar. Gropar/sättningar under sittbenen tyder på att dynan är förbrukad och ska bytas ut.



Extra/ alternativa överdrag

För att beställa extra överdrag ange Ö+ artikelnummer t.ex. Ö90-6050-K. Och för att beställa en Inkontinenshätta ange INKO+ artikelnummer t.ex. INKO90-6050-K.



Källsortering

Dynbas och överdrag sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.



Försiktighetsåtgärder

1. Dynan är avsedd till att användas i rullstolar.
2. Dynans storlek ska passa rullstolens sits.
3. När dynan inte används ska den förvaras i ett torrt utrymme, gärna i rumstemperatur.
4. Undvik att klämma eller böja dynan vid förvaring.
5. Använd inte dynan i bilsäte då risk för underglidning finns vid hastig inbromsning.
6. Dynan uppfyller de brandkrav som ställs men kan skadas av eld, cigaretterglöd eller andra brandkällor.
7. Undvik att utsätta dynan för regn och dagg. Vassa föremål och starka kemikalier kan också skada dynan.
8. Mindre förändringar som att runda av kanter, justera dynan för benlängdsskillnad kan normalt göras utan att det påverkar egenskaperna negativt. Dokumentation ska dock alltid göras.
9. Via vår avvikelserapport i vårt ledningssystem upptäcks brister så att lämpliga åtgärder kan vidtas. Rapportera eventuella olyckor och tillbud som sker i samband med användandet av produkterna till Bima Plastteknik AB. Allvarliga olyckor och tillbud skall även rapporteras till berörd myndighet via ett MIR – formulär www.lakemedelsverket.se



Artikelnummer, mått och max brukarvikt

Bima XXL		-K = Kupad botten				-P = Plan botten				Höjd (cm)	Max vikt (kg)
(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd ^{tot} där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd ^{tot} = Sitsdjup på mitten									
Bredd	43/46	45/48	47/50	50/53	55/58	60/63	65/68	CONFOR®Foam			
47,5	90-4743-K	90-4745-K	90-4747-K	90-4750-K	90-4755-K			42 rosa	10	180	
50	90-5043-K	90-5045-K	90-5047-K	90-5050-K	90-5055-K			42 rosa	10	180	
52,5	90-5243-K	90-5245-K	90-5247-K	90-5250-K	90-5255-K	90-5260-K		42 rosa	10	180	
55	90-5543-K	90-5545-K	90-5547-K	90-5550-K	90-5555-K	90-5560-K		45 blå	10	250	
57,5	90-5743-K	90-5745-K	90-5747-K	90-5750-K	90-5755-K	90-5760-K		45 blå	10	250	
60		90-6045-K	90-6047-K	90-6050-K	90-6055-K	90-6060-K		45 blå	10	250	
62,5			90-6247-K	90-6250-K	90-6255-K	90-6260-K		45 blå	10	250	
65				90-6550-K	90-6555-K	90-6560-K	90-6565-K	45 blå	10	250	
67,5				90-6750-K	90-6755-K	90-6760-K	90-6765-K	47 grön	10	300	
70				90-7050-K	90-7055-K	90-7060-K	90-7065-K	47 grön	10	300	
75				90-7550-K	90-7555-K	90-7560-K	90-7565-K	47 grön	10	300	
80				90-8050-K	90-8055-K	90-8060-K	90-8065-K	47 grön	10	300	
47,5	90-4743-P	90-4745-P	90-4747-P	90-4750-P	90-4755-P			42 rosa	10	180	
50	90-5043-P	90-5045-P	90-5047-P	90-5050-P	90-5055-P			42 rosa	10	180	
52,5	90-5243-P	90-5245-P	90-5247-P	90-5250-P	90-5255-P	90-5260-P		42 rosa	10	180	
55	90-5543-P	90-5545-P	90-5547-P	90-5550-P	90-5555-P	90-5560-P		45 blå	10	250	
57,5	90-5743-P	90-5745-P	90-5747-P	90-5750-P	90-5755-P	90-5760-P		45 blå	10	250	
60		90-6045-P	90-6047-P	90-6050-P	90-6055-P	90-6060-P		45 blå	10	250	
62,5			90-6247-P	90-6250-P	90-6255-P	90-6260-P		45 blå	10	250	
65				90-6550-P	90-6555-P	90-6560-P	90-6565-P	45 blå	10	250	
67,5				90-6750-P	90-6755-P	90-6760-P	90-6765-P	47 grön	10	300	
70				90-7050-P	90-7055-P	90-7060-P	90-7065-P	47 grön	10	300	
75				90-7550-P	90-7555-P	90-7560-P	90-7565-P	47 grön	10	300	
80				90-8050-P	90-8055-P	90-8060-P	90-8065-P	47 grön	10	300	