



SKEPPSHULT

# Rekonditioneringsmanual

Skeppshults trehjulingar kan med fördel användas av flera brukare efter varandra. Manualen är i första hand riktad till personal som arbetar med rekonditionering av trehjulinga cyklar. För övrig information se instruktionsbok och brukarmanual som följde med cykeln. Kan även läsas/ladda ner på vår hemsida [www.skeppshult.se](http://www.skeppshult.se).

## RENGÖRING

- Rengör cykeln stående på sina hjul.  
Använd mild tvättmedel och svamp, torka av/rengör cykeln med en fuktig trasa.  
Diskmedel och diskborste går också bra.
- För att undvika att vatten tränger in i nav, vevparti eller andra lager skall aldrig högtryckstvätt användas.
- Skölj försiktigt av cykeln efter rengöring.
- Torka cykeln efteråt med en torr trasa och efterbehandla gärna kromade detaljer med kromglans eller liknande.  
Vaxning av ram och gaffel kan göras vid samma tillfälle.
- Bättra på eventuella lackskador med bättringsfärg för att undvika rostangrepp.



Ta bort påklitrade etiketter men behåll Skeppshults egna dekaler, även silverdekalen med EAN-koden på.

## EFTER RENGÖRING

### Smörjning

- Smörj rörliga delar som t.ex kedja, växlar och pedaler.
- Passa på att justera kedjan. Se instruktionsbok.

### Kontrollera och byt ut slitna delar

- Delar som är skadade, skeva, har sprickor eller är rostiga skall bytas ut.  
Skeppshultscykelns breda sortiment med reservdelar ger din cykel extra lång livslängd och kan på så vis enklare återanvändas av fler brukare.

### Kontrollera

- Lufttryck i samtliga däck.
- Känn igen skruvar och muttrar så att de är åtdragna och inte skadade.
- Alla funktioner
  - Växlar, bromsar, lager, styrlager, vevlager, pedaler.