

Rekonditioneringsanvisning

HTS



Minicrosser AB
Medemagruppen

Ver. 2020-12-10

	Beskrivning	Utfört datum	Sign
1	Kontrollera hjulen så att de sitter ordentligt och inte är defekta. Avlägsna eventuella restprodukter. Vid behov dra åt skruvar och byt ut defekta hjul.		
2	Kontrollera att bromsarna fungerar och låser ordentligt. Rengör och avlägsna eventuella restprodukter. Vid behov byt ut hjul med broms.		
3	Kontrollera samtliga rörliga delar och efterdra vid behov. Rengör och avlägsna eventuella restprodukter. Vid behov byt ut eventuella defekta delar.		
4	Kontrollera att eventuella dynor är i dugligt skick. Ta av dynorna och rengör med tvålatten eller mildt desinfektionsmedel. Byt ut dynorna vid behov.		
5	Klädsel så som bälten, väst och liknande kan tvättas i tvättmaskin. Generellt sett rekommenderar vi att alla avtagbara tyger tvättas i 40°C. Vid kraftig nedsmutsning eller rekonditionering kan de tvättas i högst 60°C. Förslut karborrbanden innan tvätt. OBS! Går ej att stryka.		
6	Underredet kan rengöras i diskabinett upp till 85° i cirka 3 minuter. Produkten skall stå fixerad och placeras upprätt. För optimal rengöring demontera produkten om möjligt. (För HTS: Koppla bort sits från underrede. Dela rygg och sits. Avlägsna eventuella armstöd).		
	Utfört av:		

Detta är en allmän beskrivning av de punkter som bör genomgå vid rekonditionering. Produktens funktion och duglighet skall bedömas och eventuella brister avhjälpas innan produkten lämnas ut till ny användning.

Producenten kan inte ställas till svars för felaktiga underhålls- eller reparationsåtgärder. Vid eventuell reparation skall original reservdelar alltid används för att garanti skall vara gällande.