



Minicrosser AB

Bultgatan 28
S-442 40
Kungälv


Telefon: (+46) 303 245 200
Fax: (+46) 303 245 228

Innehåll

Nackstöd Ergo 2	4
Backspegel.....	5
X-Joy - backspegel	6
Amputationsbenstöd på Ergo 2	7
Kryckkäpphållare dubbel.....	9
Rollatorhållare Minicrosser M/X.....	11
Rollatorhållare Minicrosser M/X.....	14
Rullstolshållare manuell MC M/X	17
Syrgashållare Universal MC	20
Höftbälte Ergo2.....	23
Förhöjd fotplatta-justerbar MC.....	25
Nödstopp/fjärrstopp - trådlöst (MC).....	27
Höger och vänster vridgasreglage	29

Nackstöd Ergo 2

Art. nr.: 1507-1105

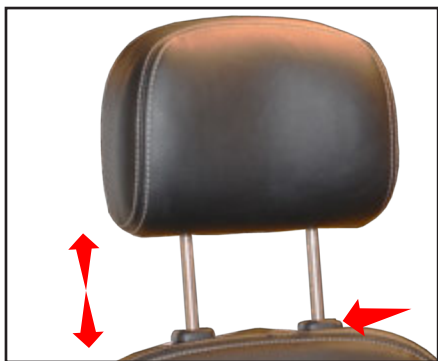

Nackstödsmontering och höjdjustering

Tryck in knappen och nackstödet kan monteras. Samma knapp används för att justera nackstödet upp / ner.



Inställning av nackstöd framåt/bakåt

Nackstödet kan lutas framåt eller bakåt efter behov.

Backspegel

Artikelnummer: 1503-1225 och 1503-1226



Tag gummitätningen av spegelfästet på styret.



Vräng gummi tätningen och klipp bort mittappen.



Sätt tillbaka gummitätningen.



Spegeln skruvas på. Innan den skruvats i botten, skall man hitta en lämplig placering. I den placeringen dras kontramuttern åt.



Kontramutter.




Tryck ned plasthylsan.

1533-2107

X-Joy - backspegel

Artikelnummer: 1506-1859

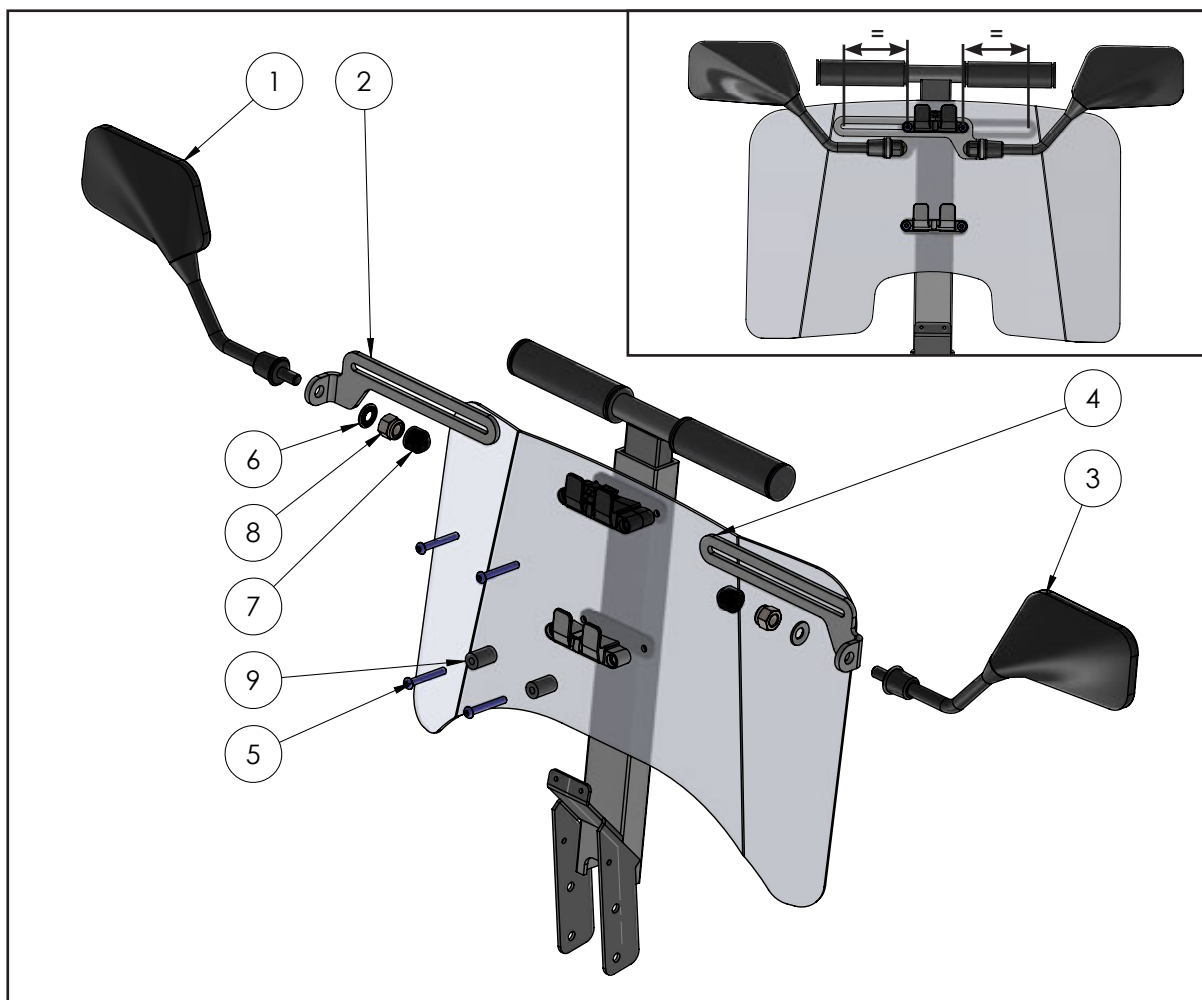

Pos	Varenr.	Beskrivning	Antal
1	1503-1225	Spegel för styrmontage, höger (TW)	1
2	1503-1226	Spegel för styrmontage, vänster (TW)	1
3	1506-1465	Justerbart beslag för backspegel, höger	1
4	1506-1466	Justerbart beslag för backspegel, vänster	1
5	8031-1202	06x45, RH skruv A2 (SB)	4
6	8031-1250	10, låsbricka A2 (SB)	2
7	8031-1168	10, Skyddskåpa M10 svart NV17	2
8	8031-1086	10, Låsmutter 8. FZB (M10x1,25) DIN 985 (SB)	2
9	1506-1336	Distans svart (63-0240)	2

1533-2106

Amputationsbenstöd på Ergo 2

Art.nr: 1507-1421




Amputationsbenstöd. Lossa skruvarna lite, så skenan kan föras in i sätets C-skena.



Kör den så långt in du önskar.



Justera vinkeln på amputationsbenstödet: Lossa denna skruv - anpassa vinkeln - dra åt skruven igen.

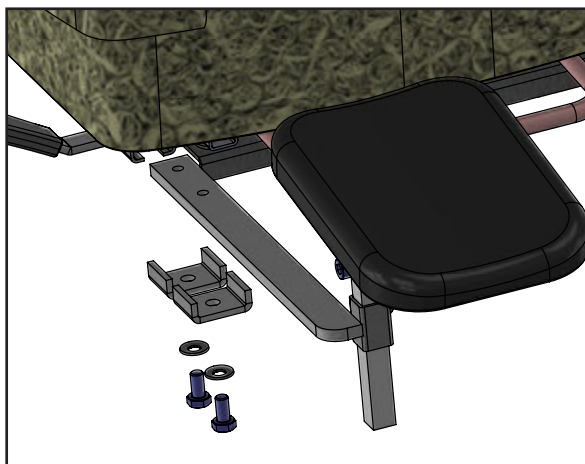

Skenan på amputationsbenstödet förs in i sätets C-skena.





Spänn skruvarna, så att amputationsbenstödet sitter fast.



Justering av höjd på amputationsbenstödet: Lossa denna skruv - höj/sänk till önskad höjd - spänn skruven igen.



Amputationsbenstödet monterat.

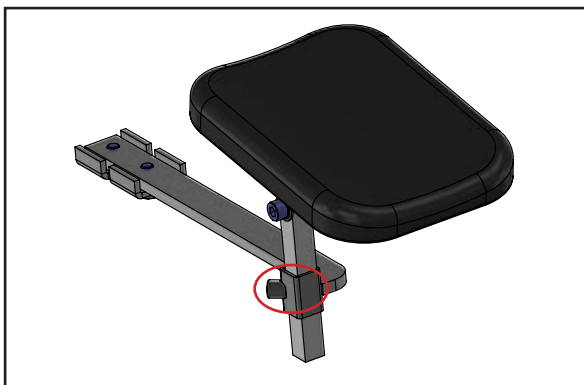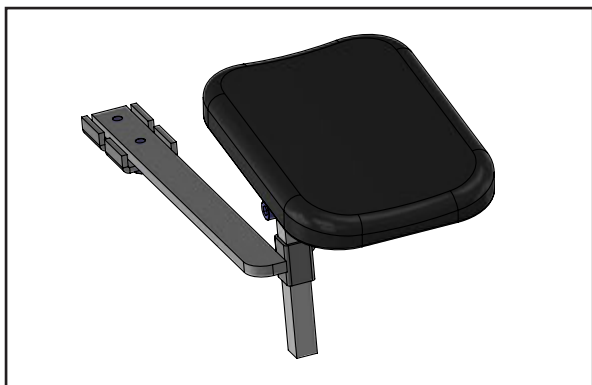

Amputationsbenstödet kan användas på båda sidor. För att byta sida, lossa denna skruv - amputationsbenstödet med stång tas upp. Skenan lossas och vänds över till den andra sidan, och amputationsbenstödet monteras igen.

Kryckkäpphållare dubbel

Art.nr: 1506-1817



C-skena på baksidan av Mini Crosser. Ta bort ändpluggarna i båda ändarna.




Dra ut gummilisten ur C-skenan.




Lösa skruvarna så att det finns plats för C-skena muttrar att skjutas in i C-skena.



Kryckkäpphållaren sätts fast på C-skenan.

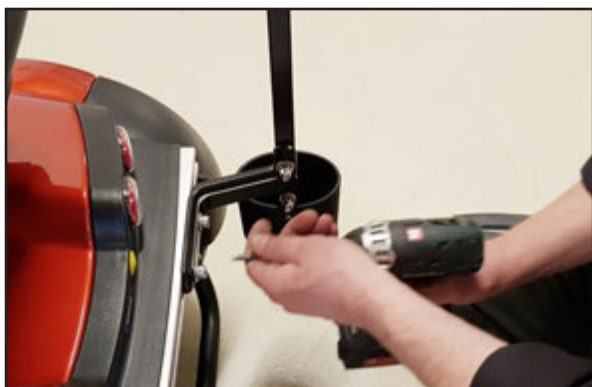


Dra åt skruvarna.

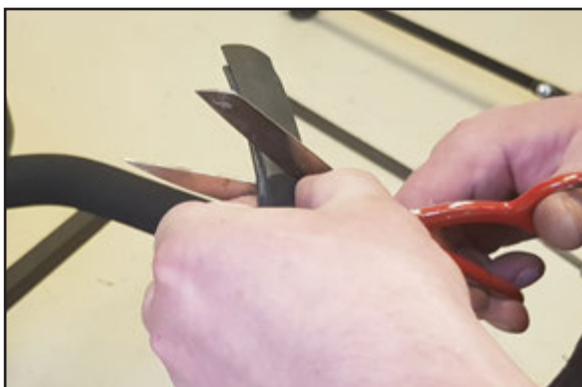

Mät hur långt stycke som ska användas av gummilisten på vardera sidan av kryckkäpphållaren.



Baksidan av gummilisten klipps av i en längd av ca 10 mm i båda ändarna. Detta görs för att få en fin ände.

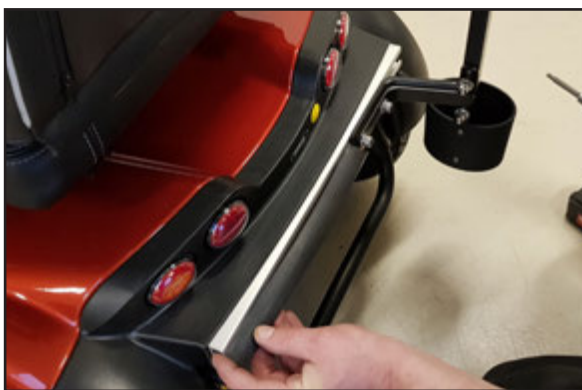

Montera gummilisten i C-skena.



Ändpropparna bankas på igen.



Rollatorhållare Minicrosser M/X


Art nr: 1506-1281 (Legacy/Futura)



C-skena på baksidan av Mini Crosser. Ta bort ändpluggarna i båda ändarna.



Dra ut gummilisten ur C-skenan.

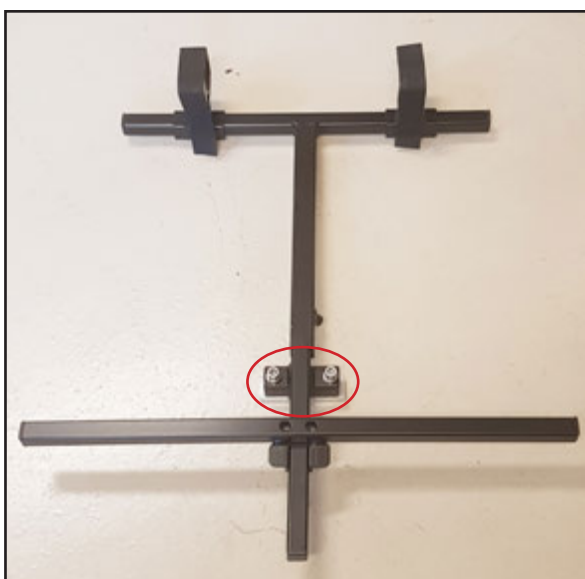


Lossa skruvarna så att det finns plats för C-skena
muttrar att skjutas in i C-skena.



Montera rollatorhållaren.



Skruva fast rollatorhållaren.

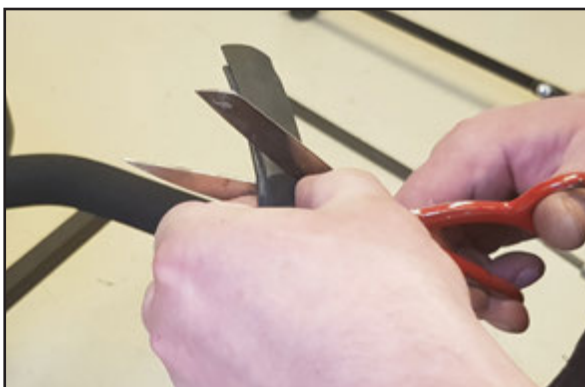

Mät hur långt stycke som ska användas av gummilisten på vardera sidan av rollatorhållaren.




Baksidan av gummilisten klipps av i en längd av ca 10 mm i båda ändarna. Detta görs för att få en fin ände.

Ändpropparna bankas på igen.



Justerbarhet

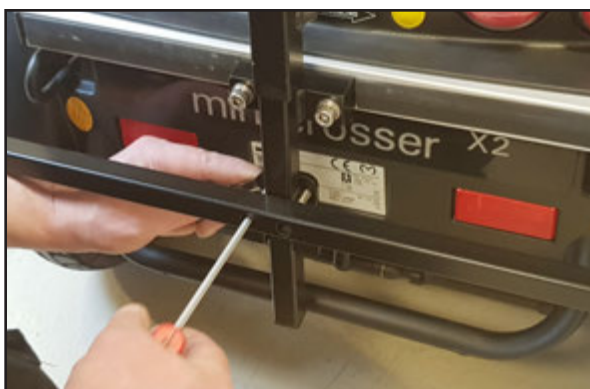

Staget nederst kan justeras upp/ned genom att lossa de två skruvarna - justera till önskad position - dra åt skruvarna igen.



För att justera den översta delen - lossa denna skruv.



Höj eller sänk till önskad höjd - dra åt skruven igen.



Hållaren är försedd med velcro så rollatorn inte ramlar av under körning.

Rollatorhållare Minicrosser M/X

Art.nr: 1056-1630 (Troja,Volaris,KarlOscar)



C-skena på baksidan av Mini Crosser. Ta bort ändpluggarna i båda ändarna.



Dra ut gummilisten ur C-skenan.




Lossa skruvarna så det är plats för att C-skene muttrarna kan skjutas in i C-skenan.



Montera Rollatorhållaren i C-skenan.



Skruva fast rollatorhållaren.

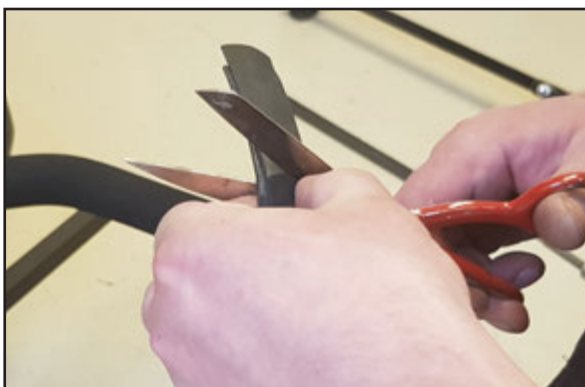

Mät hur långt stycke som ska användas av gummilisten på vardera sidan av rollatorhållaren.




Baksidan av gummilisten klipps av i en längd av ca 10 mm i båda ändarna. Detta görs för att få en fin ände.

Ändpropparna bankas på igen.



Justerbarhet

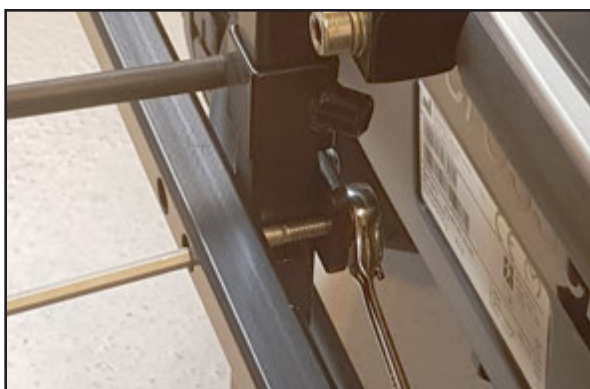

Staget nederst kan justeras upp/ned genom att lossa de två skruvarna - justera till önskad position - dra åt skruvarna igen.



För att justera den översta delen - lossa denna skruv.



Höj eller sänk till önskad höjd - dra åt skruven igen.



Justering av nedersta staget: Lossa denna skruv - justera till önskad höjd - dra åt igen.



Justering av översta stag:

Lossa skruven på det stad du önskar justera - flytta staget till önskad position - dra åt igen.

Stagen kan flyttas över på andra sidan om centrumröret om man önskar.



Rullstolshållare manuell MC M/X


Art.nr: 1506-1263



C-skena på baksidan av Mini Crosser. Ta bort ändpluggarna i båda ändarna.



Dra ut gummilisten ur C-skenan.

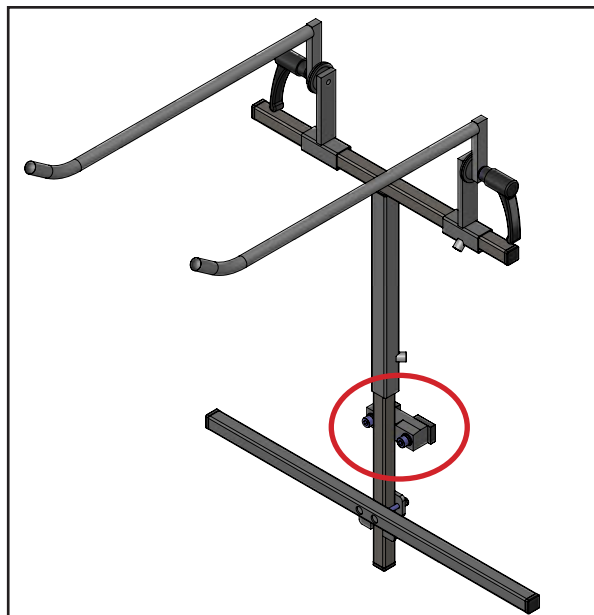


Lossa skruvarna så det är plats för att C-skene muttrarna kan skjutas in i C-skenan.



Montera Rullstolshållaren i C-skenan.



Placera Rullstolshållaren på mitten av C-skenan. Dra åt.

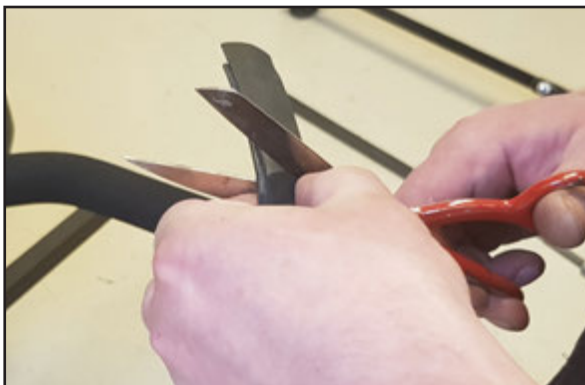

Mät hur långt stycke som ska användas av gummilisten på vardera sidan av rollatorhållaren.



Baksidan av gummilisten klipps av i en längd av ca 10 mm i båda ändarna. Detta görs för att få en fin ände.

Ändpropparna bankas på igen.



Justerbarhet



Staget nederst kan justeras upp/ned genom att lossa de två skruvarna - justera till önskad position - dra åt skruvarna igen.



För att justera den översta delen - lossa denna skruv.



Använd fingerskruvarna för att fälla ut rullstolshållaren.



Om fingerskruvarna "trögar" efter justering: Dra ut fingerskruven - vrid den nedåt - släpp igen.



Syrgashållare Universal MC

Art.nr: 1506-2097



C-skena på baksidan av Mini Crosser. Ta bort ändpluggarna i båda ändarna.



Dra ut gummilisten ur C-skenan.



Syrgashållare universal



Lossa skruvarna så att det finns plats för C-skena muttrar att skjutas in i C-skena.



Syrgashållaren monteras i C-skenan.



Kontrollera att måtten till båda sidor är samma. Så sitter flaskan i mitten.




Spänn skruvarna.



Staget nederst kan justeras upp/ned genom att lossa de två skruvarna - justera till önskad position - dra åt skruvarna igen.



Justera för flaskans diameter. Lossa denna skruv - ställ in önskad storlek - dra åt igen.

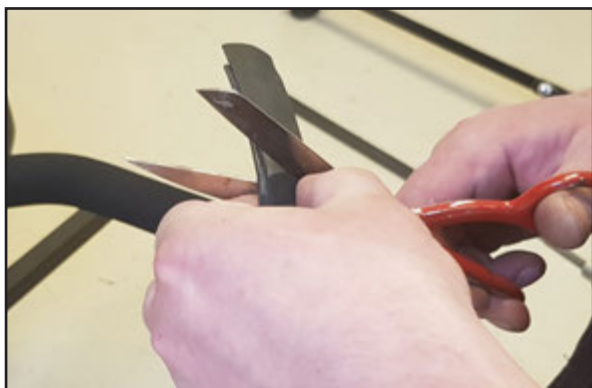

Mät hur långt stycke som ska användas av gummlisten på vardera sidan av syrgashållaren.



Baksidan av gummlisten klipps av i en längd av ca 10 mm i båda ändarna. Detta görs för att få en fin ände.





Montera gummulist och ändrproppar.





Höftbälte Ergo2

Art nr: 1506-1834

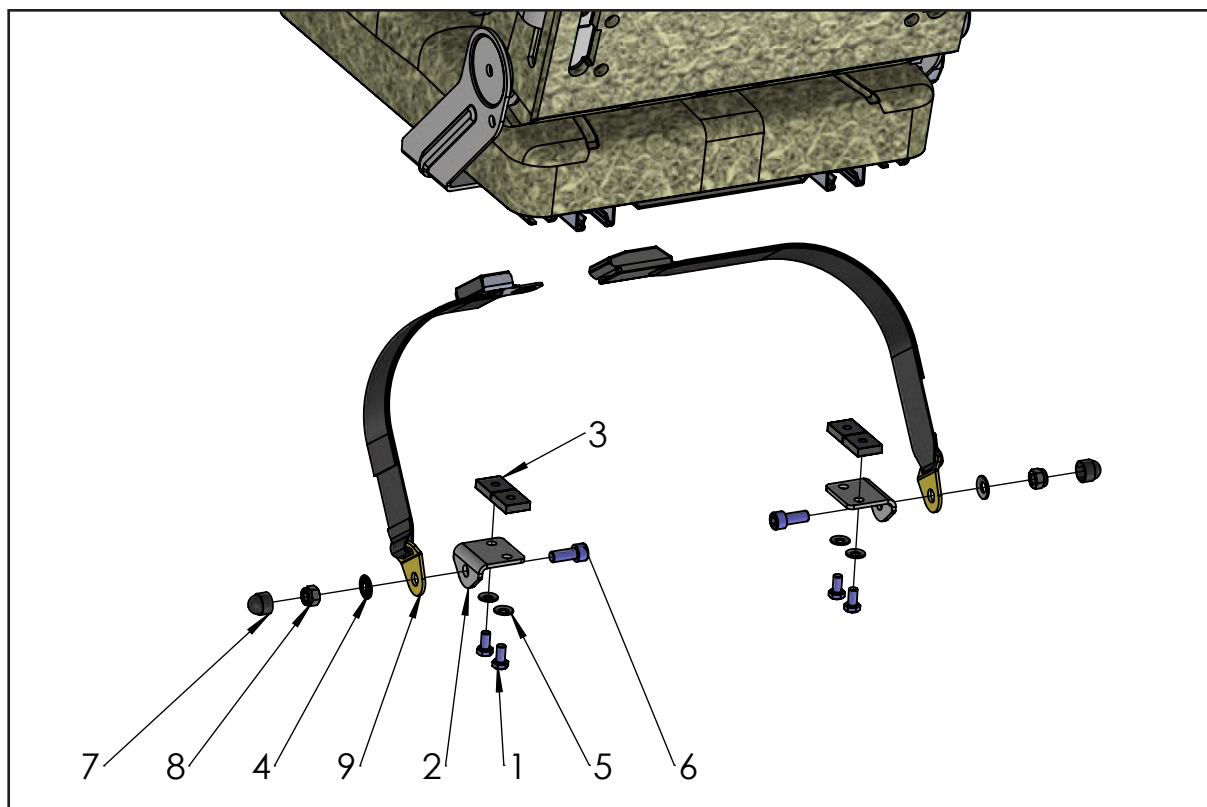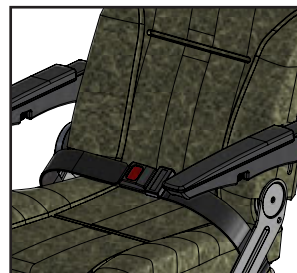

Pos.	Beskrivning	St
1	08x16, Sexkantskruv A2	4
2	Beslag för bälte	2
3	C-skene-mutter	4
4	M10 Låsbricka, A2	2
5	M8 Låsbricka, A2	4
6	10x25, CH Skruv A2, DIN912	2
7	M8, Mutterskydd, svart NV13	2
8	10, Låsmutter FZB, DIN985	2
9	Höftbälte	1

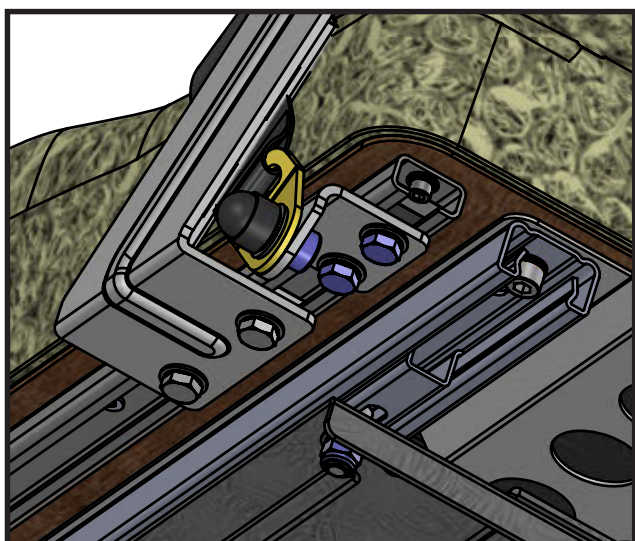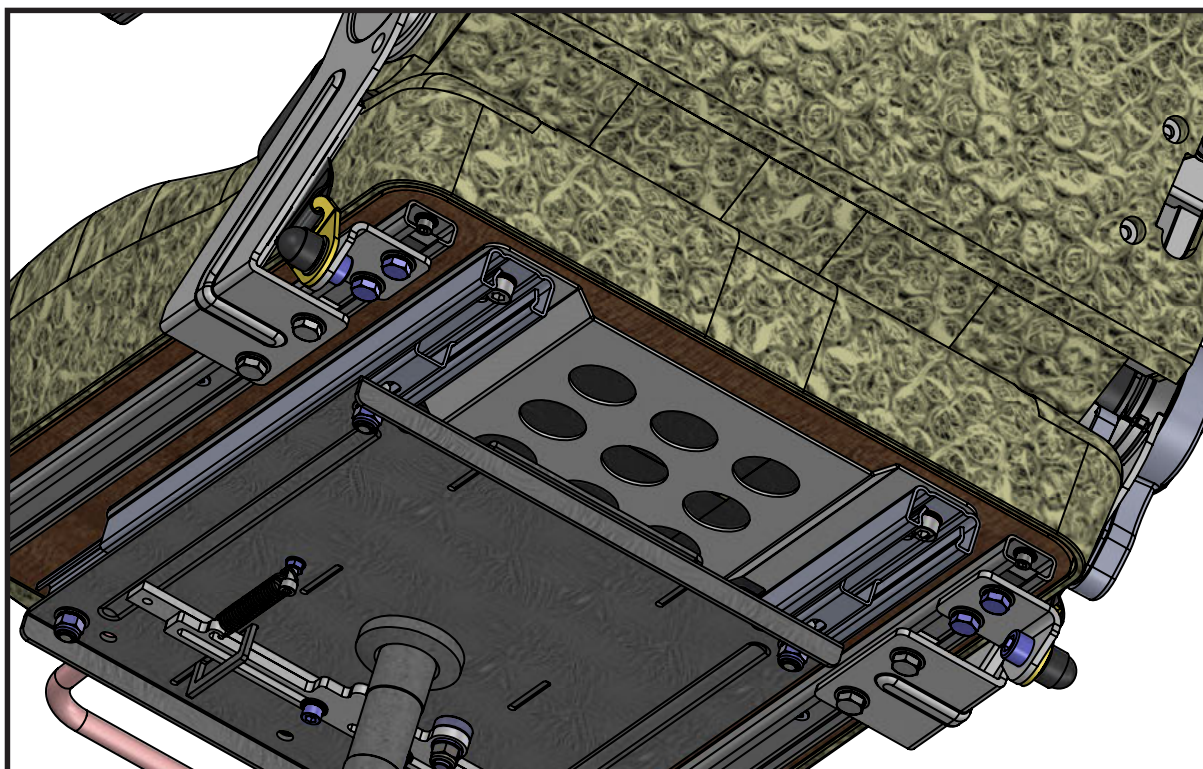

C-skene-muttrarna skjuts in i C-skenan.

Montera beslaget.
Montera därefter bältet.

Förhöjd fotplatta-justerbar MC

Art.nr: 1506-1825



Börja med att lyfta/luta Mini Crossern så mycket att det finns åtkomst till arbete under botten.



Använd en bormaskin till att borra hål i fotplattan, genom de förborrade hålen.



Fäll ut fotplattan genom att lossa de rörliga lederna. Den översta leden justeras genom att använda det medföljande verktyget- en lång insexnyckel.



Montera fotplattan med de medföljande skruvarna.



Under botten används bricka och låsmutter.



Använd den medföljande insexnyckeln för att justera fotplattan i de rörliga lederna.



När alla leder är lossade, kan inställningen göras.




Alla leder spänns i den önskade positionen.



Nödstopp/fjärrstopp - trådlöst (MC)

Art.nr: 1506-1267

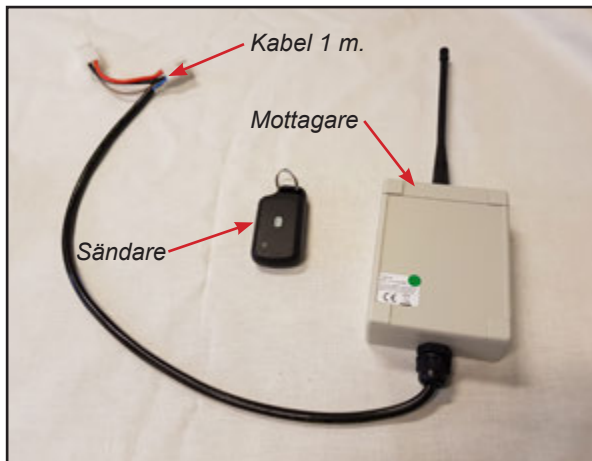


Setet består av:


- Mottagare med 1 meter kabel
- Sändare



Montera av batterikåpan genom att ta bort fingerskruven och dra batterikåpan fram mot styret.

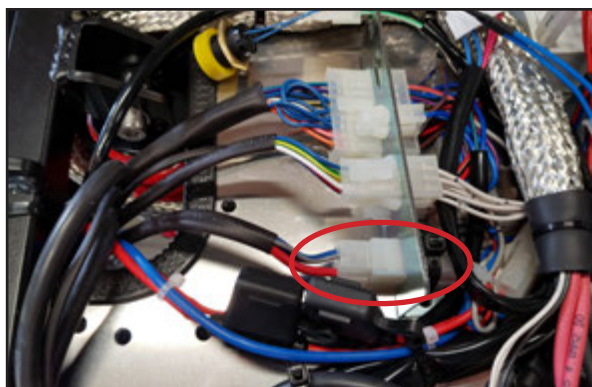

Nödstoppet ansluts på Mini Crosserns -el-platta under batterikåpan. Den markerade kontakten tas ut och nödstoppet monteras imellan.

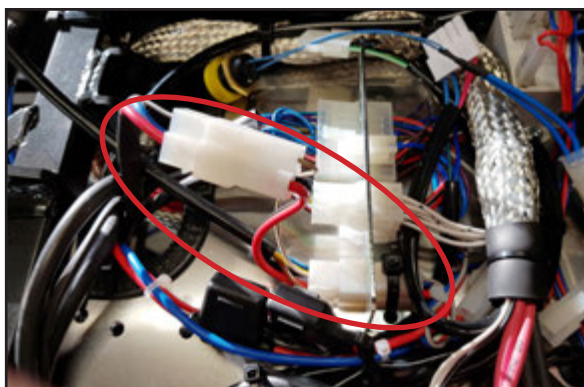

Nödstoppet anslutet.



Mottagaren sätts fast med velcro på änden av ett batteri.



Om Mini Crossern är en HD utgåva är det på grund av extra förstärkning, inte plats att placera den där.



I stället placeras den ovan på el-plattan som visat här.



När man trycker på sändaren stoppar Mini Crossern direkt.

För att få Mini Crossern att köra igen skall nyckeln vridas till 0 och tillbaks till I.



Höger och vänster vridgasreglage

Art. nr.: 1506-1231 / 1506-1233



Montera av plastkåpan.



Ta bort gummipluggen.



Ta bort handtaget.



Montera av potentiometern.



Kontakt och plugg monteras i hålet.




Montera vridgasreglaget på styret.



Dra åt skruvarna.



Anslut drivgasreglaget till den 3-pols-kontakt som standardpotentiometern var ansluten till.

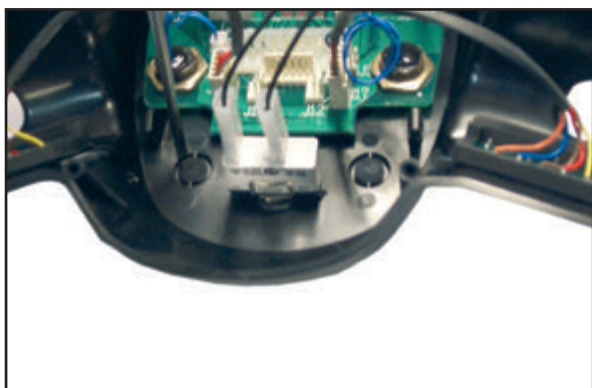


Montera framåt-/bakåtkontakten.



Anslut till kontakt nr 2 på kretskortet. Montera de små crimpsen i kontakten, så att färgerna mittemot varandra matchar.



Programmeringen ändras till "Single-ended" via SP1, SP2 eller dator. Se separat beskrivning för programmering.

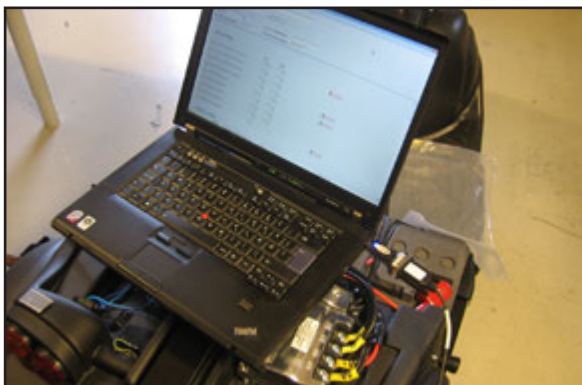




Dra åt skruvarna.



Anslut drivgasreglaget till den 3-pols-kontakt som standardpotentiometern var ansluten till.

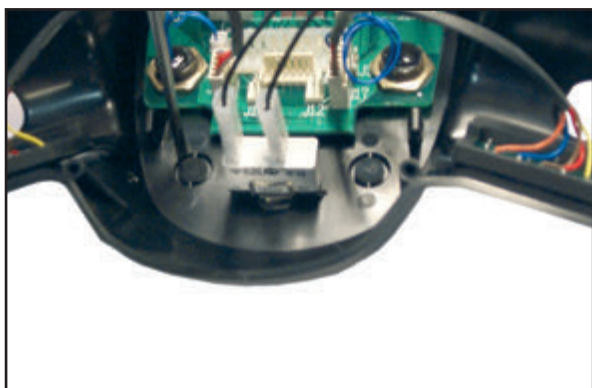

Montera framåt-/bakåtkontakten.



Anslut till kontakt nr 2 på kretskortet. Montera de små crimpsen i kontakten, så att färgerna mittemot varandra matchar.



Programmeringen ändras till "Single-ended" via SP1, SP2 eller dator. Se separat beskrivning för programmering.





medemagruppen