

Röster från våra användare



”När man arbetar som bilmekaniker med gamla bilar är det viktigt att kunna använda båda händerna och prata med andra i verkstaden.”
- José Ramírez Mateos



För mig är det viktigt att fortfarande kunna arbeta med båda händerna.
- María Abaitua

Beställningsinformation	REF	Receptbelagt*
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus: 1 st Provox FreeHands FlexiVoice Light (lätt) + 1 st Provox FreeHands FlexiVoice Medium (medium) + 1 st Provox FreeHands FlexiVoice Strong (stark) + 2 st Arches (Bågar) + 1 del HME Removal Aid (borttagningshjälpmedel) + 30 st Provox FreeHands HME kassetter + 1 bruksanvisning	7757	Receptbelagt
Provox FreeHands FlexiVoice Set (sats): 1 st Provox FreeHands FlexiVoice Light (lätt) + 1 st Provox FreeHands FlexiVoice Medium (medium) + 1 st Provox FreeHands FlexiVoice Strong (stark) + 2 st Arches (Bågar) + 1 st HME Removal Aid (borttagningshjälpmedel) + 1 bruksanvisning	7760	Receptbelagt
Provox FreeHands FlexiVoice Light (lätt): 1 st Provox FreeHands FlexiVoice Light (lätt) + 1 st Arch (båge) + 1 st HME Removal Aid (borttagningshjälpmedel) + 1 bruksanvisning	8161	Receptbelagt
Provox FreeHands FlexiVoice Medium (medium): 1 st Provox FreeHands FlexiVoice Medium (medium) + 1 st Arch (båge) + 1 st HME Removal Aid (borttagningshjälpmedel) + 1 bruksanvisning	8162	Receptbelagt
Provox FreeHands FlexiVoice Strong (stark): 1 st Provox FreeHands FlexiVoice Strong (stark) + 1 st Arch (båge) + 1 st HME Removal Aid (borttagningshjälpmedel) + 1 bruksanvisning	8163	Receptbelagt
Provox FreeHands HME Moist**: 30 st HME kassetter	8220	Receptbelagt
Provox FreeHands HME Flow: 30 st HME kassetter	8221	Receptbelagt

**Provox FreeHands HME Moist är inte tillgänglig i alla länder

*I tillämpliga länder

Belgien:
Atos Medical BVBA / SPRL
Tel: +32 (0)2 218 55 50
info.be@atosmedical.com
www.atosmedical.be

Brasilien:
Atos Medical Ltd
Tel: +55 11 2305 2022
info.br@atosmedical.com
www.atosmedical.br

Frankrike:
Atos Medical S.A.S.
Tel: +33 (0)1 49 08 01 00
info.fr@atosmedical.com
www.atosmedical.fr

Tyskland:
Atos Medical GmbH
Tel: +49 (0)2241 14 93 - 0
info.de@atosmedical.com
www.atosmedical.de

Japan:
Meilleur - Atos Medical Inc.
Tel: +81 (0)3 4589 2830
info.jp@atosmedical.com
www.atosmedical.jp

The Nederländerna:
Atos Medical B.V.
Tel: +31 (0)79 593 5000
info.nl@atosmedical.com
www.atosmedical.nl

Portugal:
Atos Medical Spain S.L.,
Sucursal em Portugal
Tel: +351 212 539 281
info.pt@atosmedical.com
www.atosmedical.pt

Spanien:
Atos Medical Spain S.L.
Tel: +34 93 323 91 95
info.es@atosmedical.com
www.atosmedica.es

Schweiz:
Atos Medical, Switzerland
Tel: +41 (0)44 380 60 90
info.ch@atosmedical.com
www.atosmedical.ch


U.K.:
Platon Medical Ltd
Tel: +44 1323 431 930
platonmedical@mistral.co.uk

USA:
Atos Medical Inc.
Customer Service: +1 800 217 0025
info.us@atosmedical.com
www.atosmedical.us

Huvudkontor:
Atos Medical AB
Kraftgatan 8, P.O. Box 183,
SE-242 22 Hörby, Sverige
Tel: +46 (0)415 198 00
Fax: +46 (0)415 198 98
info@atosmedical.com
www.atosmedical.com

©Atos Medical AB, 201410A, REF 78835V

PROVOX® FreeHands FlexiVoice™

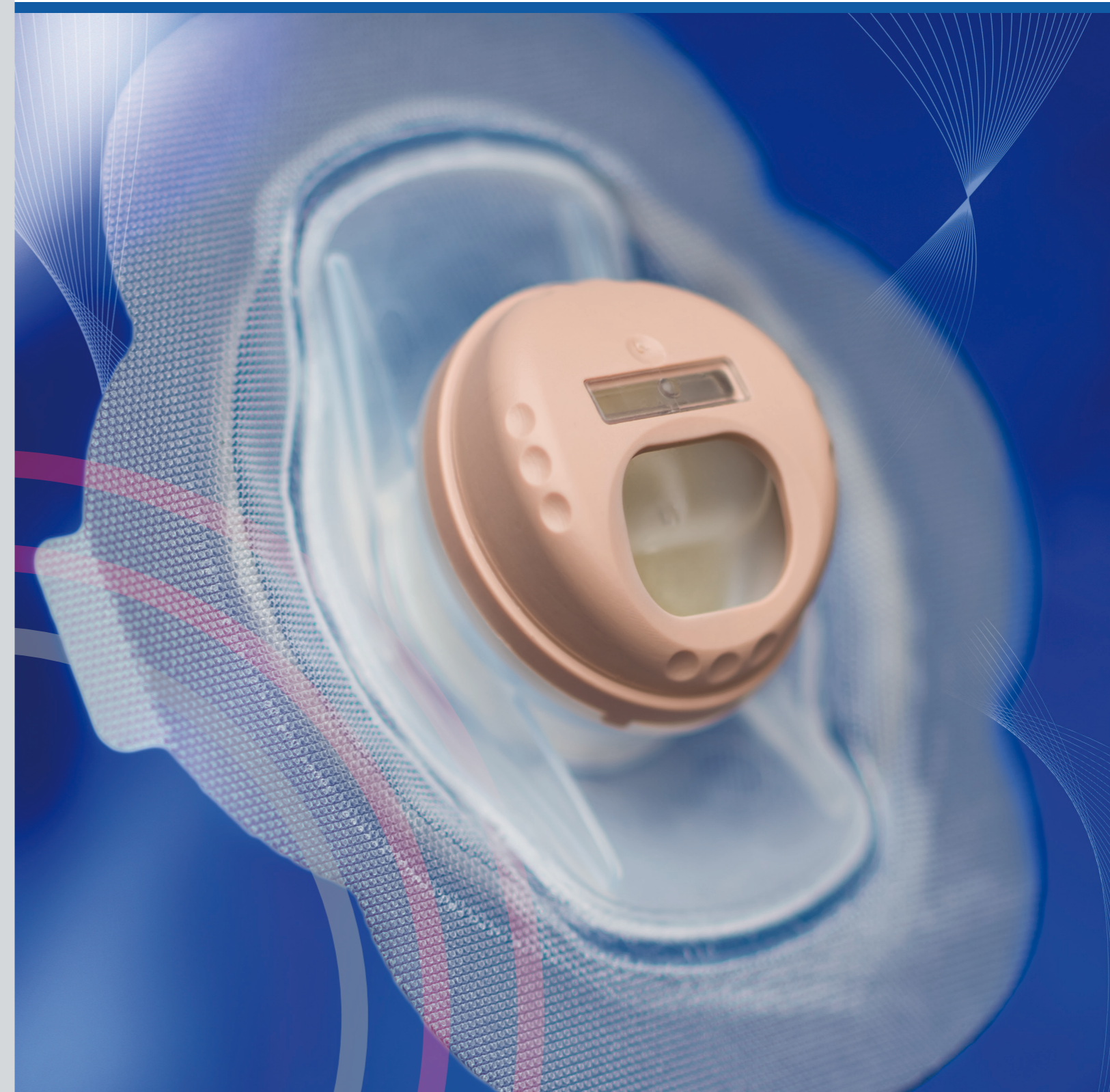

Atos Medicals produkter och expertis är utvecklade i nära samarbete med ledande institutioner, läkare, forskare, logopedier och patienter över hela världen. Våra fakta och argument bygger på resultat från kliniska studier. 1987 började Atos Medical utveckla den första Provox-röstventilen. Vi har sedan dess arbetat intensivt för att utveckla Provox till att bli marknadens ledande system för röst- och lungrehabilitering. Vi fortsätter med att avsätta väsentliga resurser för produktutveckling och utbildningsprogram inom öron- näs- och halsspecialiteten. Vi har ett tydligt mål: Atos Medical ska fortsätta att vara ledande inom ÖNH.

ATOS
MEDICAL
Leading the way in ENT

Svenska

ATOS
MEDICAL
Leading the way in ENT

PROVOX® FreeHands FlexiVoice™

Flexibelt val för maximal frihet

Förmågan att tala efter en total laryngektomi är outhärlig. Alternativen och valmöjligheterna för att kunna tala fortsätter att öka när fler uppfinningsrika lösningar blir tillgängliga.

Vår nya produkt, Provox FreeHands FlexiVoice, erbjuder möjligheten att tala både utan att använda händerna, och med manuell tillstängning.

Det finns tre membranbördigheter tillgängliga för tal utan att använda händerna. Valet beror på det luftflöde och det lufttryck som används vid tal och andning. Det är enkelt att pröva de tre olika talventilerna innan man väljer den som är den bästa lösningen. Beroende på situationen är det också möjligt att byta mellan talventilerna.

En talventil med både automatisk och manuell tillslutning

Skiftande dagliga aktiviteter har olika krav på en talventil. I vissa situationer, på arbetet, vid telefonen, interagerande med andra, kan det vara önskvärt att ha händerna fria. I andra situationer kan manuell tillslutning föredras eftersom tal med fria händer kan vara tröttsamt och ibland kan rösten låta annorlunda. Förmågan och flexibiliteten att alternera mellan manuell tillslutning och tal med fria händer är därför en betydelsefull möjlighet med Provox FreeHands FlexiVoice.

Provox FreeHands FlexiVoice har också ett låst läge. I låst läge stängs inte membranet och tal med fria händer är inte möjligt. Det kan vara användbart under fysisk aktivitet som kräver tyngre andning. Detta läge inkluderar alternativet att manuellt tillsluta för att tala.

Provox FreeHands FlexiVoice ger användaren frihet att välja!




Provox FreeHands FlexiVoice består av två huvuddelar

- En återanvändbar talventil i tre olika versioner med ett membran med 3 styrkor – enkel att hålla isär med synliga och påtagliga punkter på ventilhuset.
- Engångs HME (Heat and Moisture Exchanger, värme- och fuktväxlare), för anpassad andningskomfort, vilket innebär befuktning och uppvärmning av den inandade luften.

Funktioner och fördelar med Provox FreeHands FlexiVoice

- Tre olika talventiler med ett membran med 3 styrkor - lätt, medium, stark - för att erbjuda möjligheten att välja beroende på aktivitetsnivå.
- Diskret design, låg profil, diskret färg och ett lätt hölje.
- Fingertillslutning erbjuder möjligheten att tala med manuell tillslutning när så behövs.
- "Click and Go"-montering, tryck enkelt fast talventilen på HME och den är klar att använda.
- Funktionen Låst läge, hindrar att membranet stängs; fingertillslutning är möjligt för tal.

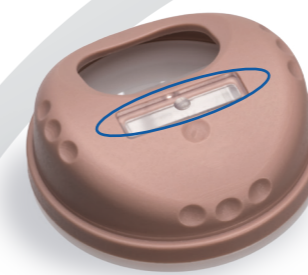

Lätt membran
1 punkt



Medium membran
2 punkter



Starkt membran
3 punkter

Enkel 1-2-3 utprovning med Provox FreeHands FlexiVoice

1. **Montera:** Ta alla tre talventilerna och tryck fast var och en till en FreeHands HME cassette.
2. **Testa:** Börja med mediumheten (2 punkter). Titta på membranet under tal vid olika volymer och under normal samt djupare andning och hostning. Testa manuell tillstängning.
3. **Välj styrka:** Upprepa proceduren med den lätta enheten (1 punkt) och den starka enheten (3 punkter). Välj den enhet som presterar bäst vid tal och andning eller rekommendera olika enheter för olika situationer.

Observera! Läs alltid bruksanvisningen innan en enhet placeras på en patient.