

VIKTIGT!

VID UPPLADDNING, FÅR STRÖMMEN INTE SÄTTAS PÅ FÖRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN.

VID FÖRSTA UPPLADDNING SKALL BATTERIET LADDAS I 24 TIMMAR.

NÄR BATTERIET HÅLLER PÅ ATT BLI URLADDAT HÖRS DET ETT BIP-LJUD FRÅN KONTROLLÅDAN UNDER ANVÄNDNING.

NÄR DU HÖR ETT PIP, MÅSTE DU LADDA BATTERIET, ANNARS KAN BATTERIET SKADAS GENOM ATT HELT URLADDNING.

(OM BATTERIET ÄR URLADDAT KAN MAN INTE KÖRA MOTORN GENOM ATT SÄTTA I UPPLADDAREN I STOLEN OCH VÄGGKONTAKTEN.

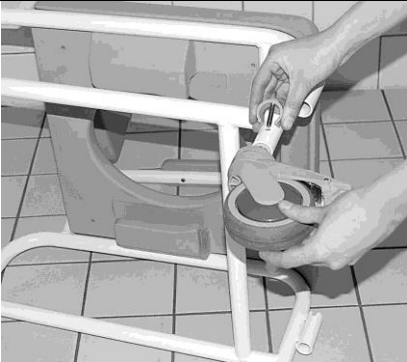
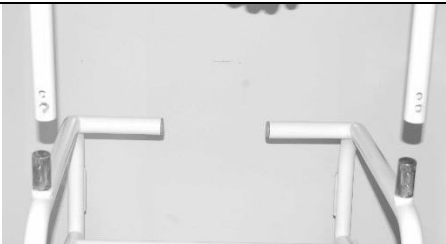


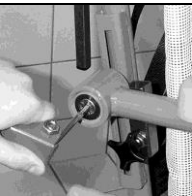

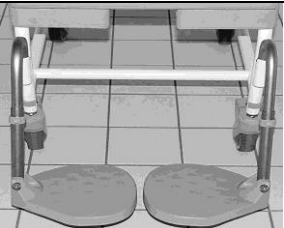
OM LYSDIODEN PÅ LADDAREN LYSER GRÖNT NÄR DEN ÄR ANSLUTEN, ÄR DEFEKT I BATTERIET/SÄKRING SOM SEDAN MÅSTE BYTAS UT.

EN FULL UPPLADDNING TAR VANLIGTVIS CA 8 TIMMAR).

LADDA INTE STOLEN, MEDAN DEN BEFINNER SIG I OMRÅDEN MED VATTEN.



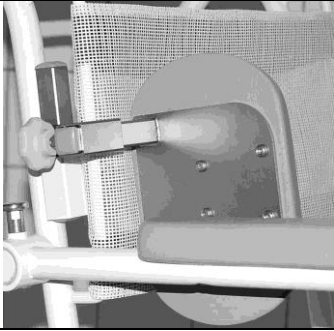
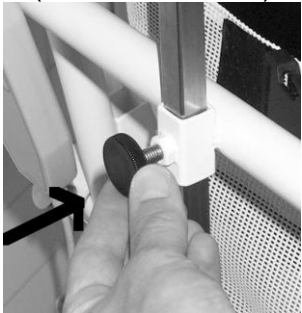



ANVÄND INTE ELEKTRISKA FUNKTIONER PÅ STOLEN MEDAN MAN SPRUTAR VATTEN PÅ DEN.

# Användarhandledning till Bad/Toalettstol M2 Mini El-Tip. Avsedd för användning vid bad/dusch och vid toalettbestyr. (2/5)

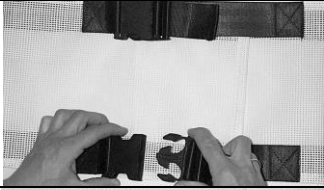



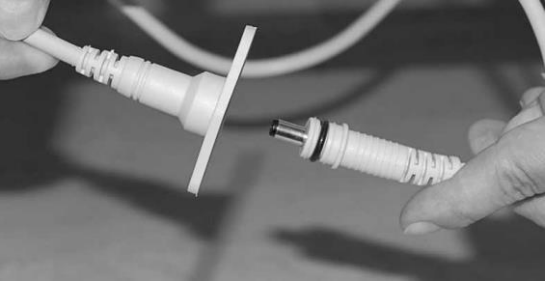
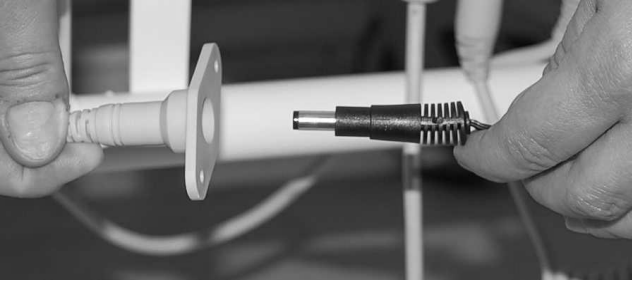
|   |  |
|---|--|
|    | <h3>Montering av hjulen</h3> <p>För att montera hjulen skall alla fyra klips avlägsnas från ramen. Hjulen förs upp i rören och klipsen sätts på plats igen.<br/>Se till att alla fyra hjulen sitter i samma höjd. Hjulen monteras enklast parvis genom att lägga stolen på sidan innan montering och vända på stolen efter att montering av första paret är genomförd.</p>                 |
| <h3>Montering av rygg</h3> <p>Ryggen sätts fast på underramen genom att föra rören ner över de två metalltappar.</p>  |    |
|   | <h3>Montering av ryggstöd på stol</h3> <p>Medföljande skruvar dras åt med hjälp av en insexnyckel. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna för att säkra ryggens stabilitet. Var säker att skruven dras åt ordentligt så rygg stabilitet. Ihåg efter spänningen efter ca. 1 månad. Skruv att kastas iväg av demontering och att använda nya skruvar för nästa fäst. (Art. 800290)</p> |
| <h3>Montering/Demontering av armstöd</h3> <p>Hiv snap låsa, och sedan dra armstödet på hiv och off till sidan.<br/>Armstödet snabbblås utlöses genom att man drar i det, och därefter vippas upp armstödet.</p> |    |
|    | <h3>Justering av armstöd</h3> <p>Höjden på armstöden justeras genom att lossa insexskruven och flytta armstödet till önskad höjd. Därefter dras insexskruven åt igen.</p>  |
| <h3>Låsning av hjul</h3> <p>Innan stolen kan användas i en badsituation skall alla fyra hjulen låsas. Detta görs genom att trycka ner den grå plattan längst fram på hjulet.</p>                                |   |
|    | <h3>Montering av fotstöd:</h3> <p>Höjden på fotstöden justeras genom att ta ur klipsen och därefter placeras fotstöden i önskad höjd för att slutligen sätta klipsen på plats igen.</p>  |

Fortsättning på sida 3

Användarhandledning till Bad/Toalettstol M2 Mini El-Tip.  
 Avsedd för användning vis bad/dusch och vid toalettbestyr.  
 (3/5)

|   |   |
|---|---|
|    | <h3>Justering av skjuthandtag</h3> <p>Klipsen tas ut och handtaget flyttas till önskad position. Klipsen sätts i på plats igen.<br/> <b>OBS!</b> Det är håll så att handtagen kan vinklas antingen bakåt mot hjälparen eller ut till sidan, så att stolen är lättare att manövrera med.</p> |
|    | <h3>Justering vadstöd</h3> <p>Vadstödet sätts fast med kardborreband på baksidan. Djupet på vadstöden justeras genom att sätta fast kardborrebanden längre ut eller in.<br/>         Tvätt av vadstöd: Tvättas vid max. 80 grader.</p>  |
|   | <h3>Montering av sidostöd</h3> <p>Sidostöden klickas ner i de fyrkantiga rören på stolramen. Djupet justeras genom att lossa rattskruven och dra åt den igen när djupet är korrekt. Sidostödet kan också vridas till horisontellt läge om behov finnes</p>                                  |
| <h3>Justering vanligt nackstöd<br/>(Varunr. 310221)</h3>  <p>Nackstödet höjd justeras genom att lossa rattskruven och dra åt den igen när höjden är korrekt.</p> | <h3>Justering H+D nackstöd<br/>(Varunr. 310222)</h3>  <p>Nackstödet höjd- och djup justeras genom att lossa de två rattskruvar och dra åt dem när stödet är i korrekt position.</p>                    |
|    | <h3>Montering hoftbalte</h3> <p>De två delarna sätts fast i ryggstängerna. Höftbältet öppnas och stängs med hjälp av kardborrband.</p>  |
|    | <p>Fortsättning på sida 4</p>   |

# Användarhandledning till Bad/Toalettstol M2 Mini El-Tip. Avsedd för användning vis bad/dusch och vid toalettbestyr. (4/5)


|  |  |
|--|--|
|   | <h3>Ryggjustering</h3> <p>Ryggen öppnas genom att man med vänster hand trycker in de två plasttappar och drar spännet ut med höger hand.<br/>Djupet på ryggen justeras genom att man drar ut remmen, och därefter drar åt den.<br/>Tvätt av rygg: Tvättas vid max. 80 grader.</p>  |
|   | <h3>Tiltning</h3> <p>Stolen tillas genom att trycka på knappen för upp eller ned på handkontrollen. Om användaren själv inte är i stånd att hålla fast i armstöden, skall hjälparen lägga användarens händer i knät innan stolen tillas.</p>  |
| <h3>Uppladning av batteri</h3> <p>Full laddning tar cirka 8 timmar.<br/>När batteriet börjar ta slut hörs ett pip.<br/>När batteriet laddas är lysdioden på laddaren orange. När batteriet är fulladdat LED på laddaren lyser grönt.<br/><b>Obs:</b> Om lysdioden på laddaren lyser grönt när den ansluts, är det ett fel i batteriet och det bör bytas.</p> |  <p>När stolen mottages är batteriet uppladdat.</p>   |
| <h3>Uppladning av batteri</h3>  <p>Med den ena handen tar man tag om kontakten till batterilådan ("honkontakt") på stolen och med den andra handen drar man ur strömkontakten.</p>  | <h3>Uppladning av batteri</h3>  <p>Med den ena handen tar man tag om uppladdningskontakten ("honkontakt") på stolen och med den andra handen skjuter man kontakten från transformatorn ("hankontakt") i botten.</p>                          |
| <p>Fortsättning på sida 5</p>  |  |

# Användarhandledning till Bad/Toalettstol M2 Mini El-Tip. Avsedd för användning vis bad/dusch och vid toalettbestyr. (5/5)

|  |  |
|--|--|
|  | <h3>Kabler</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontakt till batterilåda</li> <li>2. Kabel till batterilåda</li> <li>3. Kabel till handkontrollen</li> <li>4. Kabel till ställdon</li> </ol> |
|--|--|

## VARNING

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>Sitt inte på så 10 cm sitt som stulen till tipping framtiden</p> <p>←</p> |  |
|  | <p>Stå inte på fodplattorna</p> <p>⇒</p>                                     |  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Artikel nr.</b></p> <p><b>Max. belastning 80 kg</b></p> <p><b>OBS! Klipsen skall skjutas i botten vid höjdställning</b><br/>2 års reklamationsrätt mot fabriktionsfel (och rostreklamationsrätt).</p> <p><b>Ramreklamationsret.</b><br/>Vi lämnar 5 års reklamationsrätt mot rambrott på M2-bad/toalettstolar samt rostfria stålbadbänkar. Reklamationsrätten gäller vid fabriktions- eller materialfel och under förutsättning av normalt bruk. Vi gör er uppmärksamma på att normalt slitage inte täcks av garantin.</p> | <p><b>310502/310502-B</b></p> <p><b>Rengöring:</b><br/>Produkten kan rengöras med vanligt rengöringsmedel utan slipmedel. Efter rengöringen skal produkten spolas och torkas. Produkten kan motstå rengöring upp till 85° C i 3 minuter.</p> <p>Produkten är CE-märkt, vilket innebär att produkten uppfyller EUs lagstiftning och möjliggör den fria rörligheten för varor på den europeiska marknaden.</p>  |
|--|--|

| Artikel nr. | Reservedelar                                | Artikel nr.     | Reservedelar  |
|-------------|---|-----------------|---|
| 800179      | Mini Säte (ljusgrått)                       | 800186          | Höjdställbart skjuthandtag, 1st.  |
| 800180      | Mini Överdrag, heltäckande (ljusgrått)      | 800187          | Insexskruvar för höjdställning av armstöd, 1st.                               |
| 310065      | Klips för höjdställning, grå                | 800191          | Pu skumkudde till nackstöd (ljusgrått)  |
| 310165      | Klips för höjdställning, magenta            | 800192          | Pu skumkudde till sidostöd (ljusgrått)  |
| 800012      | Skrivar för fastsättning av skumkuddar 2st  | 800193          | Rattskruvar till sidostöd (rund)  |
| 310076      | Nylonbussning till armstöd                  | <b>El-delar</b> |   |
| 800082      | Bult till armstöd                           | 800267          | Handkontroll (med ledning/kontakt)  |
| 800013      | Nylonbussning till ben                      | 800269          | Kontrollåda   |
| 800182      | Vit netvävsrygg till Mini                   | 800270          | Batterilåda (inkl. batteri)   |
| 800183      | Armstödsset m/PU kuddar set om 2 st.        | 800268          | Aktuator ("motor")  |
| 800181      | PU skumkudde till armstöd 1 st. (ljusgrått) | 800280          | Laddare/Transformator   |
| 800184      | 100 mm hjul med påmonterat ben 1st          | 800272          | Bult med mutter för fastsättning av aktuator (vid topp)                       |
| 800185      | 100mm hjul med ben till M2. Set om 4st      | 800271          | Bult för fastsättning av aktuator (vid botten)                                |
| 310081      | Rattskruvar till nackstödshållare           | 310264          | Monteringskruvar, set om 4 st. (för fastsättning av kontrollåda/batteripaket) |

## HMN A/S

Midtager 22, 2606 Brøndby, Danmark  
Tlf. +45 43 96 24 00, Fax. +45 43 96 26 92  
E-mail: [info@hmn.dk](mailto:info@hmn.dk) Website: [www.hmn.dk](http://www.hmn.dk)