

ANVÄNDARHANDLEDNING 200 KG BADBÄNK (MED TELESKOPBEN)

HÖJDEN JUSTERAS PÅ FÖLJANDE SÄTT:



- 1) BADBÄNKEN LÄGGS NED.
- 2) TA UT KLIPSEN SAMTIDIGT SOM DU HÅLLER I TELESKOPBENET.
- 3) TELESKOPBENET FLYTTAS TILL ÖNSKAD POSITION (AV 3 INSTÄLLNINGSMÖJLIGHETER).
- 4) KLIPSEN TRYCKS TILLBAKA PÅ PLATS IGEN.
SAMMA PROCEDUR UPPREPAS FÖR ÖVRIGA 3 BEN.

VID SNEDSTÄLLNING (VINKLING) AV SÄTET.

BENEN STÄLLS IN SOM BESKRIVET OVAN.
FRÄMRE BENEN STÄLLS IN I EN ELLER TVÅ POSITIONER LÄGRE ÄN BAKRE BENEN.
VID BAKRE BENEN I ÖVERSTA POSITION OCH DE FRÄMRE I LÄGSTA ÄR VINKELN 7°.
VID BAKRE BENEN I MELLANPOSITION OCH FRÄMRE I LÄGSTA ÄR VINKELN 3,5°.



RYGG TILL 200 KG BADBÄNK

- 1) VÄND BADBÄNKEN UPPOCHNER.
- 2) TVÅ FÖRHÖJARRÖR SKRUVAS FAST MED 6 LÅNGA SKRUVAR OCH MED HJÄLP AV EN STJÄRNMEJSEL. (Se bild till höger)
- 3) SÄTT FAST RYGGEN MED VINGSKRUVAR OCH SVARTA AVSTÅNDSBRICKOR. (Se bild till vänster)



HMN a/s
Midtager 22, 2605 Brøndby, Danmark
Tlf.: +45 43 96 24 00 Fax. +45 43 96 26 92
E-mail info@hmn.dk
www.hmn.dk

Artkl. Nr. 310145
Max. belastning 200 kg
OBS! Klipsen skall skjutas i botten vid höjddinställning
2 års
reklamationsrätt mot
fabrikationsfel
(och
rostreklamationsrätt).

Rengöring:
Rengöring: Produkten kann rengöras med vanligt rengöringsmiddel utan slipmedel.
Efter rengöringen skal produkten spolas och torkas. Produkten kann motstå rengöring upp till 85° C i 3 minuter.



Produkten är CE-märkt, vilket innebär att produkten uppfyller EUs lagstiftning och möjliggör den fria rörligheten för varor på den europeiska marknaden.
09.09.15