



Lakansskydd Herkules

Lakansskydd med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Ytskiktet består huvudsakligen av bomull vilket känns behagligt och bekant. Lakansskydden är laminerade vilket gör dem mycket starka, dessutom resulterar det i en slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten. Lakansskydden har bäddflikar, för att fixera skyddet runt madrassen.



Bruksanvisning Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptions-förmågan. Placera lakansskyddet i sängen med den gröna sidan mot madrassen. Bädda fast lakansskyddet ordentligt med bäddflikarna. Dra inte i bäddflikarna när lakansskyddet används som draglakan – ta i stället ett stadigt grepp om den tjocka, laminerade delen. Observera att produkten inte är avsedd att lyfta personer med.

Benämning	Absorba Lakansskydd Herkules
Varumärke	Absorba
Sanicare art nr	1222
Antal produkter/förpackning, st	3
Vikt per produkt, g	494
Totalyta, cm	80x190
Liggytan, cm	80x90
Abskap SS 8760033:2015	1998 ml
Material liggyta	80% Bomull, 20% Polyester
Material undersida	100% Polyester
Bäddflikar	50% Polyester, 50% Bomull
Spärrskikt	Polyuretan
Absorptionsskikt	35% Rayon, 65% Polyester
Tvättråd	<p>Vid avförings- eller blodfläckar bör lakansskyddet snarast sköljas i kallt vatten.</p>
Antal tvättar	Ca 450 (normal hushållstvätt)
Kasseras	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Produkten inte är avsedd att lyfta personer med.



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav



Tillverkare:
Sanicare AB
Skrevägen 15
311 44 Falkenberg

