




Qorpus Vita – Draglakan

Draglakan som tillsammans med ett Qorpus Vita glidlakan möjliggör förflyttning sidled i säng, för att underlätta positionering.

Draglakanet bäddas direkt ovanpå glidlakanet. Vid förflyttning låt bäddflikarna hänga ner på sidorna och ta tag i vingarna på vardera sidan för ett stadigt tag och en säker förflyttning. När positioneringen är avslutad stoppas bäddflikarna in under madrassen. Brukaren ska ligga direkt på draglakanet– inget ytterligare lakan behövs.

Mångårig erfarenhet från vårdsektorn visar att användning av glidlakan minskar risken för tryckskador. Glidlakanet är ett utmärkt arbetstekniskt hjälpmedel för vårdpersonal. Belastningen på ryggar och axlar minskar. Glidytans låga friktion gör att vändning av patient kan utföras på ett kraftbesparande sätt för vårdaren och ett skonsamt sätt för patienten.

Benämning	Qorpus Vita Draglakan	
Varumärke	Qorpus Vita	
Sanicare art nr	3090100G	3090140G
Totalyta LxB cm	100x220	140x220
Rekommenderas säng bredd, cm	90	90
Max brukarvikt kg	220	
Färg	Grå	
Antal produkter/förpackning, st	1	
Material	Polyester/ Bomull	
Tvättråd	 Vid avförings- eller blodfläckar bör lakanet snarast sköljas i kallt vatten.	
Antal tvättar (hushållstvätt – ej industritvätt)	Ca 200	
Kasseras	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning	
Förvaring	Rumstemperatur	
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC	



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Produkten inte är avsedd att lyfta personer med.



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Tillverkare:
Sanicare AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
SHHO 094484 TESTEX

OEKO-TEX® märket innebär att produkterna är tillverkade på ett miljövänligt sätt.




sanicare

Sanicare Hjälpmedel AB, Box 260, 311 23 Falkenberg, Tel. 0346-71 55 30, Fax. 0346-71 55 39
Email. sanicare@sanicare.se, Hemsida. www.sanicare.se

Bruksanvisning/monteringsanvisning Draglakan

- Placera draglakanet ovanpå ett nerbäddat glidlakan (för att underlätta förflyttning i sidled).
- Med ett stadigt tag draglakanet förflyttar man brukaren i sidled.
- När positioneringen är klar skall alltid draglakanet bäddas fast runt madrassen med hjälp av vingarna.
- Brukaren ska ligga direkt på draglakanet – inget ytterligare lakan behövs.
- Produkterna är märkta med anvisning för hur draglakanet skall bäddas i säng för rätt funktion och säkerhet.

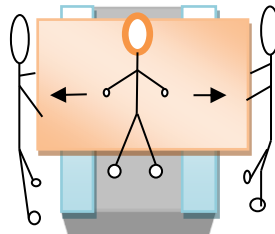

Mått 140cm