

# BRUGSANVISNING OSLO TOILETFORHØJER

Beregnet til at forhøje toiletsæde  
for lettere at kunne sætte sig/rejse sig fra toiletet

## Montering:



De to fingerskruer monteres på  
toiletforhøjeren.

Herefter placeres toiletforhøjeren på  
toiletet og skruerne spændes ind til  
kummen. (Toiletsædet skal være  
oppe før toiletforhøjeren monteres.)

Skruerne løsnes for at fjerne  
toiletforhøjeren fra kummen.

Artkl. Nr. 610271,610272 & 610273

**Max. belastning 225 kg**

2 års reklamationsret mod fabrikationsfejl

## Rengøring:

Toiletforhøjeren kan rengøres med alle  
gængse rengøringsmidler.

**CE**

Produktet er CE-mærket hvilket betyder, at produktet  
overholder EU-lovgivningen og muliggør varens fri  
bevægelighed på det europæiske marked.

07.10.20

HMN a/s

Midtager 22, 2605 Brøndby, Danmark

Tlf.: +45 43 96 24 00 E-mail [info@hmn.dk](mailto:info@hmn.dk)

[www.hmn.dk](http://www.hmn.dk)