



Rekonditioneringsanvisning

1. Gör en visuell besiktning avseende helhetsintryck.
2. Anslutningar: Kontrollera samtliga kablar för skador och att alla anslutningar är i bra skick och sitter ordentligt
3. Kontrollera att alla fästen och skruvar är ordentligt åtdragna.
4. Centralenhet: Kontrollera att det inte finns några synliga skador på centralenheten.
5. Kamerabox: Torka av rutan, kontrollera att det inte finns sprickor i rutan.
6. Batterier: Batterier belastningstestas ev. bytes. Batteripolerna ska rengöras.
7. Laddare: Kontrollera att laddaren ger riktig laddspänning/ström.
8. Länkhjul: Lager i länkhjulsgafflar kontrolleras för glapp och smuts (hår). Rengör, smörj.
9. Stopplista: Kontrollera att listan är hel och sitter fast ordentligt.
10. Drivhjul: Kontrollera att drivhjulen sitter ordentligt fast utan något större glapp. Man ska inte kunna vrida hjulen förhand.
11. Rengöring:
 - a. Drivhjul: Ta bort smuts och hår från hjulaxlar.
 - b. Elektronikdelar:
 - i. Rengör med fuktad trasa ev med mildt rengöringsmedel. Användning av ytdesinfektionsmedel är tillåtet
 - c. Övriga delar: Rengör alla delar noggrant.

OBS: Använd aldrig högtryckstvätt eller vattenslang eftersom det kan orsaka skador på elektroniken och kameraboxen.

JCM Elektronik AB

Tenngatan 2-4
234 35 LOMMA

Tel: 040 – 41 07 80 växel

Mobil: 0708 - 925 384

Fax: 040 – 41 07 18

info@jcmelektronik.se

<http://www.jcmelektronik.se>