

GÅSTOL MED SITTPÅSE

Artikelnummer: 122120

Avsedd användning: Används för barn som behöver en stabil och säker gästol som stöd vid rörelseträning. Gåstolens höjd från golv till sittpåsens lägsta punkt kan ställas in mellan 18 – 30 cm.



Säkerhetsanvisningar:



Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.

- Produkten skall ordinerars av behörig personal (t.ex. sjukgymnast eller annan person med förskrivningsrätt).
- Innan användning - försäkra att gåstolens höjd är rätt inställd. Totala höjden får ej ställas högre än 54 cm. Se markering på stolens ram.
- Kontrollera att hjulen rullar fritt och inte är blockerade.
- Produkten är ej avsedd för utomhusbruk.
- Tänk på att spärra av trappor så att stolen inte kan rulla utför när barnet sitter i.
- Produkten ska ej rullas över trösklar med barnet sittande i.
- Produkten får en skjutas framåt med brukaren sittande i av annan person än brukaren själv.
- Lämna aldrig barnet utan uppsikt när det sitter i gåstolen.
- Produktens utformning begränsar användarens vikt, därav ingen angiven max brukarvikt.

Teknisk specifikation


Bredd:	50 cm
Längd:	60 cm
Höjd sits till golv:	18 - 32 cm
Höjd övre kant till golv:	41 – 54 cm
Omkrets sittpåse (inre):	70 cm
Vikt:	4,2 kg
Material:	Stålrör, bomullstyg



Alla allvarliga händelser som inträffar under användning skall rapporteras till Swereco AB.

Användning:

1. Placera sittpåsen i stålramen och tryck fast med tryckknapparna.
2. Ställ in höjden med hjälp av spärrar på ramens sidor.
OBS! Markering för maximal höjd finns.
3. Justera storleken på sittpåsen med hjälp av kardborrbanden i sidan.
4. Barnet ska placeras med ansiktet i riktning mot handtaget. Se bild.

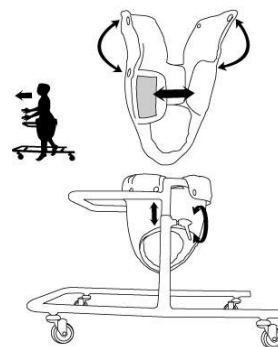

3122120

Skötselansvisningar: Rengörs regelbundet och vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid rekonditionering skall produkten desinficeras genom att torkas med 70% isopropanol. Sittpåsen kan tvättas i tvättmaskin 60 grader strykfritt program.

Reservdelar: Art. nr 122140, Extra sittpåse till gåstol

Återvinning: Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och textilavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, ph 5-9 alt torkas med 70% isopropanol



Sittpåsen kan tvättas i 60 grader strykfritt program



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Tillverkad av:
Swereco AB
Vagnvägen 4
SE-364 42 Lenhovda
Tel: +46 (0)8 5000 5240
www.swereco.com
info@swereco.com