

GÅBOCK KVADRANT

Artikelnummer: 121150, 121160

Avsedd användning: Gåbock kvadrant är avsedd att använda som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

Leveranskontroll: Kontrollera att doppskor finns monterade på alla ben. Använd inte produkten om den är skadad.



Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Gåbocken bör endast brukas på plant underlag. Detta då den maximala brukarvikten är beräknas med alla fyra ben i golvet.
- Produkten ska justeras in av kompetent personal (t. ex. arbetsterapeut, sjukgymnast) för att passa respektive brukares särskilda behov.
- Vid användning ska gåbockens ben vara riktade bort från brukaren. Detta justeras genom att vrida handtaget 180 grader.
- Kontrollera doppskorna regelbundet. Ta bort föremål som fastnar under doppskon. Skadade eller utslitna doppskor ska bytas ut.
- Vid tecken på att höjjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk och skickas in för service.
- Max brukarvikt 120 kg.



Teknisk specifikation

Art nr: 121150 Vuxen
Ställbar höjd: 79 - 99 cm
Vikt: 1,1 kg


Art nr: 121160 Junior
Ställbar höjd: 63 - 74 cm
Vikt: 1,0 kg

Material: Stålrör, PVC (handtag)

Skötselanvisningar: Rengörs regelbundet och vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid byte av brukare ska produkten desinficeras genom avtorkning med 70% isopropanol.

Användning:

1. Justera till lämplig höjd med hjälp av tryckknappen.
2. Kontrollera att benen är riktade ut från brukaren, om inte så justera handtaget genom att vrida det 180 grader med intryckt tryckknapp.
3. Kontrollera doppskorna före användning. Slitna eller skadade doppskor ska bytas ut.

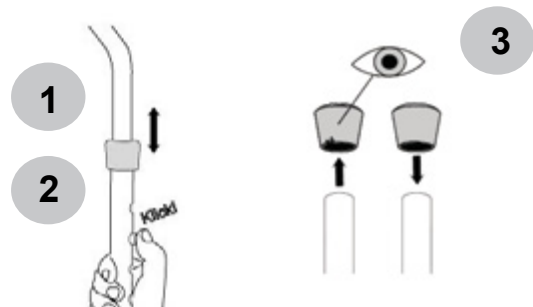

3121150

Reservdelar: Art. nr. 120710, Doppsko kvadrant

Återvinning: Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max säker brukarvikt.



Visuell kontroll



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, ph 5-9.



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Tillverkad av:

Swereco AB

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda

Tel: +46 (0)8 5000 5240

www.swereco.com

info@swereco.com