

## REUMATIKERKRYCKKÄPP

Artikelnummer: 126900, 126901

**Avsedd användning:** Kryckkäppen är avsedd att användas som gångstöd vid gång med båda benen. Den är ej avsedd att använda som gångstöd vid hoppande gång.

### ⚠ Säkerhetsanvisningar:

- Produkten skall ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Konsultera sjukvård innan användandet.
- Produkten skall anpassas till respektive brukares särskilda behov och justeras in av kompetent personal (t.ex. sjukgymnast eller annan personal med förskrivningsrätt).
- Kryckkäppen får bara användas som stöd vid gång med båda benen, d.v.s. skall ej användas för att hoppa fram med.
- Kryckkäppen får aldrig brukas för att t.ex. stoppa en hissdörr eller liknande.
- Doppskon bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna doppskor kan innebära ett försämrat grepp och ska bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Om föremål (t.ex. papper, skräp etc.) fastnat under doppskon skall dessa genast tas bort, greppet kan försämrats.
- Vid halt underlag skall doppskon kompletteras med isdubb och stor försiktighet iakttas.
- Vid tecken på att höjjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk.
- Angiven max brukarvikt gäller även vid användning av två kryckkäppar.
- Max brukarvikt 140 kg.



### Teknisk specifikation

<p>Art. nr: <b>126900</b></p> <p>Ställbar höjd: 95 - 118 cm</p> <p>Vikt: 0,67 kg</p>	<p>Art. nr: <b>126901, lång</b></p> <p>Ställbar höjd: 110 - 133cm</p> <p>Vikt: 0,67 kg</p>
--	--

**Material:** Aluminiumrör, PA (överdel), mjukpolstrad nylon (överdel), TPE (handtag), naturgummi (doppskor)

**Symboler:** Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max säker brukarvikt.



Visuell kontroll



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9.



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.




Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.

Tillverkad av:  
**Swereco AB**  
 Vagnvägen 4  
 SE-364 42 Lenhovda  
 Tel: +46 (0)8 5000 5240  
 www.swereco.com  
 info@swereco.com

## Användning:

1. Justera höjden för kryckkåppen med hjälp av tryckknappen. Kryckkåppens höjd skall anpassas efter den individuella brukaren och bör anvisas av sjukgymnast/förskrivare.
2. Kontrollera tryckknappen för höjjusteringen regelbundet. Glappar tryckknappen måste användningen av kryckkåppen genast avbrytas och produkten skickas in för service.
3. Justera handtaget genom att lossa båda stjärnskruvarna (A) samt låsklossen (B) med insexnyckel 2,5 mm. Handtaget kan då skjutas framåt/bakåt samt vridas åt sidan. Lossa handtagsskruven (C) med insexnyckel 4 mm för att justera handtagets vinkel. Fäst alla skruvar ordentligt före användning.
4. Kontrollera doppskorna före användning. Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya.

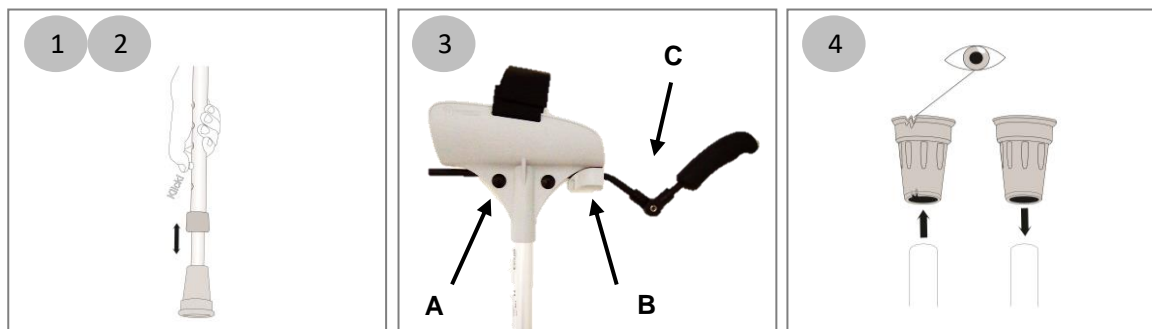

**Skötselansvisningar:** Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvålösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol. Vid rekonditionering bör doppskon bytas ut mot en ny. Nya doppskor beställs från Swereco.

**Återvinning:** Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

## Tillbehör:

Art. nr 123300, Isdubb spets  
Art. nr 123350, Isdubb kronan  
Art. nr 124885, Kåpphållare FLEX  
Art. nr 124889, Gummifot Stabil

## Reservdelar:

Art. nr 120750, Doppsko  
Art. nr 12690007, Kardborreband  
Art. nr 12690050-S, Handtag RA-Krycka Flex  
Art. nr 12690020 Låskloss



Alla allvarliga händelser som inträffar under användning skall rapporteras till Swereco AB.