

Eva
Rörelsehjälpmedel • Förflyttningshjälpmedel

Art nr: 151060, 151062, 151064
151066, 151068

Eva är ett uppresningsstöd som med sin mönsterskyddade design är avsett att användas vid säng som stöd/vändhandtag samt som skydd för att inte rulla ur sängen.

Bygel



Fäste

Golvplatta



Fäste

Benämning	Eva
Art nr	151060, 151062, 151064, 151066, 151068
Material	Pulverlackerade stålrör
Mått och vikt	Art nr 151060 Golvplatta B35 cm, vikt 8,4 kg Art nr 151062 Bygel standard H85 cm, vikt 3,1 kg Art nr 151064 Bygel hög H97 cm, vikt 3,4 kg Art nr 151066 Eva komplett, standard, H85 cm, vikt 11,5 kg Art nr 151068 Eva komplett hög, H97 cm, vikt 11,8 kg
Reservdelar (för Eva tillverkad efter 2020-05)	Art nr 15106020 Fäste Art nr 15106022 insexskruv M8x16 mm, svart Art nr 15106023 insexnyckel NV4 mm fzb Art nr 15100013 rondell gummi 2 mm Eva/Adam Art nr 15106025 Antiglid (till fäste) 74x20x2 mm Art nr 11171004 Plaststyrning, svart till fäste Art nr 15106026 Magnet till insexnyckel 12x2 mm
Förvaring	Rumstemperatur
Teknisk livslängd	5 år under förutsättning att regelbundna kontroller och service utförs
Återvinning	Metallskrot, emballage består av emballage och wellpapp Sorteras efter lokal anvisning
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas av Swereco vid förfrågan

Symboler:



Max: 150 kg

Max brukarvikt



Innehåller pulverlackerat stål



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, ph 5-9 alt 70% isopropanol



max
85°C
3 min

Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Gör alltid en visuell kontroll innan användning



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 151060, 151062, 151064, 151066, 151068


Användaranvisning Säkerställ korrekt montering innan användning och att samtliga skruvar är ordentligt åtdragna. Skruvarna skall kontrolleras regelbundet. Produkten ska rengöras regelbundet och vid behov med tvållösning, ph 5-9. Produkten kan även torkas med 70% isopropanol.

Rekonditioneringsanvisning

Vid rekonditionering ska produkten kontrolleras och utslitna eller skadade delar ska bytas ut. Plaststyrningen i bygelhållaren, rondellgummit under golvstödet samt antiglidgummit på fästet ska kontrolleras och bytas ut vid behov. Äldre skruvar med utstickande skruvskalle skall bytas ut mot den nya invändiga stoppskruven utan skruvskalle. Kan desinficeras i avsedd utrustning i max 85°C i max 3 minuter.



Kontrollera regelbundet att samtliga skruvar är ordentligt åtdragna. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

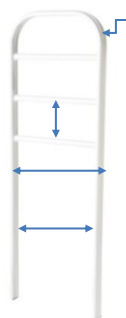

3.7 cm

insexnyckel

11 cm

33 cm

30 cm



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda




Eva
Rörelsehjälpmedel • Förflyttningshjälpmedel

Art nr: 151060, 151062, 151064
151066, 151068

Säkerhetsanvisning:

- Produkten skall ej brukas på annat sätt än vad som är avsett. Installationen skall göras av behörig personal. Swereco påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras ihop på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.
- Säkerställ att det ej finns mattor, möbler eller föremål i nära anslutning till stödet för att minimera snubbelrisk.
- Höjden (H) över madrass bör vara tillräcklig för att ge fullgott stöd vid uppresning.
- Sängbygeln är ej avsedd att användas till små barn på grund av avståndet mellan ribborna (klämrisk).
- Om sängen är utrustad med förhöjningsklossar, ska dessa omsluta och sitta fast runt sängens ben.
- Produkten bör ej fästas på sängar med medar då dessa sängar utgör en ökad tipprisk, inte heller på höj- och sänkbara sängar eftersom det medför en risk att Eva inte är monterad vid sängen på ett säkert sätt. Om kombinationen används ska en dokumenterad individuell utprovning/riskanalis utföras.
- Uppresning Eva bör ej användas tillsammans med fristående dävert då det finns risk att golvplattan och dävertens ben hamnar i konflikt, vilket kan öka tipp risken. Om kombinationen används ska en dokumenterad individuell utprovning/riskanalis utföras.
- Om sängen har motordriven justerbar rygg och/eller benstöd ska klämriskerna beaktas. En sådan säng i kombination med sängbygel ska inte användas av personer som har demens eller spasmer om inte en dokumenterad individuell utprovning/riskanalis har gjorts.
- Avståndet (A) mellan gavel och sängbygel ska vara mindre än 4 cm eller mer än 32 cm. Detta säkerhetsavstånd gäller också om en extra sängbygel monteras på samma sida. Se bild.
- Avståndet (B) mellan madrass och bygel ska vara mindre än 6 cm. Om sängen har rörliga delar (motordriven rygg och/eller benstöd) bör avståndet (B) dessutom vara större än 2,5 cm. Även om säkerhetsavstånden efterföljs kvarstår viss klämrisk.
- Säkerställ korrekt montering innan användning och att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Max brukarvikt 150 kg

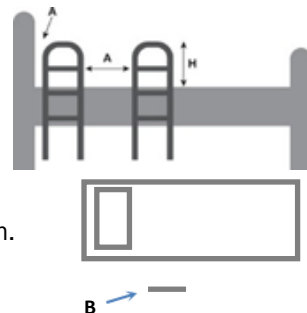

Monteringsanvisning:

- Kontrollera sängens höjd från golv till sängens övre kant så att rätt modell av bygel valts.
- Sänggramen ska bestå av massivt trä eller metall och bredden av sänggramens underkant bör vara 2-8 cm (med fäste tillverkat efter 2020-05).
- Placera uppresningsstödet bygel i golvplattans fästen, skruva fast bygeln i golvplattan genom att dra åt insexskruvarna med medföljande insexnyckel. Golvplattans fästen med tillhörande skruvar ska vara vänd mot sängen/soffan. Justera fästena så att de ligger an mot sänggramen (långsidan) och skruva fast insexskruvarna.
- Säkerställ att uppresningsstödet bygel sitter ordentligt fast i golvplattan, samt att samtliga skruvar är ordentligt åtdragna. Nyckeln bör därefter fästas mot magneten på golvplattans fäste för att finnas tillgänglig vid behov.
- Art nr 15106020 Fäste, passar när sängens höjd från golv till sängens undersida är minst 6 cm. Sängregelns bredd ska vara 2-8 cm. För fästet tillverkat före 2020_05 gäller 2-6 cm bredd på sängregeln.



OBS! Läs säkerhetsanvisningen före montering och användning. Säkerhetsavstånden måste efterföljas om brukaren inte kan mottaga muntlig information om klämrisk. Om osäkerhet råder, kontakta Swereco för vägledning.

